

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DP VACUUM

V1.29
KON201

Vákuumköpölyöző készülék



ELKONcosmetic

H- 2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

T/Fax.: (36)-28-472-129

WEB: www.elkon.hu E-mail: elkon@elkon.hu

Tisztelt vásárló!

A DP VACUUM KON201 egy nagyintegráltságú vákuumköpölyöző készülék. A tervezése folyamán a sokéves gyártási tapasztalatokat, a folyamatos fejlesztéseket és a kozmetikus szakemberekkel konzultálva a következő szempontokat vettük figyelembe:


- Egyszerű kezelhetőség
- Maximális hatékonyság
- Grafikus, többnyelvű kijelzés (4 választható nyelv)
- A készülék különféle elektronikus védelmekkel van ellátva a meghibásodások elkerülése végett
- Hosszú élettartam

Az ELKON termékek filozófiája a kompromisszum-mentes kezelőáramkör tervezését garantálja, amelyhez korszerű áramköri elemeket és megoldásokat használunk fel. A készülék "lelke" egy mikroprocesszor, ami gépies fáradhatatlansággal felügyeli az egyes külső és belső paramétereket, hogy mindig a legoptimálisabb, és leghatékonyabb kezelést lehessen vele elérni. A grafikus LCD kijelző, amelyen minden információt megtalálunk, megkönnyíti a készülék használatát. A készülék a jó öreg köpölyöző 21. századi modern változata. A készülékbe épített szivattyú segítségével vákuumot állít elő. A különböző méretű üvegillesztékek segítségével arc-, ránc-, has-, test-, cellulitisz kezeléseket és nyirokmasszázszt végezhetünk. A beépített nagypontosságú digitális nyomásszabályozónak köszönhetően a vákuum finoman szabályozható, és az egyes kezelésekre pontosan beállítható. A készülék folyamatos és pulzáló vákuumot is elő tud állítani. A széles skálán beállítható paraméterek segítségével hatékonyan többféle kezelést végezhet a géppel.


Kezelőszervek ismertetése:

1. **ON / OFF:** nyomógomb: a készüléket Be / Ki kapcsolja
2. **ESC:** Mégse nyomógomb
3. **LEFT:** Balra nyomógomb
4. **DOWN:** Le nyomógomb
5. **RIGHT:** Jobbra nyomógomb
6. **UP:** Fel nyomógomb
7. **OK:** Elfogad nyomógomb
8. **GRAPHIC LCD DISPLAY:** Grafikus LCD kijelző
9. **VACUUM** csatlakozók: szilikoncsövekkel ide csatlakoznak az üvegillesztékek.
10. **Hálózati csatlakozó**
11. **SERVICE:** Szerviz csatlakozó

Előlap

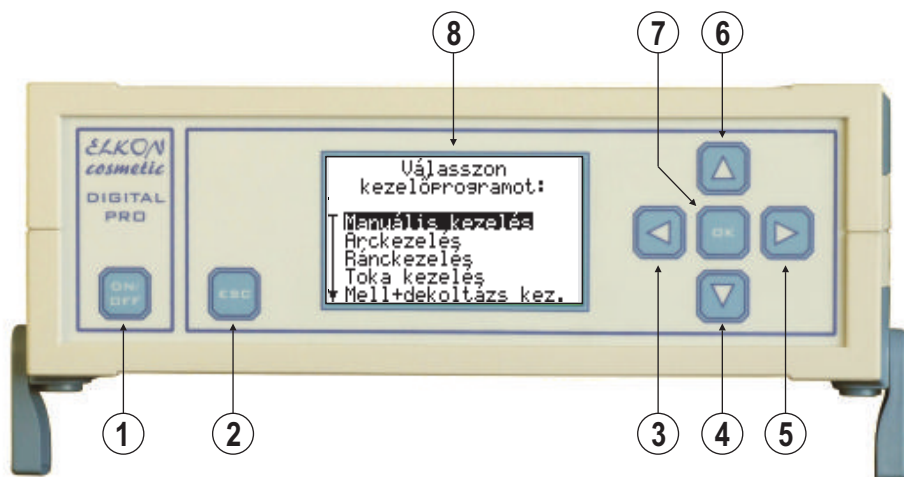


Hátlap

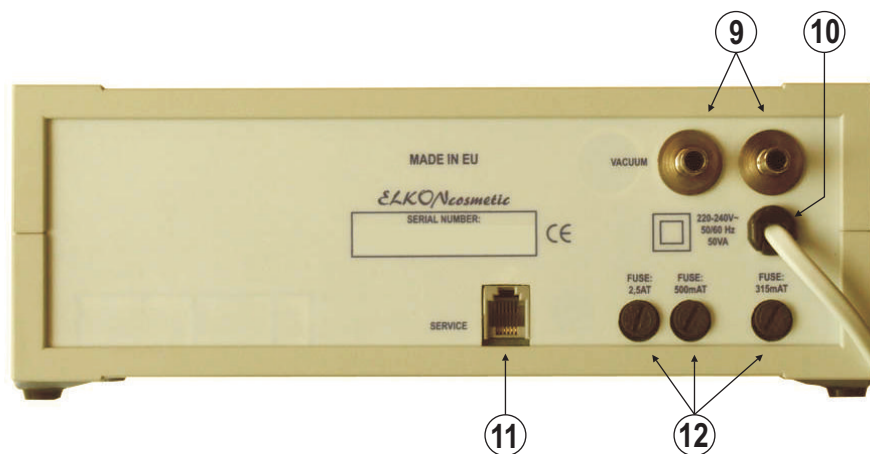


Tartozékok ismertetése:

Testkezelő tartozékok:

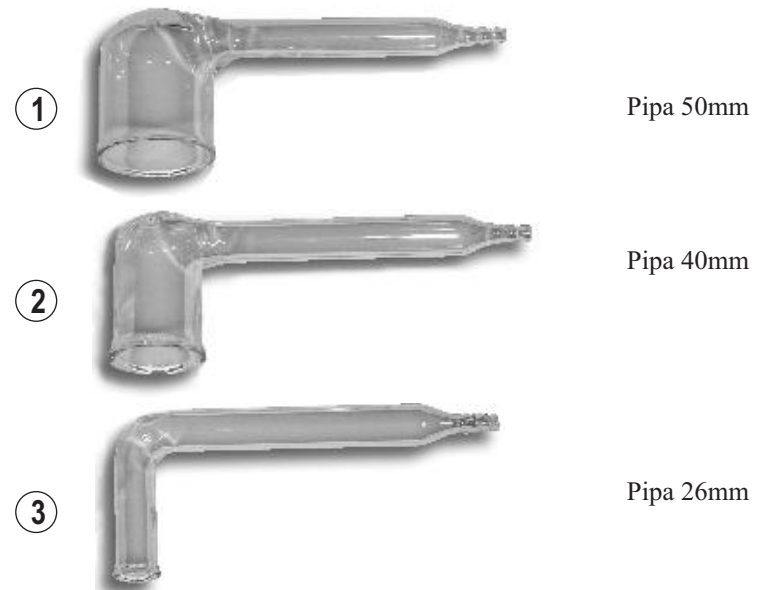

Arckezelő tartozékok:

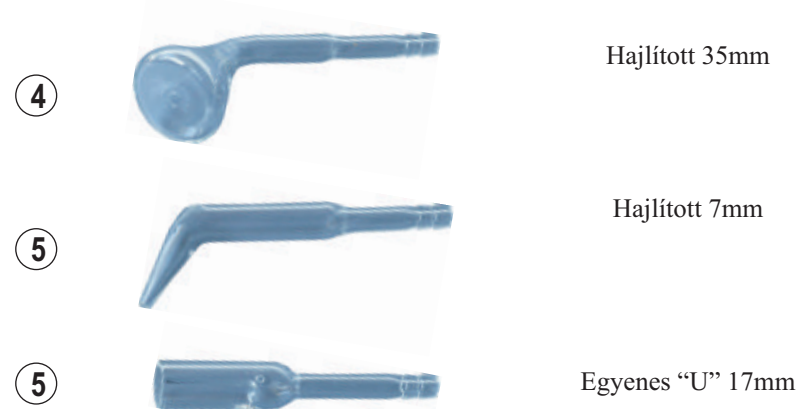

A készülék rendeltetése:

A vákuum szívóhatásának köszönhetően élénkíti a nyirok és vérkeringést, javítja a sejtek oxigénellátását. Aktiválja az immunrendszert, serkenti a salakanyagok elszállítását, így a sejtek és a szövetek regenerálódását, csökkenti a gyulladáskészséget, elősegíti meglévő gyulladások, sebek gyógyulását. Megfelelő üvegilleszték segítségével arckezelést is végezhető, amivel a szem körüli "táskákat", ödémákat csökkentheti. A készülék cellulitiszkezelésre, pangó nyirokvádék kiürítésére és a méreganyagok mobilizálására hatékonyan alkalmazható.



Készülék üzembe helyezése:



A készülék (10) hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali csatlakozó ajszatba. Az (1) **On/Off** (be/ki) kapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelző kivilágosodik és megjelenik rajta az *ELKONcosmetic* felirat, majd néhány másodperc után a főmenü jelenik meg. A készülék ún. menürendszerrel működik (hasonlóan, mint a mobiltelefonoknál). A menürendszer lényege, hogy a menük között a (3,4,5,6) nyomógombok segítségével lehet mozogni. Az **OK** nyomógombbal (7) léphet be az éppen kiválasztott menüpontba, az **ESC** nyomógombbal (2) pedig visszaléphet egyet a menüben. Minden bekapcsolás után az alapértelmezett főmenü jelenik meg a képernyőn.


A készülék alapbeállításai:

A készülék alapbeállításait a főmenü **Beállítások** menüpont alatt tudja megváltoztatni. Ebben a menüpontban a hangerősséget, fényerősséget, kontraszt erősségét, kijelző színét, a készülék szoftverinformációit lehet megtekinteni és a nyelvet lehet kiválasztani. A beállított értékeket a készülék megjegyzi, és még kikapcsolás ill. áramtalanítás után se felejt el.

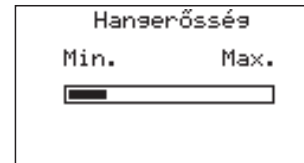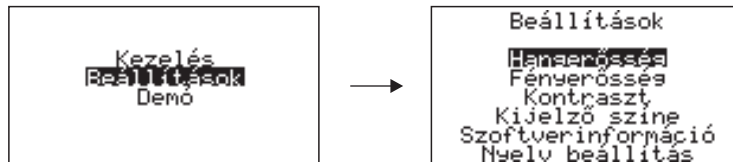


Hangerősség beállítás:

A hangerőt 16 fokozatban lehet változtatni, nagyságát a fekete sáv hossza jelzi. A legkisebb hangerőnél a készülék nem ad ki jelzőhangokat!

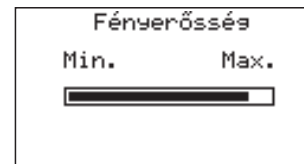


Fényerősség beállítása:

A kijelző háttérvilágításának a fényerősségét 16 fokozatban lehet változtatni, nagyságát a fekete sáv hossza jelzi. A legkisebb fényerősségnél a háttérvilágítás kikapcsol!

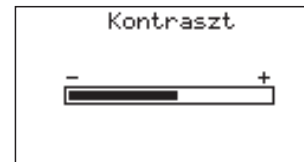


Kontraszt beállítása:

A kijelző kontrasztját 16 fokozatban lehet változtatni, nagyságát a fekete sáv hossza jelzi. A mínusz jel felé halványabb, a pozitív jel felé élesebb képet kapunk.

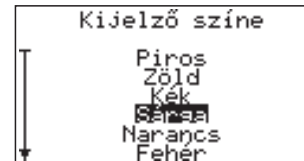


Kijelző színének beállítása:

A kijelző háttérvilágításának színét, a felsorolt színek közül lehet kiválasztani. Figyelem! Minimális fényerősség beállításnál a szín nem változik, mert a háttérvilágítás ki van kapcsolva!

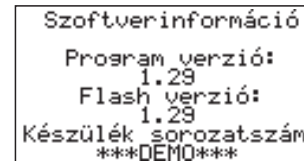

Szoftverinformáció:

A készülék szoftverének verzióját és sorozatszámát írja ki. Az esetleges újabb szoftver megjelenéséről érdeklődjön márkakereskedésünknel.

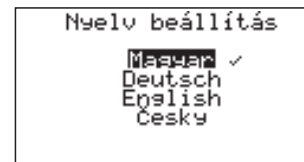


Nyelv beállítás:

A készülék nyelvét lehet beállítani. Négy nyelv közül választhat: Magyar, Német, Angol, és Cseh.

! **A beállítások menüpont alatt a beállított értéket OK nyomógomb (7) megnyomásával tudjuk rögzíteni. Ha az ESC nyomógombot (2) nyomja meg, akkor a beállítás nem változtat a készülék.**


Kezelés a készülékkel:

A főmenü **Kezelés** menüpontját választva megjelenik a kezelések menü. Itt felsorolt listából válassza ki a megfelelő kezelőprogramot. Baloldalon egy nyíl mutatja, hogy még további kezelőprogramok vannak, amiket nem tudott a képernyőre kiírni a készülék. A **LE** nyomógombot használva lefelé lépkedve a többi kezelőprogram is megjelenik.

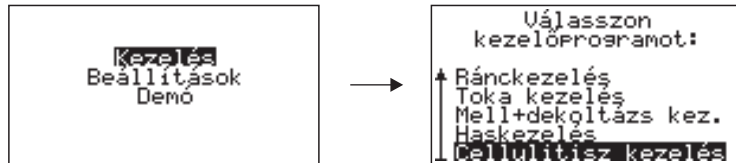

Szűrőket ellenőrizze!

Ha szennyezettek,
cserélje ki!

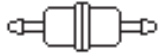

Figyelem! Kezelések előtt a készülék hátulján található szűrőket ellenőrizze, hogy nem szennyezettek-e. És ha szükséges cserélje ki. Elszennyeződött szűrő csökkenti a gép hatékonyságát! Fontos még, hogy a gépet szűrő nélkül üzemeltetni TILOS!



Ha kiválasztotta a kezelőprogramot, akkor a következő kezelőfelülettel lehet a kezelést elvégezni. A felső skálázott sáv a vákuumot méri és kijelzi. Az **Intenzitás** sorban a vákuum erőssége állítható 25-700mbar tartományban. Az **Automata** sorban a vákuum pulzálásának sebessége állítható. A **Kezelést** pedig a legalsó sorban lehet be/kikapcsolni. (Az egyes sorok között a fel és le gombokkal lehet mozogni, és a jobbra és balra gombbal az értékét változtatni).

Manuális kezelés:

Manuális kezelésnél a gép kezelője dönti el, hogy melyik üvegillesztékkel hol szeretne kezelni. A vákuum erősségét is a kezelőnek kell beállítania a megfelelő szintre. Ebben az üzemmódban tetszőleges kezelések végezhetők, amelyek a gép használójára vannak bízva.

Arckezelés:



Arckezelésre a 4, 5 vagy a 6 üvegilleszték szolgál. Az eljárást mindig nyirok masszázzsal kezdje alacsony intenzitással (25-50 mbar). A bőr alatti nyiroknedveket a nagy gyűjtő nyirokerek irányába, a homlok közepétől a fül elülső része felé vezesse, ugyanígy a belső szemzugból indulva, majd a nyaki nyirokgyűjtő felé haladva.

Nyirok masszázzsal alkalmazhatja az automata üzemmódot.

Ránckezelés:



Ránckezelésre a 4 vagy az 5 üvegillesztéket alkalmazhatja. A haladási irány mindig letről felfelé, a ránc vonalában haladva történjen 25-100 mbar intenzitással. Így tudja az elvékonyodott bőrből a sejtnedveket visszaáramoltatni, s így csökkenteni a ránc mélységét.

Toka kezelése:



Toka kezelésre a 4 vagy az 5, esetleg a 3-as pipa alakú üvegillesztéket alkalmazhatja. Kis területen oda-vissza irányban haladva lazíthatja fel a zsírszövetet. Nyaki ráncok esetén a ráncok mentén haladva középről a fül irányába csökkentheti azokat.

Mell- és dekoltázskezelés:



Mell- és dekoltázskezelésre 3 üvegilleszték szolgál. Ebben az esetben a nyirok masszázst középről indulva a hónalj nyirokgyűjtők felé haladva kezdje. A dekoltázs ráncain induljon el, a két mell közötti mélyedésből és haladjon felfelé. Ezután kezdődhet a mell kezelése, mely során a striákat csökkentheti. Ez esetben a mellbimbótól indulva és szintén a hónalj felé haladva.

Haskezelés:




Has kezelésre 2 üvegilleszték szolgál. A nyirokerek ürítése a has két oldaláról indul, és középre a nagy hasi nyirokgyűjtő felé halad. Zsírszövet fellazítására alacsony intenzitású (25-100 mbar) pulzáló (automata üzemmódban).

Cellulitisz kezelés:



Has kezelésre 2 üvegilleszték szolgál. A nyirokerek ürítése a has két oldaláról indul, és középre a nagy hasi nyirokgyűjtő felé halad. Zsírszövet fellazítására alacsony intenzitású (25-100 mbar) pulzáló (automata üzemmódban).


DEMO:

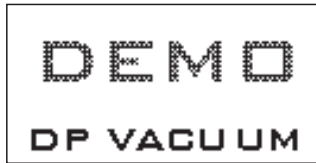


A készülék rendelkezik egy **Demó** menüvel, amibe belépve az egyes funkciókat és kezeléseket végigmutatja automatikusan. A **Demó** menüből kilépéshez nyomja meg az **OK** vagy az **ESC** nyomógombot.

Hibajelzések:

A készülék rendelkezik egy öndiagnosztikai résszel, ami folyamatosan figyeli az egyes részegységeket. Ha valamilyen rendellenességet észlel, akkor hibaüzenetben jelzi. Ilyenkor próbálja kikapcsolni a készüléket, és várni egy kicsit. Ha a hiba újbóli bekapcsolás után is jelentkezik, akkor kérem keresse fel szakszervizünket.

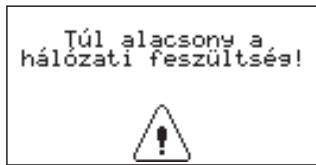

A készülék méri a hálózati feszültséget, és ha az, a működéséhez túl alacsony, akkor hibaüzenetben jelzi. Ha a hibajelzést kikapcsolás után is kiírja a készülék, akkor szakemberrel vizsgálta meg az elektromos hálózatot.

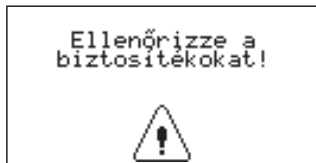

A készülék figyeli a biztosítékok állapotát, és ha meghibásodást észlel, akkor hibaüzenetben jelezi. Áramtalanítsa a készüléket és a hátlapon feltüntetett értékűre cserélje ki a biztosítékot, vagy keresse fel szakszervizünket.



A készülék figyeli a belső szelep működését, és ha valamilyen problémát észlel, akkor hibaüzenetben jelzi. A készülék áramtalanítsa, majd újbóli bekapcsolása után is a hiba jelentkezik, akkor keresse fel szakszervizünket.

Néhány jó tanács:

Kezelések előtt és után ajánlott a fokozott folyadékfogyasztás. Intenzívebb hatás elérése érdekében használjon megfelelő olajokat, krémeket. A nyirokdrenázs soha nem fájhat, a kezelés alatt és után is kellemes érzetet kell keltenie. Akinek alacsony a vérnyomása, annál a nyirokdrenázs után enyhe szédülés jelentkezhet.

Fontos!

Ha intenzív hányinger vagy hidegrázás jelentkezne, azonnal abba kell hagyni a kezelést! Patolikus, betegségi tüneteket mutató bőr kezelése **TILOS!**

Terhes személyen történő kezelés **TILOS!**

A vákuum erősséget a fájdalomig fokozni **TILOS!** (Nem hatásosabb a kezelés.)

A készülék tetején nedves anyagokat tárolni **TILOS!**

A készüléket letakarni **TILOS!**

PACE MAKER viselőinek és szívbetegségben szenvedőknek a készülék használata **TILOS!**

A készülék kettős szigeteléssel van ellátva, ezért **FÖLDELNI TILOS!**

A készüléket letakarni vagy rajta bármit tárolni és ezzel a **hűtését akadályozni TILOS!**

A készülék burkolatán belül szigetetlen **“veszélyes feszültség”** van jelen, amely elég nagy ahhoz, hogy áramütést okozzon. Az áramütés elkerülése végett ne távolítsa el a burkolatot (vagy hátlapot). A készülék belsejében nincsenek olyan részegységek, melyek beállítását, javítását a felhasználó elvégezhetné. A javítást szerviz szakemberrel végeztesse!

A készüléket lehetőleg stabil polcrendszerre helyezze!

Kinek nem javasolt?

Akut gyulladáscsökkentő folyamatok, ilyenkor a helyi gócból a kórokozók az egész szervezetre átterjedhetnek.

Pajzsmirigy-működési zavarok: nyaki nyirokdrenázs során a rosszul működő pajzsmirigy-szövetből hirtelen nagy mennyiségű hormon kerülhet a vérbe.

Trombózisgyanús területeken - a kialakult vérrögökből kis darabok szakadhatnak le és tovasodródva például tüdőembóliát okozhatnak.

Daganatosan elfajult szövetek közelében, főleg, ha azt műtéttel még nem távolították el.

Szívelégtelenséghez társuló ödémáknál.

A készülék és tartozék tisztítása:

Puha, száraz kendővel törölje le a készüléket. Makacs szennyeződések eltávolításához nedvesítsen meg egy puha kendőt enyhe mosószeres oldattal, melyet egy rész mosószer 5 vagy 6 rész víz hígításával készíthet, csavarja ki jól, majd törölje le a szennyeződést. Ne használjon illó folyadékokat, mint például benzint vagy hígítót, melyek károsak a készülékre.

Műszaki adatok:

Készülék:

Hálózati feszültség	230V~, 50Hz
Teljesítmény-felvétel	max. 50VA
Érintésvédelmi osztály	II. Földelni tilos!
Hálózati biztosíték	315mAT (230V~)
Gyengeáramú bizt.	2,5AT (16V=) 500mAT (16V=)
Vákuum	0-700 mbar
Tömeg	3,0kg



Megjegyzés:

A készüléken mindennemű átalakítás ill. módosítás a garanciális jogok megszűnését vonja maga után.
A hálózati kapcsoló másodlagosan kapcsolt, és ezért nem választja le a készüléket a hálózatról kikapcsolt állapotban.

A folyamatos fejlesztések következtében a műszaki jellemzők, a készülék megjelenése, szolgáltatásai előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Ezekről a változásokról és az esetleges szoftverfrissítésről márkakereskedésünknel érdeklődhet.