

E4501 Ultrahangos és Nagyfrekvenciás (VIO) kombinált (2 az 1-ben) professzionális készülék használati utasítása



A készülék kozmetikai szalonok szolgáltatását bővítendő, szakmai felkészültséget igénylő professzionális készülék.

Rövid általános emlékeztető az az **ULTRAHANG** és **VIO** (nagyfrekvenciás készülék) funkciók jótékony hatásairól

1 Mechanikai hatás: az ultrahangos rezgés bejutva a szövetekben lágyítja, átjárhatóvá teszi azok sejtfalát. Segíti a vér mikrocirkulációját, ingerli az idegrendszert és a sejteket, energiát továbbít a bőr mélyebb rétegeibe.

1 Melegítő hatás: felgyorsítja a vér áramlását, serkenti az anyagcseréjét, nyugtatja az idegeket, csillapítja a fájdalmat. Lenyugtatja az izmokat, így elősegíti a relaxációs állapotot.

3 Kémiai hatás: biokémiai hatására javul a polimerizációs, decompozíciós válasz.

Az ultrahang további hatásai:

Feloldja a rögzít, eltünteti a bőrpírt, a pangó ereket.

Lágyítja a meszesedést, eltávolítja a zsírt és kezeli az aknét.

Pigment rendellenességnél hatékonyan bontja a pigmenteket és megakadályozza a szeplők újraképződését.

Eltávolítja a szemkörnyéki ödémát és sötét karikákat.

A masszázs elősegíti a bőr textúrájának javulását.

A VIO nagyfrekvenciás funkció további hatásai:

Argon vagy neon gázzal töltött üveg elektróda fényt bocsát ki, mellyel elektromos kisüléseket okoz a bőr és az elektróda közötti kontaktussal, ezzel ózont képezve fertőtleníti a bőr felszínét, összehúzza a pórusokat.

Stimulálja a vér cirkulációját, serkenti a mirigyek aktivitását, segíti a kiválasztást és a hasznos felvételt.

Támogatja az anyagcserét, sterilizáló hatású.

Hőt termel a bőr textúrájában, így segíti a bőr számára hasznos anyagok felszívódását





Szárazítja a faggyút, összehúzza a pórusokat, akadályozza az aknék kialakulását és az aknékért felelős baktériumok elszaporodását.

Tisztító hatású.

Műszaki és technikai adatok:

TERMÉK MEGNEVEZÉS	2 IN 1 Kozmetikai készülék
Model szám	H4501
Funkciók	Ultrahangos és nagyfrekvenciás készülék
Névleges feszültség	AC 220-240V ~
Névleges frekvencia	50/60Hz
Felvett teljesítmény	30 W
Ultrahangos kim. frekv.	>1000000Hz
Csomag méretek: H-Sz-M	442*412*147mm
Netto súly	2.95Kg


Csomagolási tartozék lista

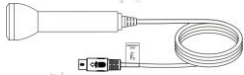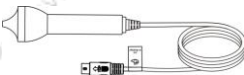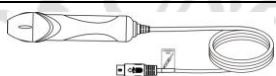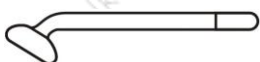Név	ábra	Menny.
Készülék		1 darab
Hálózati kábel		1 darab
Arc- és test kezelő közepes fej		1 darab
Szemkörnyék kezelő fej		1 darab
Nagyfrekvenciás elektroth. Kézi egység		1 darab
Gomba form. elektróda nagy felületre		1 darab
Kanál form. elektróda kis felületre		1 darab
Pontvégű elektróda szűk helyekre		1 darab
Egyenes rúd form. elektróda		1 darab
Kezelési utasítás		1 példány

Készülékház:




Ultrahang tartozékok:

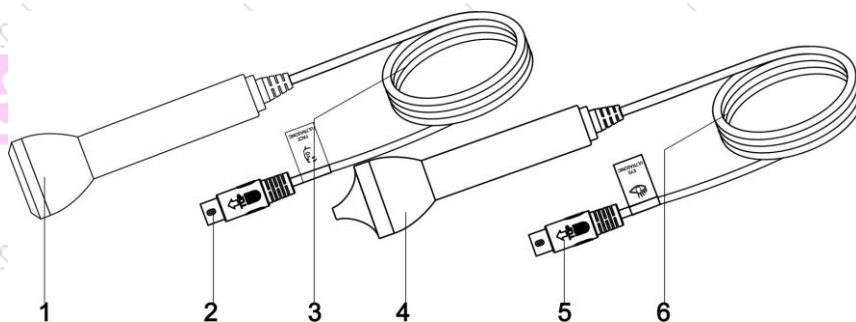

1-2-3. arc- és test kezelő fej, csatl. dugó és kábel

4-5-6. szemkörnyék kezelő fej, csatl. dugó és kábel


Vio tartozékok:

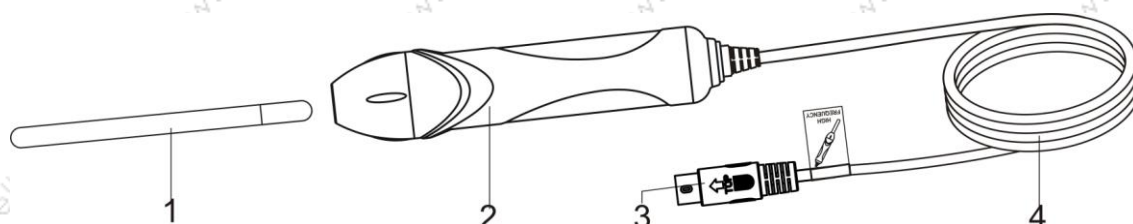

1. Vio üveg elektróda


2-3-4. Vio kézi egység, csatlakozó dugó és kábel

Az üvegillesztéket (elektródát) mindig bekapcsolás előtt, ütközésig helyezze a markolatba!

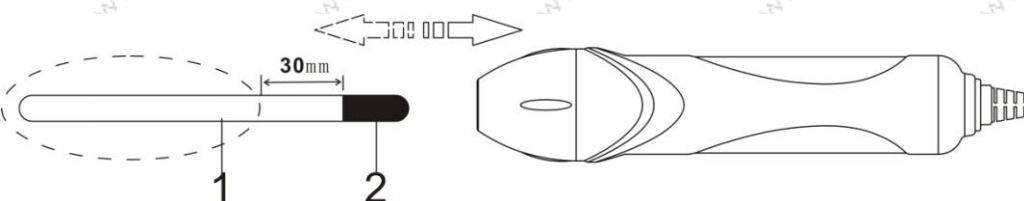


Kezelő panel:

1. Időzítés állítás
2. funkciók kiválasztása
3. Főkapcsoló, kiválasztó gomb
4. Üzemmod kiválasztás elemei
5. intenzitás állítása


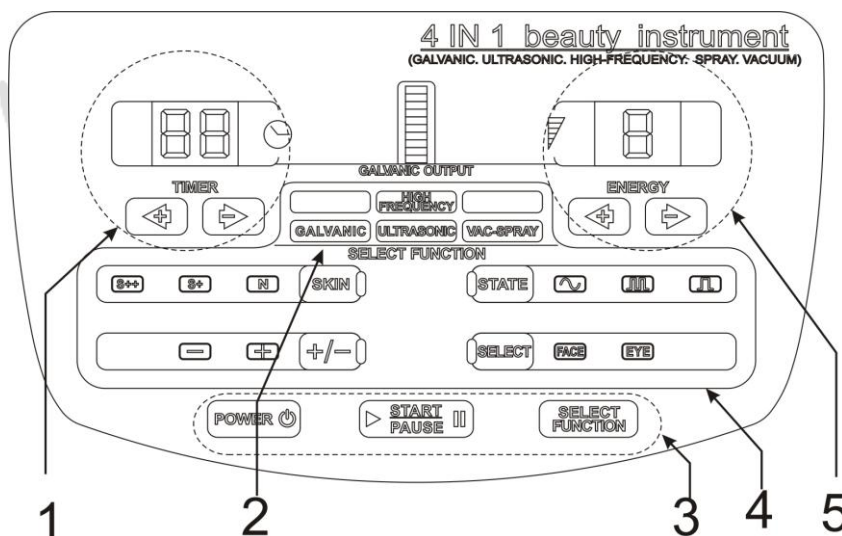


Kezelő felület ismertetése:

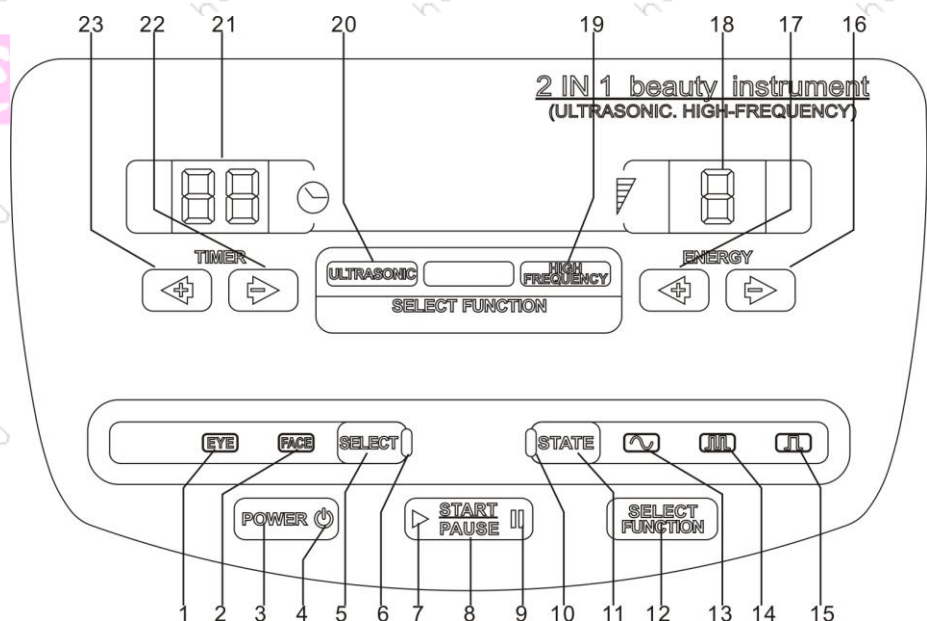

1. Szemkörnyék kezelő fejl jelző lámpa
2. Arc- és test kezelő fejl jelző lámpa
3. BE kapcsoló
4. Bekapcsolást jelző lámpa
5. kezelőfejl választó gomb
6. Kezelőfejl választást jelző lámpa
7. működési indítást jelző lámpa
8. Indít/leállít gom
9. Leállítást jelző lámpa
10. Jelforma válastó lámpa
11. Jelforma kiválasztó gomb
12. Funkció kiválasztó gomb
13. Folyamatos hullám jelző lámpa
14. Hibrid hullám jelző lámpa
15. Szögletes, pulzáló jelforma jelző lámpa
16. Intenzitást csökkentő gomb
17. Intenzitást növelő gomb
18. Intenzitás kijelző
19. Vio funkció jelző lámpa
20. Ultrahang funkció jelző lámpa
21. Időzítés kijelző
22. Időzítést csökkentő gomb
23. Időzítést növelő gomb

Hátsó csatlakozások:

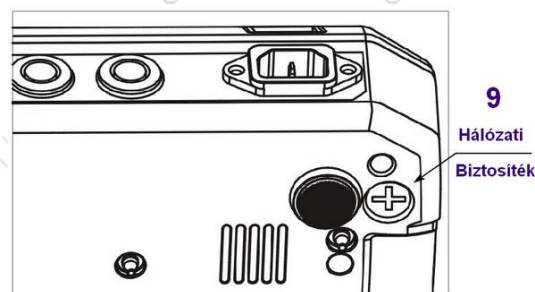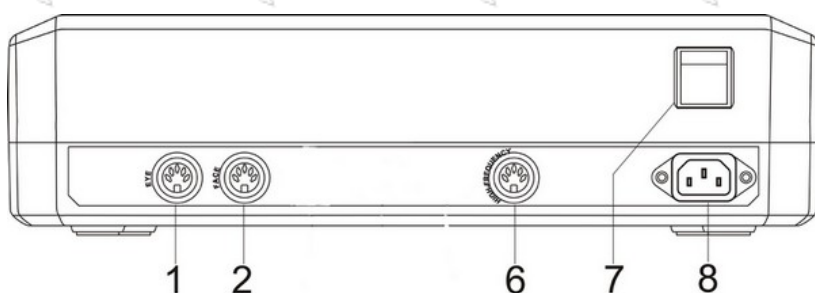

1. Arc- és test kezelő fejl csatlakozása
2. Szemkörnyék kezelő fejl csatlakozása
6. Vio kimeneti csatlakozó
7. Hálózati kapcsoló
8. Hálózati bemenet csatlakozása
9. Hálózati biztosíték

Minden tartozékot az áram alá helyezés előtt csatlakoztassuk!

Kapcsolja be a főkapcsolót a készülék hátulján, a kontroll fény visszajelzi az áramot.

Nyomja meg a  a kontroll panelen,  világít, standby (készenléti) üzemmódba helyezték.

Figyelmeztetés!

Ultrahangra vonatkozó:

Használaton kívül ne tartsa bekapcsolva fejet, mert ezzel a fej túlmelegedését okozhatjuk, amivel jelentősen lerövidülhet a kezelőfej élettartama.

Ne válassza le a rozsdamentes acél részt a markolatról. Amennyiben rendellenességet tapasztal forduljon a szervizhez, mielőtt nagyobb kár esik a kezelőfejben.

Tilos a fejet vízbe vagy bármilyen folyadékba belemeríteni!

Tilos a kezelőfejet sérült felülettel vagy komoly, durva karcolással használni a bőrön! Ebben az esetben másik fejjel helyettesítendő!

Vio-ra vonatkozó:

A vio elektródája működés közben ne érintkezzen fémmel!

Érzékeny, erősen rozáceás bőrön, sérült felületen, terhes nőnél, elektromos implantátumot viselőnél (pl. pacemaker) ne használja!

Vio alkalmazásával egyidőben ne használjon olyan krémet, maszkot stb., amely ethanol tartalmaz, csakis azt követően szabad!

Szemgolyón nem használható!

A készülék csatlakozásait a megfelelő pozícióban és stabilan kell csatlakoztatni!

A készülék használata csak kozmetikus szakember számára és által ajánlot!

Ne közelítse a vio egységet más, működésben lévő elektromos készülékhez, mert mindkettőben zavart okozhat!

Körültekintően, figyelemmel legyen a készülék használatakor!

Általános figyelmeztetések:

Munka közben ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne csavarodjanak, ne törjenek meg!

Sérült, törött tartozékok, alkatrészek esetén a hiba elhárítását bízza mindig a szerviz szakembereire!

Minden nem megszokot jelenség esetén azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A hibát jelezni kell a szakszerviznek, tilos a készülék házát felnyitni, beavatkozni!

Tilos nedves, párás helyen használni és tárolni!

Tilos a működő készüléket gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe helyezni, közelükben tárolni!

A tartozékok cseréje behelyezése előtt húzza ki vagy áramtalanítsa a készüléket!

Forgalmazza: **ELKON cosmetic Kft.**

H-2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu

Tel: [+36-28-472129](tel:+3628472129)

Mobil: [+36-70-9492198](tel:+36709492198)