




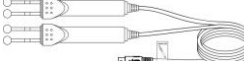
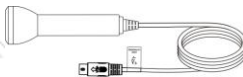
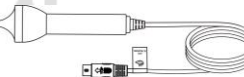
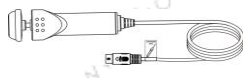
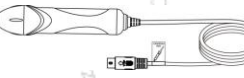
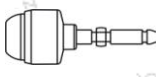
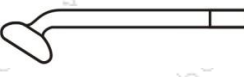
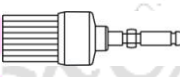

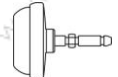

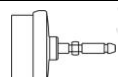

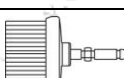
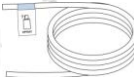
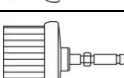

E-4506 6in1, E-4506D 7in1 Multifunkciós kozmetikai készülékek Kezelési utasítása

ultrahang, galván, vio, frimátor (körkefés peeling), spray, vacuum,
(+gyémántfejes mikrodermabrázió E-4506D)

Specifikáció és műszaki adatok:

Termék	6 IN 1 Kozmetikai készülék
Tipus	H4506
Funkciók	Ultrahang, galván, vio, frimátor, spray, vákuum
Hálózati feszültség	AC 220-240V
Hálózati frekvencia	50/60Hz
Felvett teljesítmény	50 W
Méretek (L*W*H)	442*412*147mm
Súly	3.35 kg

Csomag lista:

Név	Kép	db	Név	Kép	db
Készülék		1	Görgös fej		1
Hálózati kábel		1	Gömb fej		1
Test-arc fej		1	Ultra fej szemkörnyék		1
Frimátor motor		1	Vio fej		1
Kristályos csiszoló kicsi		1	Vio ill. "gomba"		1
Kefe finom kicsi		1	Vio ill. "kanál"		1
Kristályos csiszoló nagy		1	Vio ill. "gömb"		1
Finom csiszoló nagy		1	Vio ill. "rúd"		1
Kefe finom nagy		1	Vákuum cső		1
Kefe kemény nagy		1	Spray cső		1


Spray tartály		2	Vákuum markolat		1
Vákuum illeszték		1	Szivacs szűrő		3
Használati utasítás		1	Garancia		1

A készülék:




Tartozékok:

Ultraszhang tartozékai:

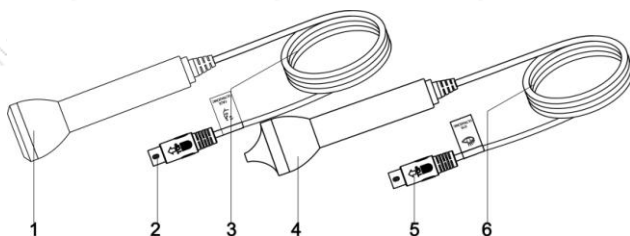

1. Test- és arckezelő fej
2. test- és arckezelő fej csatlakozó dugója
3. Test- és arckezelő fej vezetéke
4. Szemkörnyék ápoló fej
5. Szemkörnyék ápoló fej csatlakozó dugója
6. Szemkörnyék ápoló fej vezetéke

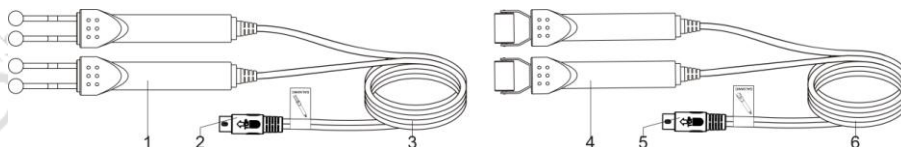

A galván tartozékai (iontoforézis):




1. Gömbvégű elektróda
2. Gömbvégű elektróda csatlakozó dugója
3. Gömbvégű elektróda hajlékony vezetéke
4. Görgős elektróda
5. Görgős elektróda csatlakozó dugója
6. Görgős elektróda hajlékony vezetéke

Gömb elektróda: Kicsi vagy egyenetlen bőrfelületen használatos

Görgős elektróda: Nagyobb sík bőrfelületen használatos


A készüléken a  és  lámpák jelzik a piros színnel jelölt elektróda polaritás állapotát.

A Vio tartozékai (high frequency):

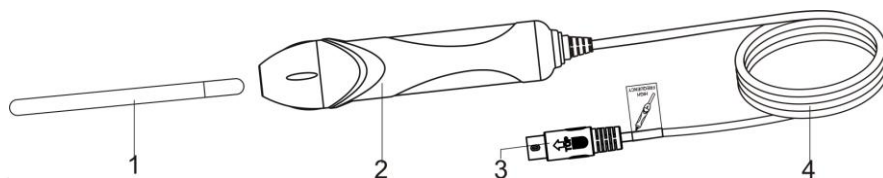

1. Vio üvegelektroda
2. Vio kézi egysége
3. Vio csatlakozó dugója
4. Vio hajlékony vezetéke

A különböző formájú elektródák különböző területeken alkalmazhatók:

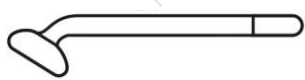

A: Gomba lakú üvegelektroda – nagy területen való használatra (arc, homlok, nyak, test, stb).



B: Kanál alakú üvegelektroda – közepes területeken való használatra (állcsúcs, stb).





C: Kis gömb végű üvegelektroda – nagyon kicsi területen való használatra (orr hajlatai, stb).



D: Rúd alakú üvegelektroda – közvetett használatra (vendég)

VIO- illeszték behelyezése a fejbe illetve kivétele az ábra szerint:

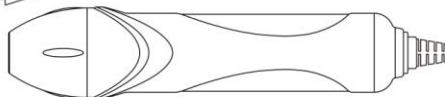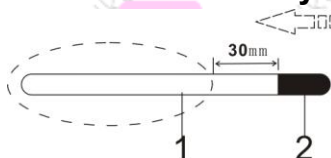

1. Elektróda üveg része
2. Elektróda fém része


Az elektródát ütközésig tolja bele a fejbe úgy, hogy a fém része (2) ne legyen megérinthető (30mm).

Használat után az üvegelektrodát mindig húzza ki a fejből.

Peeling kézi egység:


1. Tisztító illeszték
2. Fej (motor)
3. Fej csatlakozó

Fej csatlakozó vezetéke

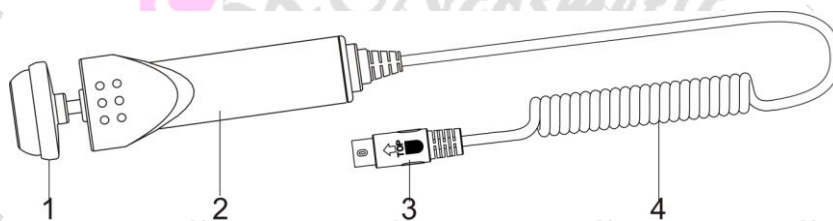

Illesztékek:


1. Kristályos csiszoló kicsi: kis területek kezelésére, bőrkeményedésre kézen, lábon stb.
2. Kefe kicsi: tisztításra masszírozásra kis területeken, arcon, stb.
3. Kristályos csiszoló nagy: nagy területek kezelésére, bőrkeményedésre kézen, lábon, stb.

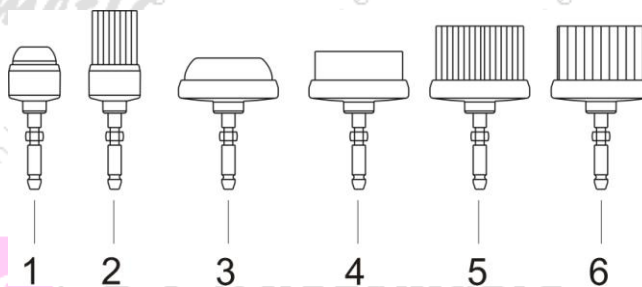

4. Finom tisztításra, masszírozásra nagy területeken.
- 5-6. Kefe nagy puha és kemény: Tisztításra, masszírozásra nagy területeken, arcon és egyéb helyeken.


Spray és vacuum tartozékok:

1. Spray tartály
2. Spray tartály összekötő cső
- 3-4-5. Vákuum illesztékek
6. Vákuum kezelő fej összekötő cső
7. Vákuum kezelő fej

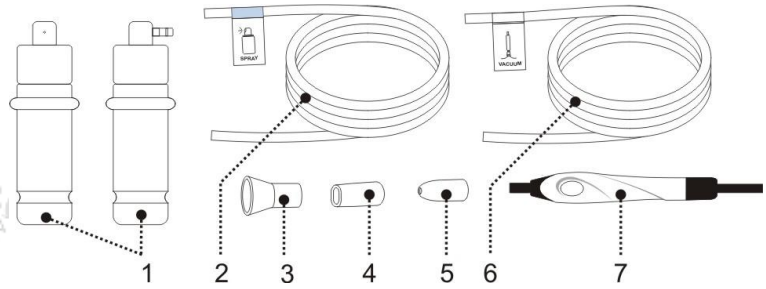


Spray tartály:

1. Fúvóka
2. Tartály kupak
3. Szívócső
4. Spray tartály
5. Levegő csőcsatlakozás
6. Levegő szabályozó nyílás

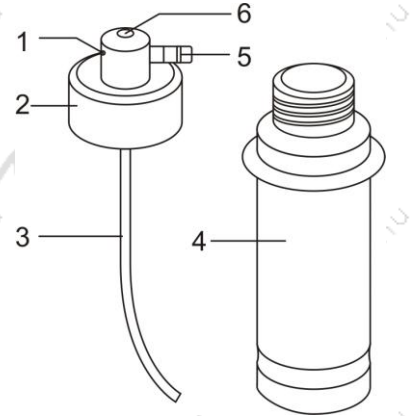


Vákuum szívófej:

1. Vákuum illeszték
2. Tömítő gyűrűk
3. Vákuum szabályozó nyílás
4. Markolat
5. Tömítő gyűrű
6. Szűrő szivacs
7. Szívócső csatlakozó

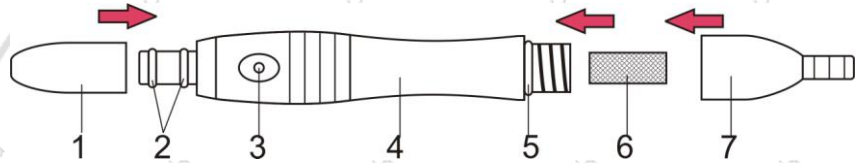


Kezelőpanel információ:

1. Időzítés állítás
2. Funkció kijelző
3. Funkció választó
4. Beállítás kijelző
5. Teljesítmény szabályozás

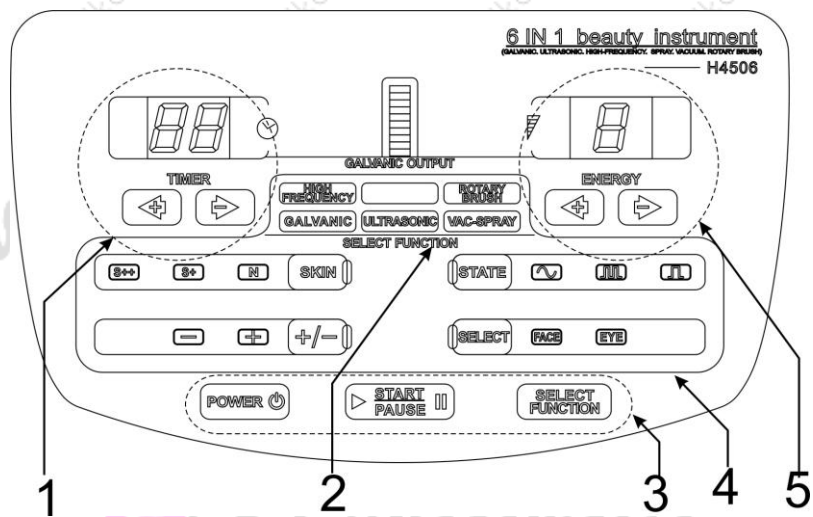


Kezelő- és információs panel:

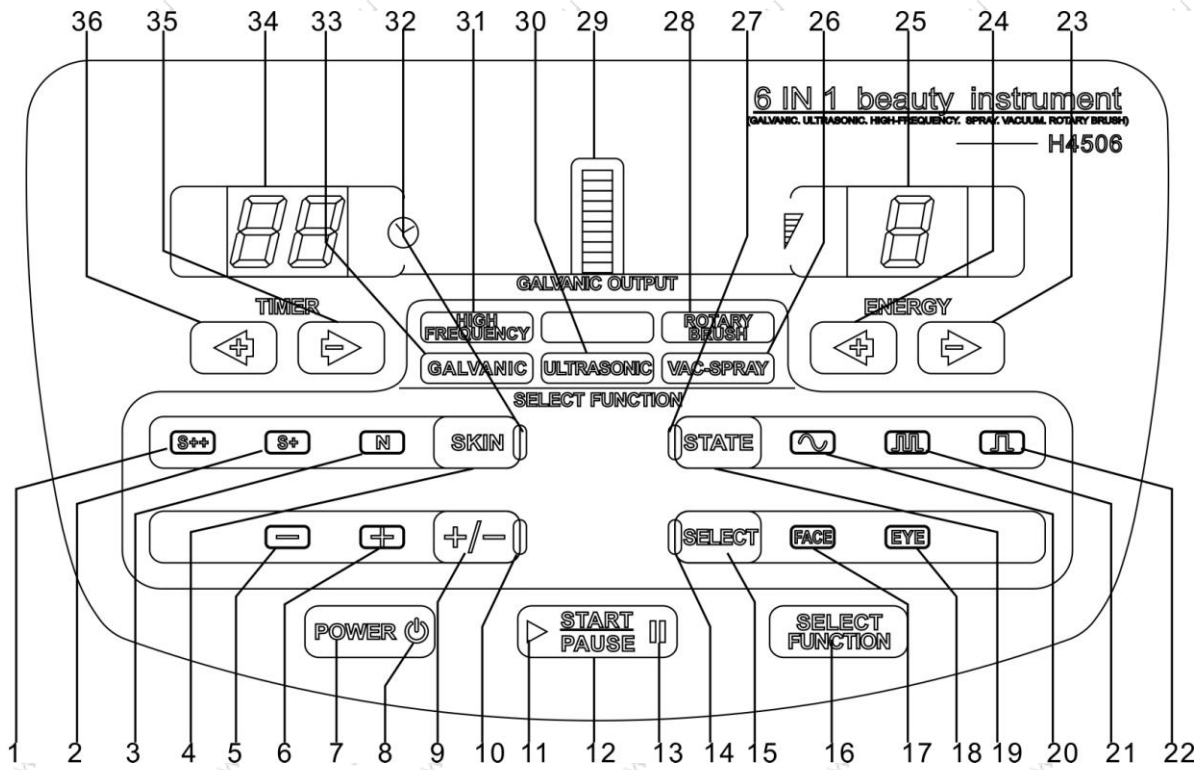

1. Nagyon érzékeny bőr jelző lámpa
2. Érzékeny bőr jelző lámpa
3. Normál bőr jelző lámpa
4. Bőr típus választó gomb
5. Anion (-) vezető jelző lámpa
6. Cation (+) vezető jelző lámpa
7. Bekapcsoló gomb
8. Bekapcsolást jelző lámpa
9. Polaritás váltó gomb
10. Áramvezetés választó jelző lámpa
11. Indítást jelző lámpa
12. Start/Szünet gomb
13. Szünet jelző lámpa
14. Ultra fej választás jelző lámpa
15. Fej választó gomb
16. Funkció választó gomb
17. Ultra arc-testkezelő fej jelző lámpa
18. Szemkörnyékápoló fej jelző lámpa
19. Jelforma választó gomb
20. Folyamatos hullám jelző lámpa
21. Hibrid hullám jelző lámpa
22. Széles pulzus hullám jelző lámpa
23. Teljesítményt csökkentő gomb
24. Teljesítményt növelő gomb
25. Teljesítmény kijelző
26. Spray és vacuum funkció jelző lámpa
27. Jelforma választás jelző lámpa
28. Frimátor választását jelző lámpa
29. Galván kimeneti szintjelző
30. Ultrahang választását jelző lámpa
31. Vio választását jelző lámpa
32. Bőrtípus választó jelző lámpa
33. Galván funkció választását jelző lámpa
34. Időzítés kijelző
35. Időzítést csökkentő gomb
36. Időzítést növelő gomb



Csatlakozók a hátlapon:

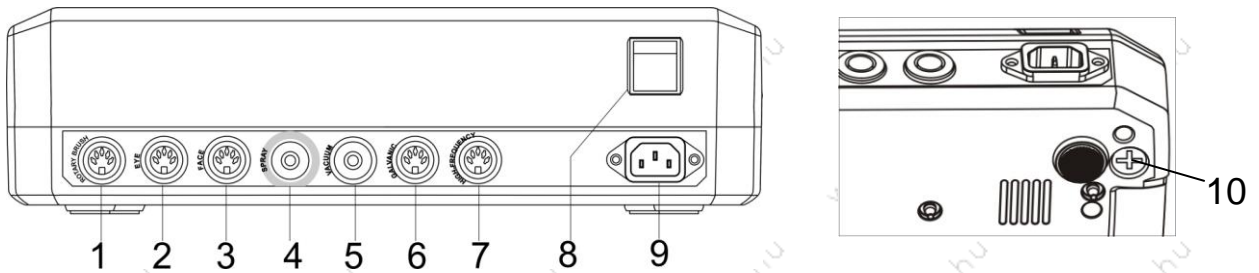


1. Peeling csatlakozója (frimátor) 2. Ultrahang arc-testkezelőfej csatlakozó 3. Ultrahang szemkörnyék kezelőfej csatlakozó 4. Spray csatlakozó 5. Vákuum csatlakozó 6. Galván csatlakozó (ionto) 7. Vio csatlakozó (high frequency) 8. Hálózati kapcsoló 9. Hálózati csatlakozó 10. Hálózati biztosíték

Csatlakozási utasítás:

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
2. Mindegyik tartozék kábele el van látva funkciójának megfelelő szimbólus ábrával és felirattal, aminek segítségével megfelelően csatlakoztathatja tartozékait a készülékhez a mellékelt ábrák szerint. A készülékhez egyidejűleg csak az egyik iontoforézis tartozék csatlakoztatható.

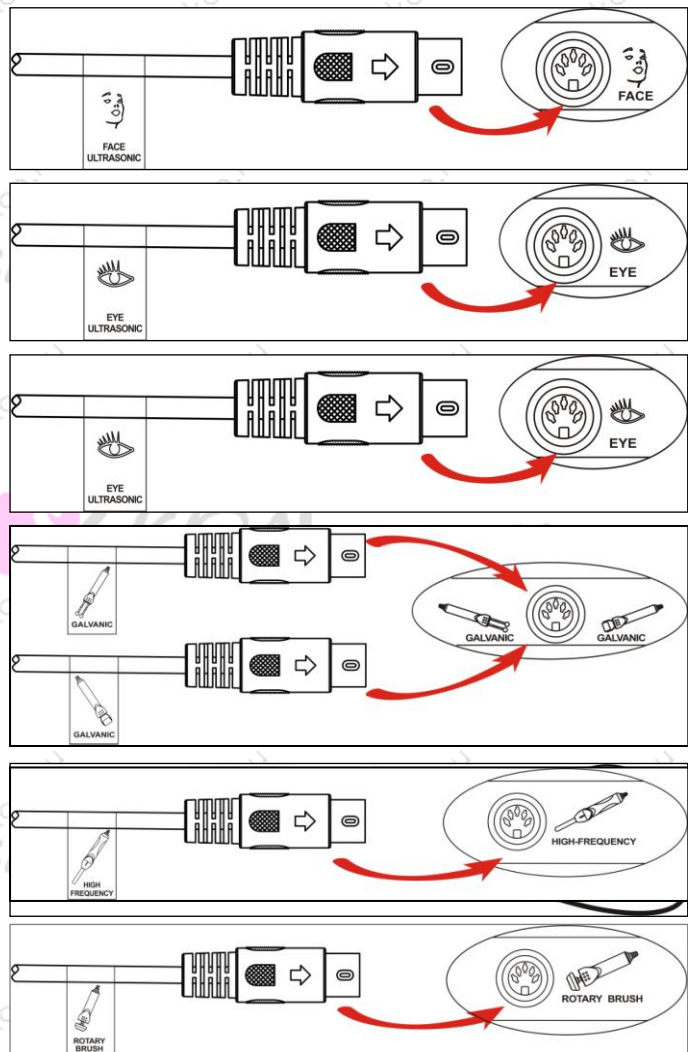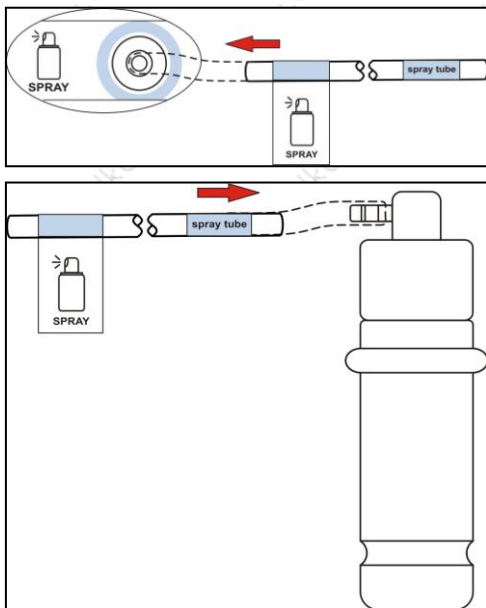

3. A tartozékok csatlakoztatásakor legyen figyelemmel a csatlakozó dugókon és aljzatokon található mechanikai kialakításokra amelyeknek illeszkedniük kell egymásba (ábra).

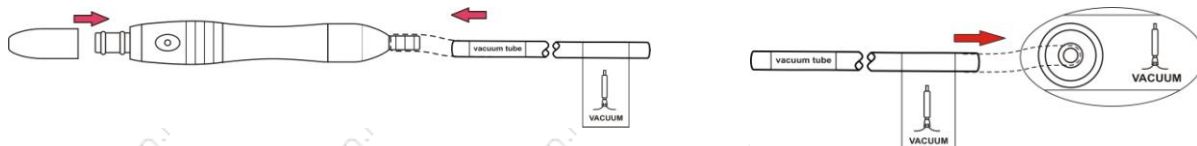

A funkciók használata:

1. A készülék hátulján lévő kapcsolóval kapcsolja be a készüléket, ekkor a lámpa világít.
2. A kezelőpanelen nyomja meg a "POWER" gombot a "POWER" jelzőlámpa világít, ekkor a készülék készenléti állapotban van.
A "HIGH FREQUENCY" funkció lámpa világít. Idő kijelző "15", a teljesítmény kijelző "1"-et mutat. A "START PAUSE" lámpa szünet "II" módot jelez.
3. Idő beállítása: nyomja meg a "▲" és "▼" gombokat az idő beállításhoz 1-30 percig.
4. Teljesítmény beállítás: nyomja meg a "▲" és "▼" gombokat a teljesítmény "ENERGY" beállításához 1-9-ig.
5. A működés indítása és szüneteltetése: nyomja meg a "START PAUSE" gombot, ha a "▶" lámpa világít, a készülék működik, a gomb ismételt megnyomásával a készülék működése szünetel, ekkor a "II" lámpa világít.

•Erősségszabályozó funkció:

Erősségszabályozás: stand-by (készenléti) üzemmódban nyomja meg a "POWER" gombot. Ezzel kikapcsolja a control panel kijelzőit. Nyomja meg a "START PAUSE" gombot 3 másodpercig, így jut el az erősségbeállítás funkcióhoz. A kijelzőn látható "5" szám az alapértelmezett erősséget jelöli. A "▲" gomb segítségével növelni tudja az erősséget, a "▼" gombbal pedig csökkentheti azt. Összesen 9 erősségi fokozat beállítása lehetséges. A beállított erősségi szintet a készülék automatikusan elmenti, miután 5 másodpercig villog, majd visszaáll az aktuális állapotba.

VIO (Nagy Frekvencia) funkció használata:


A készülék Stand-by állapotában nyomja meg a "SELECT FUNCTION" gombot és válassza ki a High-frequency funkciót. A "HIGH FREQUENCY" lámpa világít, ezzel a funkciót kiválasztotta. Ezután nyomja meg a "START PAUSE" gombot, amellyel elindíthatja a kezelést, illetve a kezelés végén megállíthatja a működést.



Közvetlen elektroterápiás kezelés:

1. A kozmetikus fogja a kezében a VIO-fejet úgy, hogy kezével ne érintse meg az üvegillesztéket (lásd az ábrát) és az illeszték ne érintkezzen fémmel. A teljesítmény "ENERGY" minimum szintre legyen beállítva.

2. A kezelés elkezdése: helyezze a vendég bőrére az üvegelektrodát (lásd a képet) és nyomja meg "▶ START PAUSE" gombot, ekkor a lámpa "▶" világít, közben az elektrodát állandóan tartsa mozgásban és lassan növelje a teljesítményt "▲" gombbal olyan szintre, amit a vendége elvisel. Az elektróda fertőtlenítő hatása mellett ionizációs fényt bocsát ki és közben az érintkező felületen vendégének kellemesen melegérzete keletkezik.

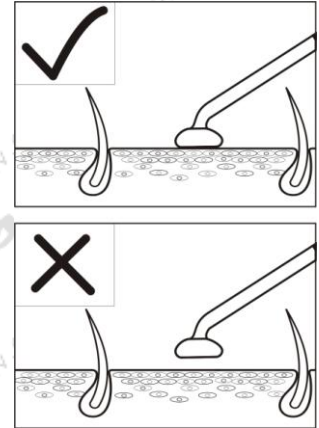

3. A kezelés vége felé "▼" gombbal csökkentse az intenzitást és "▶ START PAUSE" gombot megnyomva leállíthatja a kezelést. Csak ezután bontsa a kapcsolatot az üvegilleszték és vendége bőre között.

Közvetlen elektroterápiás kezelés:


1. Kellemes vibrációs meleg érzet.
2. Serkenti a vérkeringést, javítja a bőr rugalmasságát és tápanyagellátását.
3. Elősegíti a sejtek anyagcseréjét, légzését.
4. Melegítő hatás növeli a sejtek permeabilitását, abszorpciós képességét, fokozza a kezelések hatékonyságát.

Közvetett elektroterápiás kezelés:

A vendég tartsa kezében az egyenes rúd alakú elektrodát. A kozmetikus kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a "▶ START PAUSE" gombot, állítsa be a kívánt intenzitást. A kozmetikus masszírozza vendégét úgy, hogy ő maga ne érintkezzen az elektrodával. A masszírozás befejeztével csökkentse az intenzitást, majd nyomja meg a "▶ START PAUSE" gombot, a lámpa "||" világít, a kezelést ezzel befejezte.

Közvetett elektroterápiás kezelés eredménye:

1. Serkenti a vérkeringést, elősegíti a sejtek anyagcseréjét.
2. Beállítja a tápanyagfelszívódást, baktériumokkal szemben növeli az ellenállóképességet.
3. A masszázs javítja a bőr mélyrétegi tevékenységét.

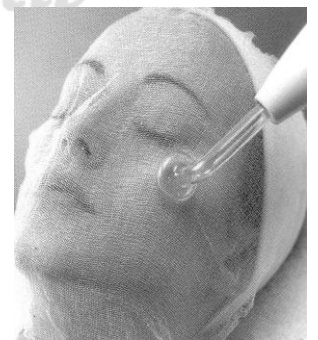

Mire figyeljen VIO (High Frequency) kezeléskor:


1. Kezelés közben a fej ciripelő hangot ad, ez normális.
2. Direkt kezelés során az elektróda kellemetlen érzést válthat ki a bőr közelébe érve. Ezért a legkisebb energiaszint beállításával érintse meg a kezelendő bőrfelületet. Vékony pamuthálával befedheti a vendég arcát. (ld. kép).
3. Az elektródát mindig szorosan kell a bőrhöz illeszteni mert különben szikra keletkezhet ami erősen stimulálja bőrt (áramütéshez hasonló érzet).
4. Arckezelés 6-8 perc, száraz arcbőrön 3-5 perc. Általában a zsíros bőrön nagyobb intenzitást kell használni, mint a száraz bőrön.
5. Az indirekt kezelés során a kozmetikus tartsa egyik kezét a vendég arcán, hogy ne szakadjon meg az áramkör.
6. Az áramütés elekrülése érdekében először a "START PAUSE" gombbal állítsa le a készülék működését, csak ezután érintse az elektródát vendégéhez majd lassan növelje az intenzitást.
7. Az elektróda és a vendége közti kapcsolat bontása előtt az intenzitást állítsa minimumra, majd a "START PAUSE" gomb megnyomásával állítsa le a készülék működését, ekkor a "|||" lámpa világítani fog.
8. A "POWER" gombbal mindig ki kell kapcsolni a készüléket, ha elektródát helyez be illetve távolít el a készülékből.
9. Az üvegelektrodát használat előtt és után mindig fertőtlenítse.
10. Az üveg elektródát tisztítsa tiszta vizes törlőkendővel, olajos, zsíros szennyeződés esetén alkohollal, de mindig csak kikapcsolt állapotban.

•Körkefés peeling

A készüléken stand-by üzemmódban nyomja meg a "SELECT FUNCTION" gombot a kezelés kiválasztásához. Amikor a "ROTARY BRUSH" (körkefe) gomb világít, a készüléken kiválaszthatja a kezelési időt (Time display) és a kívánt kezelés erősségi szintjét (Energy display). Kiválasztható továbbá a körkefe forgási iránya is: a "Direction" gomb megnyomása után a "↻" lámpa az óramutató járásával megegyező irányt mutatja, a "↺" lámpa pedig az ellenkező irányt. A forgási irány megváltoztatásakor a készülék automatikusan megáll. Az újra indításhoz nyomja meg a "START PAUSE" gombot.

Körkefe cseréje:

1. Körkefe eltávolítása: Tartsa az egyik kezében a készülék nyelét, a másik kezével húzza ellenkező irányba a körkefe műanyag részét. Amikor kattano

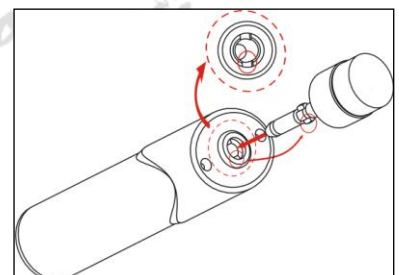

hangot hall, a kefe könnyedén eltávolítható.

2. Körkefe beillesztése: Tartsa egyik kezében a készülék nyelét, a másik kezében a körkefe műanyag részét. Csavarja és nyomja a kefét amíg kattánó hangot nem hall.
3. A körkefe cseréjénél kizárólag a kefe műanyag részét szabad megfogni, különben tönkre teheti a kefét.

Bőrtisztítás, peeling:





1. Tisztítsa le a kezelendő bőrfelületet.
2. Használjon lemosó arctejet vagy gélt a bőrtípusnak megfelelően. A kezelendő bőrfelületnek legmegfelelőbb körkefét illesse a készülék nyeléhez, majd nedvesítse be a körkefét.
3. A teljes tisztítási folyamat alatt tartsa nedvesen a bőrt.

Figyelmeztetések:

1. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a körkefe megfelelően illeszkedik-e a készülék nyeléhez.
2. A körkefe forgási sebességét állítsa minimumra a vendég bőréhez történő érintés előtt, hogy ne okozzon kellemetlen érzést. Csak ezután emelje a sebességet.
3. Peeling és masszázis alkalmával használjon sűrű állagú készítményt és alacsony fokozatra állítsa a készüléket, hogy a kozmetikum ne spricceljen szét.
4. Amennyiben a kezelés során cserélni kívánja a körkefét, állítsa meg a készüléken a peeling műveletet és várja meg, amíg a kefe forgása teljesen leáll.
5. Kérjük, tisztítsa meg és sterilizálja a kefét a kezelés után. Tartsa a keféket száraz helyen.
6. A készülék nyelét ne tisztítsa vízzel, csak törölje át egy kendővel. Száraz helyen tárolja.

Galván funkció beállításai:

Alaphelyzetben nyomja meg a " Function select " gombot és válassza a galván funkciót. A jelző lámpa "**GALVANIC**" világít, így beállíthatóvá válnak a funkció paraméterei.

- 1) Az időzítés beállítása: nyomja meg a " " és " " gombot a munkaidő beállításához 1-30 percig terjedő tartományban.
- 2) Teljesítmény beállítása: nyomja meg a " " és " " gombot a megfelelő kimeneti szint beállításához 1-9 fokozatban.
- 3) A bőr típusának kiválasztása: nyomja meg a "**SKIN**" gombot és válassza ki a bőrtípust. Az "**N**" lámpa világít. Ez azt jelenti, hogy normál, ha a "**S+**"

lámpa világít, akkor érzékeny, ha pedig a "S++" lámpa világít, akkor az extra érzékeny bőrtípus van kiválasztva.

- 4) Az áramirány (polár) kiválasztása: nyomja meg a "+/-" gombot ahhoz, hogy a piros jelzésű elektródára milyen polarizációjú áram kerüljön. Ha a "+" lámpa világít, az azt jelenti, hogy az elektróda kation státuszú, ha "-" lámpa világít, akkor anion státuszú.
- 5) Indítás vagy szüneteltetés: a "START PAUSE" gomb megnyomásával tudja a kezelést elindítani vagy megállítani. A működést a ► lámpa, a szünetet a || lámpa fénye jelzi.

Három IONTOFORÉZIS kezelési mód különböző beállításai

Egy-poláros kezelési módszer:

- (1) Az elektródákat vonja be nedves közvetítő anyaggal (vatta, puha szövet, szivacs stb.).
- (2) Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a "POWER" gombot. Ekkor a teljesítmény szint minimumon van, vendége tartsa kezében az egyik elektródát. Ön helyezze a kezelendő bőrfelületre a másik elektródát és nyomja meg a "START PAUSE" gombot, ekkor a készülék már működésre alkalmas állapotban van. A "+/-" gombbal állítsa be a "+" kation polaritást. A teljesítményt (intenzitást) ▲ - ▼ gombokkal növelje addig, míg vendége enyhe csípést kezd érezni.
- (3) Az elektródát kis felületen mozgassa "Z" alakban kb. 3-5 percig, nagyobb területen ez az idő kitolódik.
- (4) A kezelés szüneteltetéséhez vagy befejezéséhez nyomja meg a "START PAUSE" gombot; ekkor bonthatja a kapcsolatot az elektródák és vendége között. A "POWER" gombbal kapcsolja ki a készüléket.

Bipoláris kezelési eljárás:

Használja a görgős elektródát, ez alkalmas a nagy bőrfelületek kezelésére.

Működési elv: az egyik henger pozitív, míg a másik negatív polaritással bír, egyiket sem kell a vendég kezébe adni. A kozmetikus vonja be a vendég arcát a megfelelő folyékony állagú hatóanyaggal vagy fedje be hatóanyaggal átitatott pamutszálal kendővel. Ezután helyezze el a két elektródát úgy, hogy azok ne érintkezzenek egymással, a kimeneti szint legyen minimumon.

Nyomja meg "START PAUSE" gombot és indítsa el a kezelést. A polaritás kiválasztása a hatóanyag PH értékének megfelelően kell, hogy történjen, ezután állítsa be a kimenő szintet "▲" gombbal addig, amíg a vendég csipkedő érzést tapasztal. A kezelő elektródákat lassan mozgassa. Amennyiben a hatóanyag savas, válassza a pozitív,

ha a hatóanyag lúgos, válassza a negatív beállítást.

Az arc mindkét oldalán elérendő azonos eredmény érdekében váltogassa az elektródákat.

A dupla gömbfejes elektródát használja kis területeken, kis ívű hajlatokban. A kezelés folyamata azonos a hengeres elektródánál alkalmazott móddal.

Tisztító kezelés:

Tisztító kezelés közben a mozgatott elektróda legyen a negatív pólus, míg a vendég kezében lévő elektródára állítsa be a pozitív pólust. Ilyenkor javasolt kifejezetten tisztító hatású készítmény alkalmazása. Javasolt só tartalmú anyaggal átitatott pamutszálal vatta galacsint ráhelyezni a körkörös mozgatott kezelőfejre, vagy vonja be esszenciával átitatott arcmaszkkal a kezelendő bőrfelületet.


Nyomja meg a "+/-" gombot és állítsa be "—" az anion kezelési állapotot. A többi lépés ugyanaz mint a bőrtáplálás esetében.

Megjegyzés a bipoláris iontoforézis kezeléshez:

1. A bipoláris kezelés normál esetben tisztító kezelés után és masszázs előtt esedékes. Az iontoforézis kezelést letisztított, száraz bőrfelületen végezze, hogy ne kerüljön szennyeződés a bőr mélyebb rétegébe.
2. A kezelő elektródát vonja be lágy közvetítő anyaggal (pl: puha szövet) hogy a fémfelület ne érintkezzen a bőrrel, elkerülve így a kellemetlen csipő, szűrő érzést.
3. Kezelés közben a kozmetikus ne érintkezzen az elektróda fémes részével.
4. A kezelés végezhető száraz (vízhiányos) bőrön, idősödő (tápanyaghiányos) és olajos bőrön is. A különböző hatóanyagokat bőrtípustól függően válassza meg, és vegye figyelembe, hogy a zsíros bőr akadályozza a hatóanyag bejutását.
5. Használat után tisztítsa meg a tartozékokat különös tekintettel a fémes részekre és tárolja száraz helyen!
6. Amikor a polaritás pozitívra van állítva, a csípkedő érzés erős lehet, ekkor állítsa negatív polaritásra és így az érzés gyengébb lesz.
7. A kezelés teljes ideje alatt TILOS bármilyen fémes ékszer viselete! Amennyiben vendége bármilyen fém implantátummal rendelkezik testében (pl.: arany fog, stb). a kezelés nem alkalmazható.
8. Érzékeny bőrű klienseknél, sérült bőrfelületen, égett bőrön, hajszálerágatos bőrön és várandós nők esetében TILOS az eljárás alkalmazása!
9. A tápláló oldat pH-ja összhangban kell legyen a görgőre adott pozitív vagy negatív árammal. Amikor a görgő pozitív, a vezető oldat savas kell legyen (+), amikor a görgő negatív, akkor az oldat bázisos, azaz lúgos (-) kell legyen. Ha a használt oldat pH-ja nincs megjelölve, akkor pH teszt papírt használhatunk annak meghatározására.
10. A kezelés során ne érintkezzen közvetlenül a görgő vagy a gömb tartozék fém részeivel. Ha véletlenül mégis megtörténik, a berendezés aktiválja az

automata védelmi rendszert, majd szüntesse meg a kontaktust a bőrrel, a berendezés feloldja a védelmet és folytathatja a kezelést.

11. Az iontoforézis szint kijelzője mutatja a kimeneti energia intenzitását, a kezelőfej és a bőrfelszín közötti áramvezetést. Amikor a kezelőfejnek nincs kontaktusa a bőrrel vagy a bőrfelület száraz, nincs visszajelzés vagy gyenge a visszajelzés. akkor helyére kell igazítani a kezelő fejet és kellő mennyiségű vizes alapú vezető folyadékot kell juttatni a bőrre, hogy hidratáljuk azt.

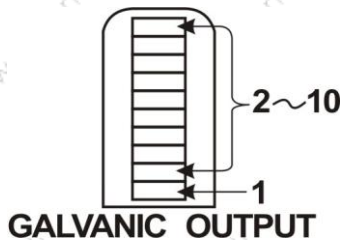

A galvánáram kimeneti minimum és maximum szintje 10 fokozatra van felosztva:

- 1- es szint: a kezelőfej kontaktját jelzi
- 2- 10 szint: a kimeneti áram erősségét jelzi

•Ultrahang funkció beállítása:

Stand-by (készenléti) üzemmódban nyomja meg a "SELECT FUNCTION" gombot az ultrahang funkció kiválasztásához. Amikor az ultrahang funkció kiválasztásra került, az "ULTRASONIC" világít. A készüléken ekkor beállítható az ultrahang erősségi fokozata. Az idő kijelzője 15 percet mutat (TIMER).

Kezelési idő beállítása (TIMER): nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a kívánt kezelési idő beállításához 1-30 perc között.

Ultrahang erősségi fokozat beállítása (ENERGY): nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a kívánt kezelési fokozat beállításához 1-9 között.

Kezelőfej kiválasztása: nyomja meg a "SELECT" gombot. Amikor a "FACE" gomb világít, az arckezelő van kiválasztva. A "BODY" gomb a testkezelőfejet jelenti, az "EYE" a szemkörnyék kezelőfejet.

Ultrahang hullámforma kiválasztása: nyomja meg a "STATE" gombot, hogy kiválaszthassa a kibocsájtott hullám formáját. A "∞" jelző a folyamatos hullámot jelöli, a "⏏" jelző hybrid hullámkibocsájtást, a "⏏" jelző egyenletes hullámkibocsájtást jelent.

Start és stop:: a "START PAUSE" gomb megnyomásával tudja a működést indítani vagy megállítani. Indításkor a "▶" világít, leállítás alkalmával a "||" jelzés gyullad fel.

Figyelmeztetések az Ultrahang üzemeltetéséhez:

1. A kezelőfejeket tartsa tisztán. Használat után minden alkalommal fertőtlenítse azokat.
2. Ultrahanggal a szem nem kezelhető.
3. A bőrtípusnak megfelelő hatóanyag és gél mindig legyen megfelelő mennyiségben a bőrfelületen.
4. A kezelési idő ne legyen több 15 percnél. Kisebb bőrfelületen ennél is rövidebb kezelés elegendő. A kezelőfejet folyamatosan mozgatni kell, nem szabad egy helyen tartani.
5. A legmagasabb energiaszinten történő működtetést csak nagyon rövid ideig szabad alkalmazni, mert bőrsérülést okozhat.

•Vákuum és spray funkciók beállítása:

Készenléti helyzetben nyomja meg a Select gombot és válassza ki a Vákuum-Spray funkciót.

A **VAC-SPRAY** lámpa világít. az Időzítés kijelző "15"; a Teljesítmény szint "1"; a **START PAUSE** szünet lámpa **II** világít.

A beállításuk után nyomja meg a **START PAUSE** start gombot, ekkor a készülék használatra kész.

A vákuum funkció használatakor a szívóerő beállítását az intenzitás szabályozó gombokkal illetve a készülék oldalán lévő szabályozó gombbal együtt összehangoltan tudja elvégezni (oldalsó szabályozó csak a H-4502D típusnál található meg).

Vákuum és spray funkciók működése:

Spray funkció:

Először ellenőrizze, hogy a hajlékony cső megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez és a flakonhoz (lásd az ábrát); kapcsolja be a készüléket, állítsa be a teljesítményt és indítsa el a működést.




Működés közben mutató ujját helyezze a flakon tetején található nyílásra, ekkor a folyadék permet formájában távozik a tartályból. A két tartályban különböző folyadékot tarthat, ezt váltogathatja igény szerint. A permetezés befejezése után állítsa le a készüléket (pause).

Permetezés során vigyázzon arra, hogy a permet ne kerüljön vendége szemébe, orrába, szájába.

Permetezés után a fel nem szívódott permetet törölje le puha anyaggal.

Vákuum funkció:

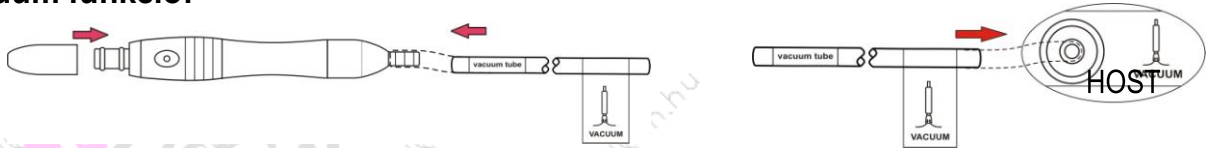

Először ellenőrizze, hogy a hajlékony cső megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a vákuumozó markolathoz (lásd az ábrát). A kiválasztott átlátszó illesztékbe tegye be a szivacs szűrőt és helyezze azt a markolatra. Állítsa be a szívóerőt, az időzítést és indítsa a kezelést.

Fogja kezében a vákuumozó markolatot mint egy tollat, érintse vendége bőréhez. Ekkor a szívóerő hatására felszívja a bőrt. A szívóerőt állíthatja a készüléken a teljesítmény szabályozóval illetve a markolaton lévő nyílásra helyezett mutató ujjával is.

A kezelendő bőrfelületeknek megfelelően három különböző illesztéket használhat.

Megjegyzés a vákuum, spray funkció működtetéséhez:

1. Gondosan ellenőrizze, hogy a tartozékok az ábra szerint legyenek csatlakoztatva.
2. A működést szüneteltesse amikor tartályt vagy vákuumozó illesztéket cserél.
3. A funkciók működése közben a csövet ne törje meg, mert ezzel elzárja a levegő útját és kárt okozhat a készülékben.
4. A repedés vagy törés csökkenti a hatékonyságot. A szilikon gumicső repedése esetén vágja le a hibás szakaszt.
5. A szívóerőt mindig saját magán állítsa be, nehogy véraláfutást okozzon vendégének.
6. Ne permetezzen vendége orrába, fülébe, szemébe, stb.
7. A spray tartályba csak jól porlasztható, kellően híg folyadékot töltsön.
8. A vákuum illesztékeket használat után mindig tisztítsa meg, törölje szárazra, használat előtt sterilizálja.
9. A szűrő szivacsot cserélje ki minden használat előtt. Szivacsoszűrő nélkül ne használja a készüléket, mert dugulást és meghibásodást okozhat.
10. A spray üveget desztillált vagy tisztított vízzel tisztítsa ki, törölje szárazra majd sterilizálja.
11. A vákuum kezelés során figyelni kell a következőkre:

A bőrfelületet alaposan meg kell tisztítani a kezelés előtt. A vákuum szívó erősségét a kozmetikus magán próbálja ki, mert véraláfutást okozhat a túl erős szívóerő. A kezelőfejet mozgatni kell, egy helyen nem ajánlott hosszán tartani.

A szemén és környékén tilos alkalmazni, valamint gyulladt bőrfelületen is.

•Figyelmeztetés

Vió használata:


1. A készülék használata során ne viseljen fém tárgyat, ékszereit vegye le.
2. Tilos használni a funkciót érzékeny bőrű, rozáceás, sérült bőrfelületű, várandós vendégeken, továbbá olyan személyeken, akik testükben beépített eszközt viselnek pl. pacemaker.
3. Etanol tartalmú készítmény nem használható, csak a vió kezelés után.
4. Szemen és közvetlen környékén nem alkalmazható.
5. Az illesztékeket az előírásnak megfelelően kell összeilleszteni.
6. Ezt a funkciót csak szakképzett kozmetikus használhatja. Tartsa távol más elektronikus berendezésektől. Körültekintően használja a készüléket!

Körkefés peeling:

1. Ne használja egyszerre sok ideig, mert a nyél túlzottan felmelegedhet.
2. Működés közben ne cseréljen kefét.
3. Csak gyári kefét használjon.
4. Megkeményedett körkefét ne használjon, mert bőrsérülést okozhat!

Mire figyeljen amikor IONTOFORÉZIS kezelést végez:

1. Ne alkalmazza ezt a funkciót szív, fertőző, és neurotikus betegségben szenvedők esetében.
2. A kezelő elektródákat ne érintse össze hosszú ideig.
3. Ha az alkalmazott kozmetikum a bőrben felszívódott, azt időben pótolja, a bőrt tartsa mindig nedvesen.
4. Figyeljen arra, hogy a hengeres kezelőfej a bőrön ne csússzon, hanem gördüljön.
5. A spray funkció használatával biztosíthatja a folyamatos nedves felületet.
6. Ne használja a kezelőfejeket, ha azok felülete sérült, rozsdás vagy kopott.

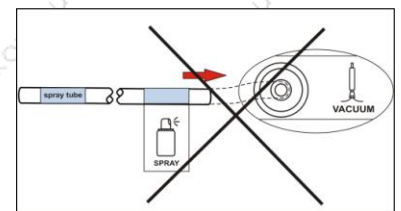


Mire figyeljen az ultrahang kezelés során:

1. Mindig kapcsolja ki a készüléket használat után. Ellenkező esetben a kezelőfej felforrósodhat és a készülék élettartama csökkenhet.
2. Ne próbálja meg a kezelőfejet a nyélről leválasztani.
3. Tilos a kezelőfejet vízbe mártani.
4. Sérült kezelőfejet tilos használni: ki kell cserélni.

Mire figyeljen a VÁKUUM és Spray funkció használatakor:

1. A hajlékony csöveket óvatosan válassza le a tartályról illetve a vákuum kezelőfejről, ne nyújtsa, ne feszítse.
2. A tartályba ne töltsön maró hatású folyadékot.
3. A vákuum kézi markolatot és a spray tartályt ne cserélje fel a csatlakoztatáskor, mert ekkor a készülék szivattyúja felszippantja a folyadékot a tartályból. Ez a művelet súlyosan károsítja a készüléket. (tekintsen az ábrákra)
4. Tilos a törött, repedt vákuum illesztékek használata, mert azzal komoly sérülést okozhat vendégének.

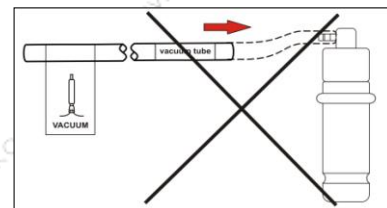

Fontos figyelmeztetés:

1. Tilos munka közben a tartozékok csatlakozását megbontani!
2. Törött, sérült hálózati kábelt új, az eredetivel megegyező gyári kábelre kell cserélni.
3. Működési rendellenesség esetén a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózati dugót ki kell húzni.
4. Tilos a készüléket kinyitni, a javítását csak az arra kijelölt szakszerviz végezheti!
5. Tilos használni erősen párás környezetben, pl. fürdőszobában!
6. Tilos használni tűz- és robbanásveszélyes helyiségben vagy ilyen anyagok közelében!

•Napi karbantartás

1. A tartozékok hajlékony kábeleit feleslegesen ne hajtogassa össze.
2. Használat után a tartozékokat fertőtlenítse, törölje szárazra, tartsa tiszta, száraz helyen.
3. A készüléket áramtalanítsa és tisztítsa enyhén nedves kendővel majd törölje szárazra.
4. A készüléket és tartozékait soha ne tisztítsa oldószerrel.
5. A készüléket a nap végén főkapcsolójával áramtalanítsa.
6. Ne tegye ki erős napsugárzásnak vagy hőhatásnak a készüléket.

•Hibaellenőrzés:

	Probléma	Lehetséges ok	Javasolt ellenőrzés	Tennivaló
1	A készüléket bekapcsolta, de a "POWER" gomb nem működik.	A készülék nem bekapcsol be.	1. A villamosenergia ellátást ellenőrizze. 2. Nézze meg, hogy jól illeszkedik-e a konnektorba a dugó.	1. Ha szükséges, cseréltesse ki a rossz konnektort. 2. Ismételden dugja be a konnektorba a dugót.
2	A készülék bekapcsolásakor a lámpa világít, azonban a készülék mozgatható állapotban a lámpa felvillan és a készülék nem működik rendeltetésszerűen.	Nem megfelelő az érintkezés.	1. Ellenőrizze a kábel megfelelő csatlakoztatását az aljzathoz. 2. Nincs-e megtörve a vezeték.	1. Csatlakoztassa újra a kábelt a készülékhez. 2. Kábelcserét szakszervizben végeztessen.
3	A készülék bekapcsolt állapotában a nyél ciripelő hangot ad. Az energiaszint megnövelésével nem működik az üveg illeszték.	Az üveg illeszték eltört.	Kapcsolja be a gépet és emelje az energiaszintet. Ha az üveg illeszték gyengén vagy egyáltalán nem világít, akkor el van törve, vagy nem illeszkedik eléggé szorosan a nyélbe.	Az üveg illesztéket ki kell cserélni, amennyiben törött vagy nem illeszkedik elég szorosan a nyélbe.
4	A készülék bekapcsolt állapotában a Galván lámpa ("Galvanic work output indicator light") nem világít.	1. A bőrfelület nem elég nedves, ezáltal a két elektróda között nincs kapcsolat. 2. A készülék és az elektródák csatlakozója kilazult. 3. Megtört a vezeték.	1. Ellenőrizze az elektródákat nedves vattával: ha létrejön az áramlás, a "Galvanic work output indicator light" lámpa világít. 2. Ellenőrizze, hogy az elektródák jól csatlakoznak-e a készülékhez. 3. Ellenőrizze a kábelt.	1. Tegyen több folyadékot a bőrfelületre. 2. Illessze újra a készülékhez a kezelőfejeket. 3. Cseréltesse ki a megtört vezetéket szakszervizben.
5	A bekapcsolt készüléken vagy csak a spray funkció működik, vagy csak a vákuum.	A vákuum és a spray csöve megtört.	1. Szerelje le a csövet, hogy ellenőrizhesse a készülék szívóerejét. 2. Ellenőrizze, hogy a cső nem törött-e.	1. Ha nem működik egyik funkció sem, akkor a vákuum pumpa romlott el. Ezt szakszervizben cseréltheti ki. 2. Ha a flexibilis cső törött, ollóval le lehet vágni a sérült részt. Szükség esetén a teljes cső cserélhető.
6	A készülék bekapcsol. A vákuum funkció bekapcsolásakor nincs	A vákuum és a spray ellentétesen lett a készülékhez illesztve.	Ellenőrizze a vákuum és a spray csöveket, hogy a megfelelő helyre vannak-e illesztve.	Amennyiben rossz helyre csatlakoztatta a csöveket, cserélje

	szívóerő, a spray funkcionál nem történik kiáramlás.			meg azokat.
7	A gép bekapcsol, a körkefe mégsem működik.	A kábel nincs jól bedugva vagy eltört.	1. Ellenőrizze, hogy van-e érintkezés, jól van-e bedugva a kábel 2. a körkefés nyél kábele nem tört-e meg.	1. Csatlakoztassa újra a kábelt a készülékhez. 2. Kábelt cserélt szakszervizben végeztesse.
8	Körkefe meglazult	Nem jól illeszkedik a kefe	Ellenőrizze, hogy a kefét helyesen illesztette-e a nyélbe.	Húzza ki a dugót a konnektorból majd tegye vissza. Ha így sem működik, vigye szakszervizbe a készüléket.

•Biztosíték cseréje:

A készülékből húzza ki a hálózati vezeték.


Csavarhúzóval csavarja ki a biztosítékfoglat fedelét.

Ellenőrizze, hogy a foglatban nem maradt-e benne az üvegcső alakú biztosíték.

A hibás biztosítékot cserélje az eredetivel azonos értékű (250V 4A) újra.

Ábra: 1. Hálózati csatlakozó aljzata 2. Üveg biztosíték 3.

Biztosíték fedél

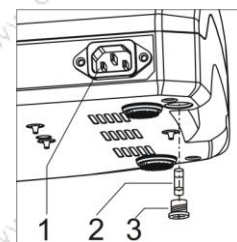

Mikrodermabráziós funkció (gyémántfejes bőrcsiszoló):

A gyémántfejes mikrodermabráziós kezeléshez a vákuum funkció kezelőszerveivel kell elvégezni a beállításokat.

Vegye le a vákuum kezelőfejét a vákuum szívócsővéről, majd a csövet csatlakoztassa a csiszolókészlet valamely markolatára.

A használni kívánt csiszolófejbe helyezzen 1db a készletben található tömítő gumigyűrűt, majd 1db szűrőlapkát és csavarja rá a markolatra.

Válassza ki a spray/vakuum funkciót, a start/stop gombbal indítsa el a kezelést.

A 32-es számú szabályozógombbal állítsa be a megfelelő szívóerőt.

A csiszolókészletben 3db markolat található, ezeket célszerű a leggyakrabban használatos fejekkel összerelve tartani, hogy mielőbb használatra készen legyenek.

A gyémántfejeket kezelés előtt és után minden alkalommal fertőtlenítsen!

Forgalmazza: **ELKON cosmetic Kft.**

H-2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu

Tel: [+36-28-472129](tel:+36-28-472129)

Mobil: [+36-70-9492198](tel:+36-70-9492198)