

Tű nélküli mezoterápiás készülék ND-9090

Használati utasítás



Forgalmazza:
ELKONcosmetic Kft.
H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.
Telefon: +36-28-472129
www.elkon.hu
elkon@elkon.hu

Bevezető

A tű nélküli mezoterápiás kezelés egy non-invazív eljárás, melynek során a hagyományos tűs mezoterápiával ellentétben semmilyen fájdalmas beavatkozás nem történik. A kezelés az elektroporáció és elektrooszmózis elvén megy végbe. Célja a bőr mélyebb rétegeiben elhelyezkedő sejtek táplálása, az anyagcsere fokozása. Segítségével a ráncok mélysége csökkenthető, javul a vérkeringés, a testkezelések során látványos eredmény érhető el a zsírbontás és cellulit kezelés területén.

Előnyök:

- a kezelés során bevihetők a bőrbe ionos, nem ionos, hidrofil és lipofil anyagok, makromolekulák
- nincs szükség kontakt géltre
- fájdalommentes, non-invazív eljárás
- kúraszerűen alkalmazva tartós hatás érhető el
- mikrodermabrázióval kombinálva a hatás még tovább fokozható

Javasolt arc kezelések:

- hidratálás
- mimikai ráncok
- hiper-pigmentáció
- akne megelőzése
- feszesítés

Javasolt test kezelések:

- testfeszesítés
- alakformálás
- helyi zsírbontás
- narancsbőr kezelése

Ellenjavallatok:


- terhesség
- bőrrák
- epilepszia
- szívritmus szabályozó
- herpesz
- diabétesz
- ekcéma
- bőrgyulladás
- lázas állapot
- vírusos fertőzés
- nyílt seb
- allergia
- botox: a kezelést követő 30 napon belül nem alkalmazható, a kezelt területen soha nem alkalmazható
- műtéti beavatkozás után 40 napig nem kezelhető

Figyelmeztetés:

A készülék forgalmazója nem vállal felelősséget az alábbiakban leírt útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó károkért:

1. A használati utasításban leírtaktól eltérően tilos használni a készüléket. Minden javítást szakszervizben kell végeztetni!
2. Ne használja a készüléket nedves kézzel, vízcsap közvetlen közelében.
3. Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és forduljon szakszervizhez, amennyiben a készülék vizes lett, leesett, eltört, a kábel megtört, vagy a normálistól eltérő hangot ad.
4. Használat után húzza ki a hálózati kábelt az áramforrásból
5. Sima felületen tárolja a készüléket, távol hőforrástól.
6. Ne tisztítsa a készüléket illékony anyagokkal (hígító, benzin, oldószerek).
7. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék csatlakozóiba.

A készülék bemutatása:

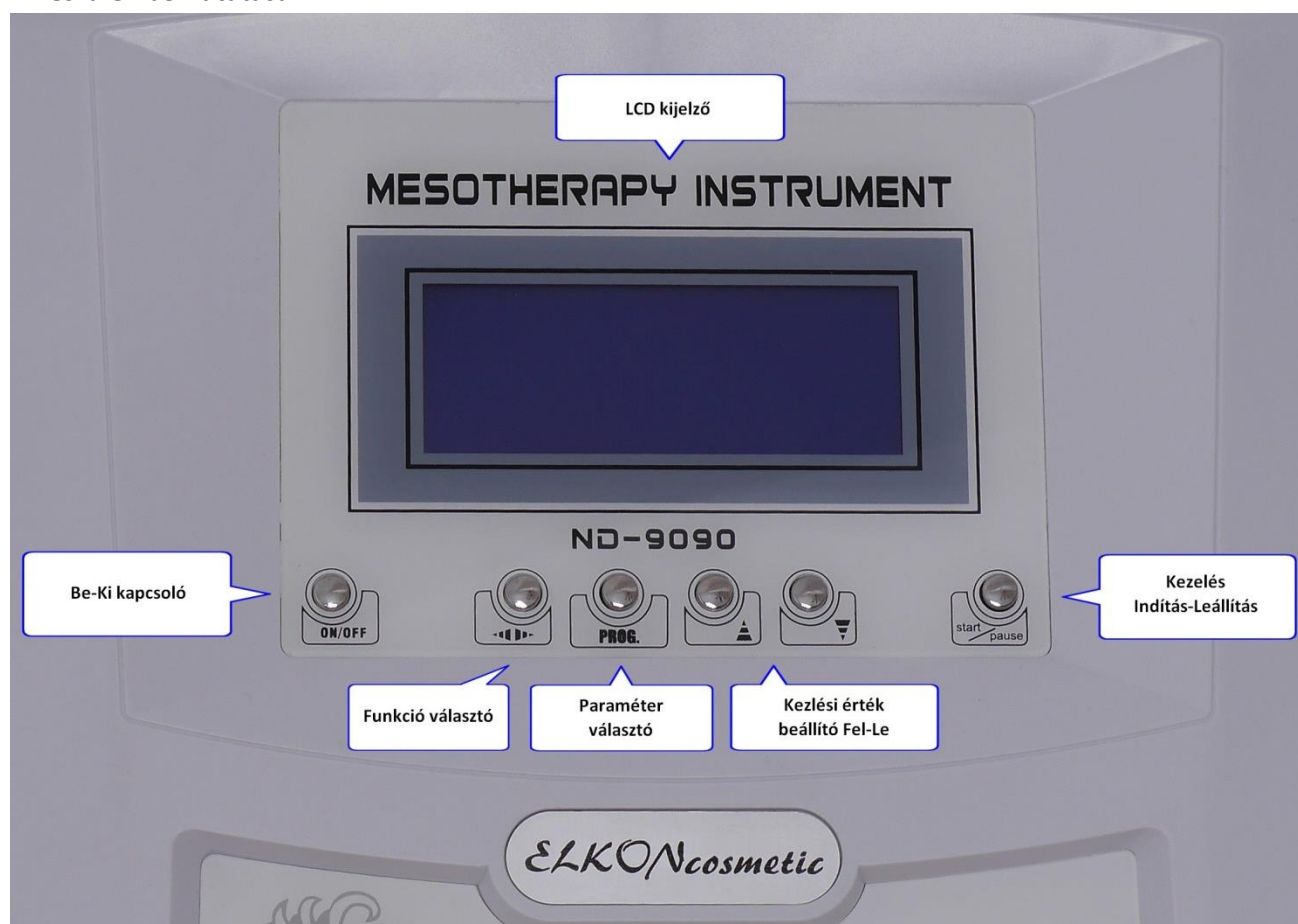



Mezoterápiás kezelés menete:

A készülék használatához kozmetikus, elektrokozmetikus végzettség szükséges!

1. Csatlakoztassa az AC csatlakozó kábelét a készülékhez és az elektromos hálózathoz. Kapcsolja be a készüléket a hátulján található főkapcsoló gomb segítségével, majd nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék bekapcsolása után a kijelző világít.

Válassza ki a használni kívánt kezelőfejet a 12. gomb segítségével. A 14. PROG program kiválasztó gomb segítségével választhatja ki a kezelési módot.

Állítható paraméterek:

- Teljesítmény (Intensity)
- Kezelési idő (Time)
- Frekvencia a hatóanyag sűrűségétől függően változtatható az alábbiak szerint:

10 Hz híg ampullák esetén

20 Hz sűrűbb ampullák esetén

Egyszerre csak egy kezelőfejjel lehet kezelést végezni.

2. Tisztítsa meg a kezelendő bőrt sminktől, szennyeződésektől a bőrtípusnak megfelelő arctejjrel
3. Peeling / mikrodermabrázió / hidroabrázió segítségével távolítsa el az elhalt hámsejteket
4. Bőrfertőtlenítővel törölje át a vendég bőrét.
5. A kezelőfejet fertőtlenítse eszközfertőtlenítővel.
6. Gumikesztyű viselése ajánlott a kezelés alatt.
7. Készítsen a bőrtípusnak megfelelő hatóanyag koktélt, vagy használjon előre gyártott koktél ampullát.
A kezeléshez kizárólag orvosi tisztaságú hatóanyagok használhatók!!!
8. A kívánt kezelési frekvencia és idő beállítása után lassú, körkörös mozdulatokkal haladjon a kezelendő bőrfelületen a hatóanyagok teljes felszívódásáig. A frekvencia a kezelés alatt fokozatosan növelhető. Ajánlott kezelési idő 15-20 perc.
9. A kezelés végén simító mozdulatokkal zárjuk le a mezoterápiás kezelést. Masszázs, smink nem ajánlott!

Ultrahang kezelés menete

Az ultrahang hatására nő a szöveti hőmérséklet, az erek kitágulnak, ezáltal felgyorsul a sejtek anyagcseréje, megnő a hatóanyag felvevő képesség.

1. Csatlakoztassa a készülékhez az ultrahang kezelőfejet az előzőekben leírt módon.
2. Tisztítsa meg a kezelendő bőrt sminktől, szennyeződésektől a bőrtípusnak megfelelő arctejjrel, tonikkal
3. Peeling / mikrodermabrázió / hidroabrázió segítségével távolítsa el az elhalt hámsejteket
4. Vigye fel a kívánt hatóanyagot a bőrfelületre. Használjon kontakt gélt.
5. Lassú, körkörös mozdulatokkal mozgassa a kezelőfejet a bőrön.
6. Az arckezelés ne tartson tovább alkalmanként 8-12 percnél.

Tilos használni a készüléket:

- szem körül, fül előtt
- szív, halánték, mellék felett
- csontos területeken
- pacemaker esetén
- daganatos betegeken
- sebek, herpesz esetén
- allergiás állapotban
- láz, terhesség, keringési rendellenességek esetén
- visszértágulatok felett

Hideg vasalás alkalmazása:

A krioterápia kiválóan alkalmazható tisztítás után, dermaroller, mikrodermabráziós kezelés után, mert nyugtató, összehúzó hatású. Megszünteti bőrpírt, csökkenti a kellemetlen égő érzést. Alkalmazható gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrön is, valamint visszértágulásra hajlamos bőr kezelésére.

1. Csatlakoztassa a készülékhez a kezelőfejet az előzőekben leírt módon.
2. Végezzen lassú, körkörös mozdulatokat a kezelendő bőrfelületen.
3. Soha ne tartsa mozdulatlanul egy helyen a működő kezelőfejet!
4. A kezelés alatt a teljesítményt fokozatosan emelheti.
5. A kezelés végére a bőrpír láthatóan csökken, vagy megszűnik.

Karbantartás

A készülék optimális működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a külső alkatrészeket, tisztítsa és fertőtlenítsa a kezelőfejeket. Ellenőrizze hálózati kábel és a csatlakozások épségét.

Javítást kizárólag szakszervizben végeztessen!

A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózathoz. Víz vagy más nedves anyag nem kerülhet a készülékbe! Ne használjon mosószert, oldószert vagy más súroló anyagot. Kímélő tisztítószerrel enyhén átitatott tisztító párnával vagy vattával törölje át a készülék külső borítását. A kezelőfejeket minden kezelés előtt és után tisztítsa meg és fertőtlenítsa eszközfertőtlenítővel. A tisztítás előtt csatlakoztassa le a kezelőfejeket a készülékről. (pl. Barricidal orvosi eszközfertőtlenítő)

Hibaelhárítás

Hiba leírása

A készülék főkapcsolója
bekapcsoláskor nem világít

Lehetséges okok

Hálózati kábel hibás
Biztosíték hibás

Elhárítás

Cserélje ki a kábelt
Cserélje ki a biztosítékot

A készülék főkapcsolója zölden
világít, a kijelző mégsem működik

Készülék hiba

Keresse fel a szakszervízt

Kezelőfej nem működik

Teljesítmény szint alacsony
Hibás kezelőfej

Emelje fel a teljesítmény szintet
Keresse fel a szakszervízt

Technikai paraméterek

Hálózati feszültség: 220 AC váltóáram

Fázisok száma: 1 fázis

Frekvencia: 50-60 Hz

Áramfogyasztás: 60 Watt

Biztosíték: T1A-250V