

**DIY-111 TŰ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK
ARCRA ÉS TESTRE
Használati utasítás**



Forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Telefon: +36-28-472129

www.elkon.hu

elkon@elkon.hu

Bevezető

A tű nélküli mezoterápiás kezelés egy non-invazív eljárás, melynek során a hagyományos tűs mezoterápiával ellentétben semmilyen fájdalmas beavatkozás nem történik. A kezelés az elektroporáció és elektroozmózis elvén megy végbe. Célja a bőr mélyebb rétegeiben elhelyezkedő sejtek táplálása, az anyagcsere fokozása. Segítségével a ráncok mélysége csökkenthető, javul a vérkeringés, a testkezelések során látványos eredmény érhető el a zsírbontás és cellulit kezelés területén.

Előnyök:

- a kezelés során bevihetők a bőrbe ionos, nem ionos, hidrofil és lipofil anyagok, makromolekulák
- nincs szükség kontakt géltre
- fájdalommentes, non-invazív eljárás
- kúraszerűen alkalmazva tartós hatás érhető el
- mikrodermabrázióval kombinálva a hatás még tovább fokozható

Javasolt arc kezelések:

- hidratálás
- mimikai ráncok
- hiper-pigmentáció
- akne megelőzése
- feszesítés

Javasolt test kezelések:

- testfeszesítés
- alakformálás
- helyi zsírbontás
- narancsbőr kezelése

Ellenjavallatok:

- terhesség
- bőrrák
- epilepszia
- szívritmus szabályozó
- herpesz
- diabétesz
- ekcéma
- bőrgyulladás
- lázas állapot
- vírusos fertőzés
- nyílt seb
- allergia
- botox: a kezelést követő 30 napon belül nem alkalmazható, a kezelt területen soha nem alkalmazható
- műtéti beavatkozás után 40 napig nem kezelhető

Figyelmeztetés:

A készülék forgalmazója nem vállal felelősséget az alábbiakban leírt útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó károkért:

1. A használati utasításban leírtaktól eltérően tilos használni a készüléket. Minden javítást szakszervizben kell végeztetni!
2. Ne használja a készüléket nedves kézzel, vízcsep közvetlen közelében.
3. Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és forduljon szakszervizhez, amennyiben a készülék vizes lett, leesett, eltörtött, a kábel megtört, vagy a normálistól eltérő hangot ad.
4. Használat után húzza ki a hálózati kábelt az áramforrásból
5. Sima felületen tárolja a készüléket, távol hőforrástól.
6. Ne tisztítsa a készüléket illékony anyagokkal (hígító, benzin, oldószerek).
7. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék csatlakozóiba.

A készülék bemutatása:



Ki/Be
kapcsoló

Program
választó

LCD
kijelző

Kezelőfej
testre

Kezelőfej
arcra



Kezelő fej arcra



Kezelő fej testre

Mezoterápiás kezelés menete:

A készülék használatához kozmetikus, elektrokozmetikus végzettség szükséges!

1. Csatlakoztassa az AC csatlakozó kábelét a készülékhez és az elektromos hálózathoz. Kapcsolja be a készüléket a főkapcsoló gomb segítségével. A készülék bekapcsolása után a kijelző világít.

Válassza ki a használni kívánt kezelőfejet a „PROG” gomb segítségével. A „ PROG” program kiválasztó gomb segítségével választhatja ki a kezelési módot.

Állítható paraméterek:

- Teljesítmény (Intensity):

LEVEL = teljesítményszint

Nagy (test-arc) kezelőfej esetén 01-gyei kezdjük, és lassan emeljük, addig, amíg a vendégnek kellemes. Kis kezelőfej (ránc-arc) esetén 05-tel kezdjük, és lassan emeljük, addig, amíg a vendégnek kellemes.

- Kezelési idő (Time):

TIME = kezelési idő beállítás (0-60 percig)

- Frekvencia (Mode):

MODE = frekvencia állítása hatóanyag sűrűség szerint.

A MODE lehetőségénél a bevinni kívánt hatóanyag sűrűségéhez választhatunk kezelési módot.

MODE 1 - híg anyagok esetén,

MODE 2 - épphogy folyékony anyagok esetén

MODE 3 - könnyen kenhető anyagok esetén (csak kis teljesítmény mellett)

MODE 4 - sűrű krém állagú hatóanyagok esetén (csak kis teljesítmény mellett)

Egyszerre csak egy kezelőfejjel lehet kezelést végezni.

2. Tisztítsa meg a kezelendő bőrt sminktől, szennyeződésektől a bőrtípusnak megfelelő arctejjrel
3. Peeling / mikrodermabrázió / hidroabrázió segítségével távolítsa el az elhalt hámsejteket
4. Bőrfertőtlenítővel törölje át a vendég bőrét.
5. A kezelőfejet fertőtlenítse eszközfertőtlenítővel.
6. Gumikesztyű viselése ajánlott a kezelés alatt.
7. Készítsen a bőrtípusnak megfelelő hatóanyag koktélt, vagy használjon előre gyártott koktél ampullát.
A kezeléshez kizárólag orvosi tisztaságú hatóanyagok használhatók!!!
8. A kívánt kezelési frekvencia és idő beállítása után lassú, körkörös mozdulatokkal haladjon a kezelendő bőrfelületen a hatóanyagok teljes felszívódásáig. A frekvencia a kezelés alatt fokozatosan növelhető. Ajánlott kezelési idő 15-20 perc.
9. A kezelés végén simító mozdulatokkal zárjuk le a mezoterápiás kezelést. Masszázs, smink nem ajánlott!

Tilos használni a készüléket:

- szem körül, fül előtt
- szív, halánték, mellék felett
- csontos területeken
- pacemaker esetén
- daganatos betegeken
- sebek, herpesz esetén
- allergiás állapotban
- láz, terhesség, keringési rendellenességek esetén
- visszértágulatok felett

Karbantartás

A készülék optimális működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a külső alkatrészeket, tisztítsa és fertőtlenítse a kezelőfejeket. Ellenőrizze hálózati kábel és a csatlakozások épségét.

Javítást kizárólag szakszervizben végeztesen!

A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatból. Víz vagy más nedves anyag nem kerülhet a készülékbe! Ne használjon mosószert, oldószert vagy más súroló anyagot. Kímélő tisztítószerrel enyhén átitatott tisztító párnával vagy vattával törölje át a készülék külső borítását. A kezelőfejeket minden kezelés előtt és után tisztítsa meg és fertőtlenítse eszközfertőtlenítővel. A tisztítás előtt csatlakoztassa le a kezelőfejeket a készülékről. (pl. Barricidal orvosi eszközfertőtlenítő)

Technikai paraméterek

Hálózati feszültség: 220 AC váltóáram

Fázisok száma: 1 fázis

Frekvencia: 50-60 Hz

Áramfogyasztás: 10 Watt

Biztosíték: T1A-250V

Forgalmazza: *ELKON cosmetic Kft.*

H-2143Kistarcsa, Szabadság út 54.

Web: www.elkon.hu Email: elkon@elkon.hu

Tel.: +36-28-472129 Mobil: +36-70-9492198

ELKON cosmetic Kft.