

SC-368 Digitális PlazmaPen bőrfeszítő, bőrmegújító készülék

Használati utasítás



Forgalmazza:
ELKONcosmetic Kft.
H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.
Telefon: +36-28-472129
www.elkon.hu
elkon@elkon.hu

A PlazmaPen ráncatlanítás egy új professzionális eljárás a kozmetikai kezeléseknél, amivel akár kihagyhatjuk a plasztikai műtéteket.

Ezzel az egyedülálló technológiával azonnal akár egyetlen kezelés után látványosan feszes lesz a szemhéjon a bőr. A plazma egy ionizált gáz, ami ionokból és elektronokból áll. Az elektromos plazma kisülések elégetik, elpárologtatják a bőr felszínét.

A kezelés alatt a készülékkel csak minimálisan érintjük a bőr felületéhez, aminek következtében létrejön az ivkisülés. Az elektromos kisülésekkel amit a kezelés alatt a bőr felületén ejtünk, valójában a fibroblastokat stimuláljuk, serkentjük a kollagén és elasztin termelését, a kötőszöveti és a bőrsejtek szaporodnak, látványosan feszül a bőr és rugalmasabb lesz. A teljes gyógyulás után a bőr feszebb lesz, a megereszkedett részek akár az első kezelés után kifeszülnek. Ez bőrtípustól, szemhéjtípustól függ.

A kezeléseket megismételhetjük. De már 1 alkalom után is jelentős változás látható. Két kezelés között 1 hónapot mindenképpen várni kell.

A kezelés menete:

Mivel a kezelés nem teljesen fájdalommentes, a letisztított, lefertőtlenített bőrfelületet egy fájdalomcsillapító krémmel bekenjük.

A megfelelő hatóidő (kb. 20p) után kontakt gélt viszünk fel a bőrfelületre.

Megtörténik a kezelés, a kezelt helyen kis pörkök keletkeznek. A pörkök kb. 5-7 nap múlva heg nélkül leválnak.

A kezelés után bőrpír, duzzanat, kipirulás és fájdalom jelentkezhet a kezelt területen.

Ez személyenként változó lehet. Ezek csak átmeneti enyhe fájdalmak, ami rövid időn belül elmúlik.

A száraz sebgyógyulás előnyös. A seb 5-8 nap után leesik. Ne kaparja, mert különben elfertőzhet és hegvesedéshez is vezethet.

Milyen területeken alkalmazható a PlazmaPen kezelés:

Szemhéj

Száj és ajak vonalak

Szarkalábak

Ráncok a fül körül

Nyak

Pigmentfoltok

Tetoválás halványítás

Használat:

Pigment foltok

Hozzáérve a pigment foltokhoz, enyhén előre-hátra mozgassuk a készüléket.

Amennyiben a pigmentáció mélyebben és nagyobb területen helyezkedik el, 2-3 alkalommal szükséges megismételni a kezelést. Fel kell hívni a kezelő figyelmét, hogy az elektromos akupunktúrás kezelés során támassza meg a kezelt testrészt, mert az elmozdulás hegvesedést, égési sérülést okozhat, mellyel befolyásolhatja a sebgyógyulást.

Szemölcsök

Szemölcs kezelésekor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a gyökere mélyen a subcutan szövetben lehet, ezeket kis négyzetekben a legjobb eltávolítani. Lehetőleg el kell kerülni a gyulladás kialakulását, ezért megfelelő ápoló krém használata javasolt.

Tetoválás eltávolítása

A kezelés menete hasonló a pigment foltokéhoz, de mivel kiterjedésük nagyobb, hosszabb időt vesz igénybe.

Amennyiben a kezelt terület 3cm-nél nagyobb, mindig több alkalommal szükséges végezni a kezelést, sohasem egyszer. Ellenkező esetben baktériumos felülfertőződés történhet beláthatatlan következményekkel. A kozmetikus és vendég részéről is nagy körültekintés szükséges. Nagymértékű gyulladás esetén azonnali kórházi kezelés válhat szükségessé.

Ellenjavallatok a PazmaPen kezelésnél:

Terhesség, szoptatás

Aktív gyulladás a kezelni kívánt területen

Bőrelváltozások

Epilepszia és autoimmun betegségek

Keloidra hegesedésre való hajlam

Diabetes rossz sebgyógyulás

Véralvadásgátlók vagy vérhígító szedése

Lidokain érzékenység

Figyelmeztetések

1. A készülék első használata előtt ajánlott a gép disznóbőrön való kipróbálása. Ha ezen begyakorolta a készülék működését, kezdheti a kezeléseket.
2. Mivel a készülék működés közben magas hőmérséklet produkálására képes, a balesetek elkerülése érdekében tartsa távol gyermekektől.
3. A kezelést követő 30 napon tilos a bőrt dörzsölni, a sebeket mesterségesen leszedni.
4. A teljes gyógyulás kb. 3 hónapot vesz igénybe, ez alatt gyömbér, marhahús, szójaszósz fogyasztása nem javasolt, mivel a pigmentáció visszatérhet.
5. Amennyiben hosszú ideig nem használják a készüléket, 3-4 havonta töltsék fel az akkumulátort, hogy élettartama ne csökkenjen.
6. Meghibásodás esetén ne szedje szét a készüléket, hanem keresse fel a szakszervizt.
7. Szigorúan tilos a készüléket vízzel vagy folyadékkal tisztítani, mivel a belső szerkezet károsodhat és a készülék balesetveszélyessé válhat.

A PlazmaPen Használati utasítása:



1. ON/OFF gomb 2 másodpercig való megnyomásával kapcsolható be/ki a készülék.
2. ON/OFF gomb rövid megnyomásával állítható be a használni kívánt teljesítmény /sebesség fokozat.
3. Az OUT gomb megnyomásával indítható el a kezelés. A kezelés során a kijelzőn megjelenő négysszög jelzi a gép működését. A működés leállításához el kell engedni az OUT gombot. A négysszög eltűnik a kijelzőről.
4. A készülék 2 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Az újbóli használatához el kell engedni az OUT gombot, majd újra le kell nyomni.
5. Az elem töltöttségi szintjét 3 jelzőszint mutatja. Ha csak egy világít, célszerű feltölteni a készüléket.

Tűk használata:

Vastag tű (többször is használható): nagyobb méretű elváltozások eltávolítására alkalmas. Nagyobb sebességfokozaton működik, kisebb fájdalommal jár. Alkalmazása után szükség lehet a vékonyabb tű használatára is. A vékony tű (egyszer használatos): kisebb elváltozások eltávolítására való. Alacsonyabb sebességfokozaton működtethető, alkalmazása enyhe fájdalommal jár.

Nagyméretű elváltozás esetén a vastag és a vékony tűt felváltva használhatjuk.

A készülék összeállítása:

A vastag tűt illessze be a készülékbe és az óramutató járásával megegyező irányba szorítsa meg.

A vékonyabb tűt a tűfej borítóval együtt kell használni, a készülékbe illeszteni és a vastag tűhöz hasonlóan megszorítani.

Használat után ellenkező irányba elfordítva kell a tűt kicsavarni.

A készülék használata:

1. Kezelés előtt fertőtlenítse a bőrt és a tűt is.
2. Válassza ki a megfelelő teljesítmény fokozatot: 3 alatt a kicsi, lapos, 3 felett a nagyobb, mélyebb elváltozásokat kezelje.
3. Az kezelés során ne tartsa a tűt egy helyen, hanem óvatosan előre-hátra mozgassa. Érzékeny területeken végezzen inkább többször rövidebb ideig tartó kezelést.

Figyelmeztetés kezelés előtt:

Szükség lehet fájdalomcsillapító krém használatára: a be kent bőrfelületet fedje be, majd 15-20 perc után törölje le. Kezelés után a pörk 4-10 nap alatt magától leesik. A pigmentáció elkerülése érdekében a vendég a kezelést követő 3 hónapig kerülje az erős napsugárzást!

A kezelést követő egy hétig ajánlott kerülni a csípős ételek, az alkohol, és aspirin vagy hasonló gyógyszerek alkalmazását. Kerülje a vendég a kezelt bőrfelület vízzel való érintkezését, valamint a verejtékezést kiváltó gyakorlatokat, mivel a gyógyulási folyamat ez által lelassulhat. Hámképzést serkentő bőrápoló készítmény használata javasolt.

Általános tanácsok:

A kellő gyakorlat megszerzéséhez használjon gyakorló bőrt.

Mivel a készülék egy pillanat alatt égethet, tartsa távol gyermekektől.

Ne távolítsa el a keletkező sebet, hanem várja meg, míg magától leesik. A kezelt terület méretétől függően a teljes gyógyulás 2-10 hétig tarthat. Gyömbér, marhahús, szójaszósz fogyasztása nem ajánlott az elszínező hatásuk miatt.

A készülék vízzel nem tisztítható. Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van, érdemes 3 havonta feltölteni az akkumulátort. Hiba esetén ne szedje szét a készüléket, hanem vigye szakszervizbe!

Műszaki adatok:

Akkumulátor töltőfeszültség: 5VDC

Méret: 18x3,8cm

Súly: 46gr

Tartozékok:

1db. nagy tű

5db. kis tű

1db. USB kábel

1db. USB töltő 110-230VAC/5VDC

1db. Kezelési utasítás



PlazmaPen Tűkészlet



Forgalmazza: **ELKON** cosmetic Kft.

Web: www.elkon.hu Email: elkon@elkon.hu

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Tel.: +36-28-472129 Mobil: +36-70-9492198