



E5001-AD

10 in1

Multi-funkciós

Kozmetikai készülék


Kezelési utasítás

ELKONcosmetic Kft.











www.elkon.hu

H5001-AD kozmetikai készülék használati utasítás


1. Gőz kar
2. Nagyítós lámpa
3. Vezérlő panel
4. Eszköztartó
5. Hálózati csatlakozó

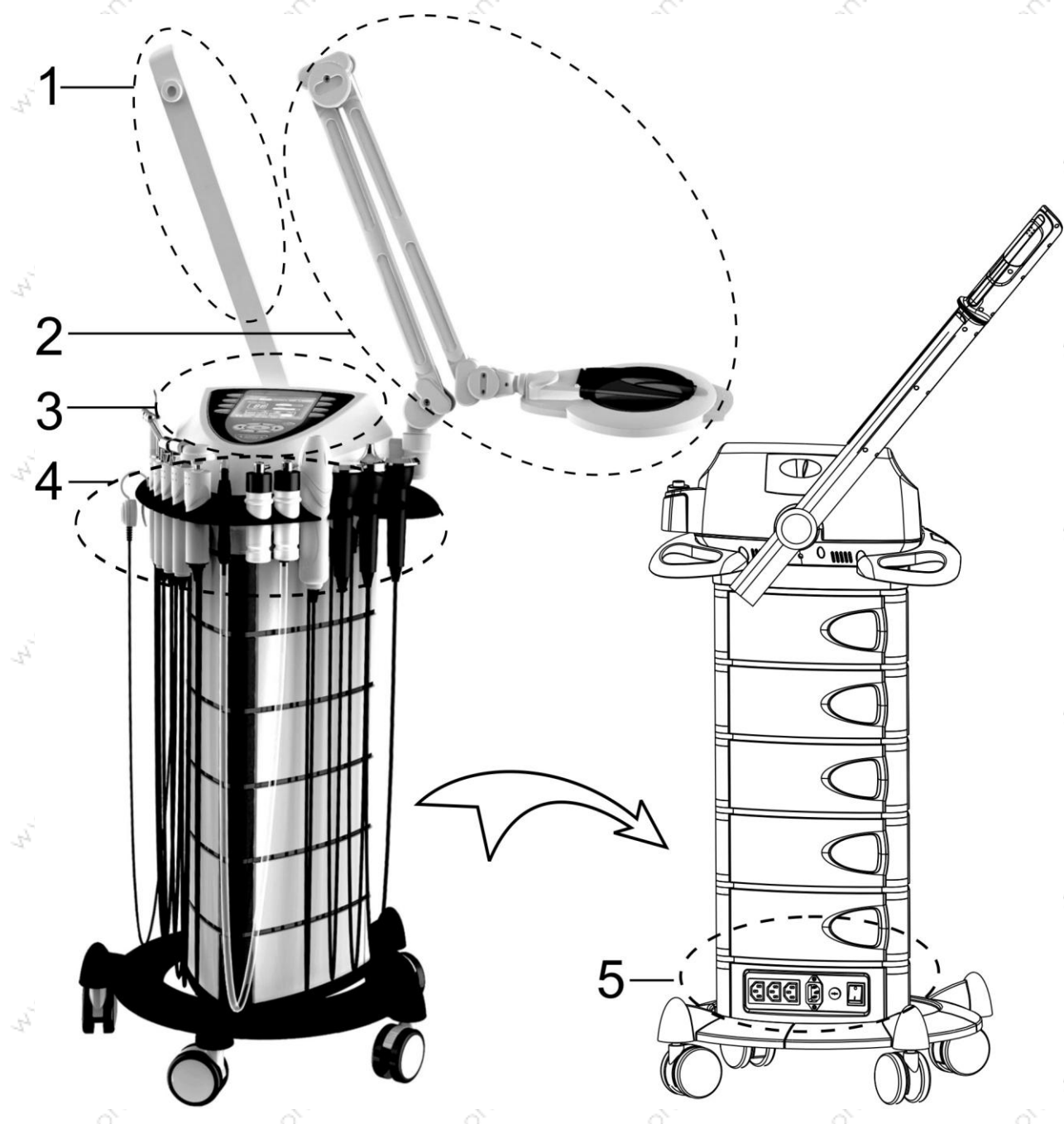

Csomaglista

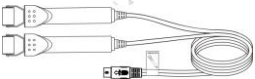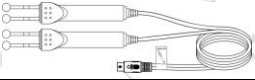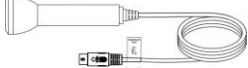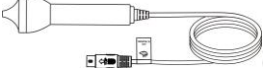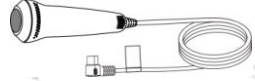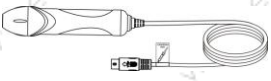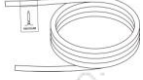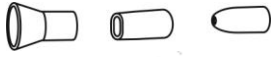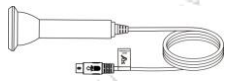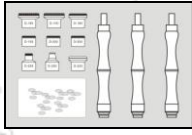Megnevezés	Kép	Mennyiség	Megnevezés	Kép	Mennyiség
Bázis készülék		1 db	Görgős fej (ionto)		1 db
Hálózati kábel		1 db	Gömb fej (ionto)		1 db
UH Arckezelő fej		1 db	UH Szemkörnyék fej		1 db
Hideg-Meleg vasaló		1 db	VIO fej		1 db
VIO elektróda "gomba"		1 db	VIO elektróda "gömb"		1 db
VIO elektróda "kanál"		1 db	VIO elektróda "rúd"		1 db
Vákuum cső		1 db	Spray cső		1 db
Spray tartály		2 db	Vákuum fej		1 db
Vákuum illeszték		1 készlet	Illó olaj szivacs		3 db
Hidroabrázió fej		1 db			
Nagyítós lámpa		1 db	UH Testkezelő fej		1 db
Gyémánt csiszoló		1 készlet	Használati utasítás		1 db

A készülék ismertetése:

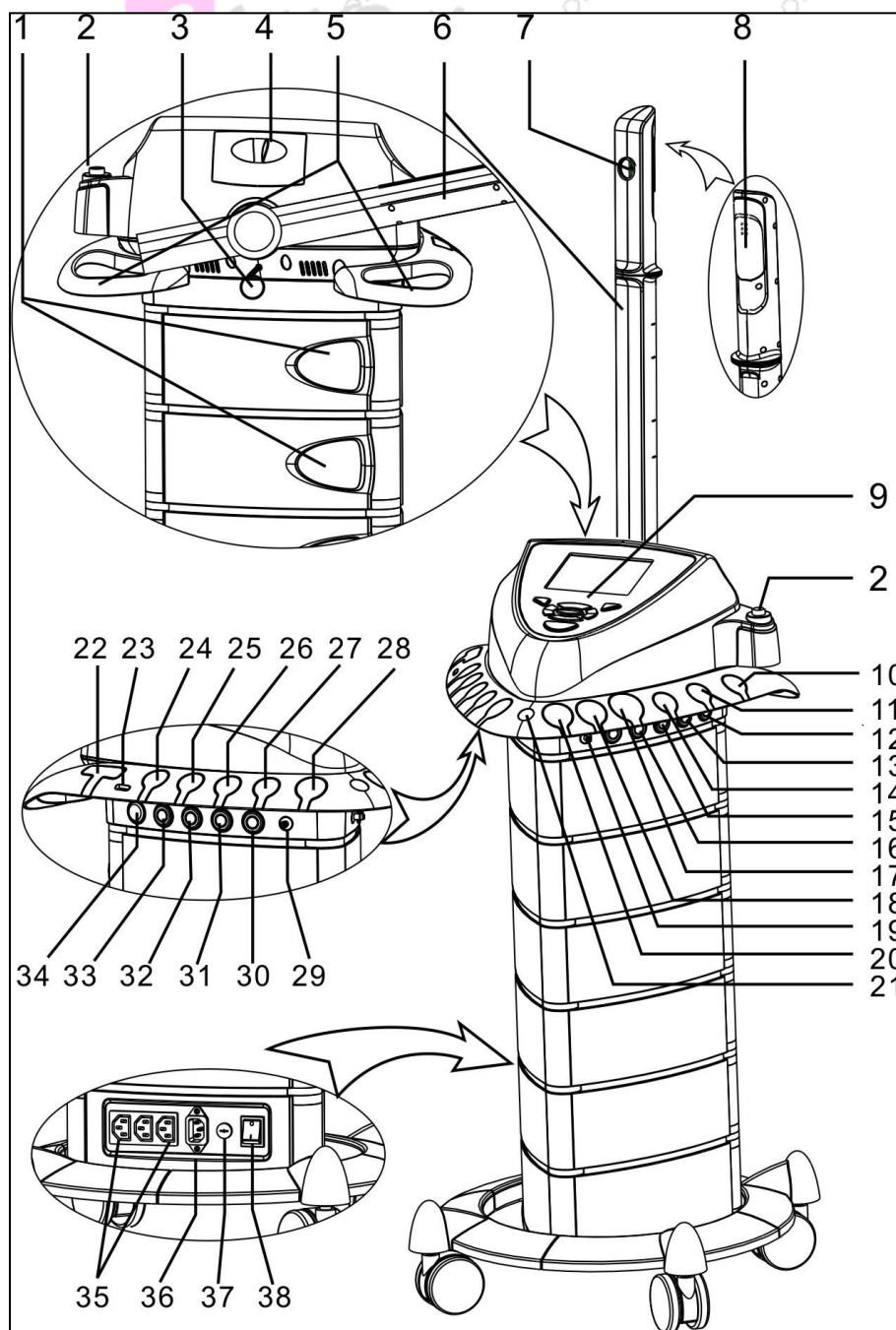


1. Bázis készülék ajtók
2. Nagyítós lámpa tartó
3. Gőzkar rögzítő
4. Víz betöltő nyílás
5. Mozgató fogantyú
6. Gőzkar
7. Gőz kimeneti nyílás
8. Illó olaj fedél
9. Vezérlő panel
10. Testkezelő fej tartó
11. Szemkörnyék kezelő tartó
12. Testkezelő csatlakozó
13. Szemkörnyék kezelő csatlakozó
14. Arckezelő kezelő tartó
15. Arckezelő csatlakozó
16. Vio fej csatlakozó
17. Vio fej tartó
- 18, 20. Spray tartály tartó
19. Spray csatlakozó
21. Vákuum fej tartó
22. Hidroabrázió fej tartó
23. Kontakt elektróda tartó
- 24, 25. Gömb fej tartó (ionto)
- 26, 27. Görgős fej tartó (ionto)
28. Hideg-Meleg vasaló tartó
29. Vákuum csatlakozó

30. Hideg-Meleg fej csatlakozó
31. Görgős fej csatlakozó (ionto)
32. Gömbfej csatlakozó (ionto)
33. Kontakt elektróda csatlakozó (nem tartozék)
34. Hidroabrázió csatlakozó
35. Hálózati kimeneti csatlakozó
36. Hálózati csatlakozó
37. Biztosíték tartó
38. Hálózati kapcsoló


TARTOZÉKOK

Ultrasonic - Ultrahang:

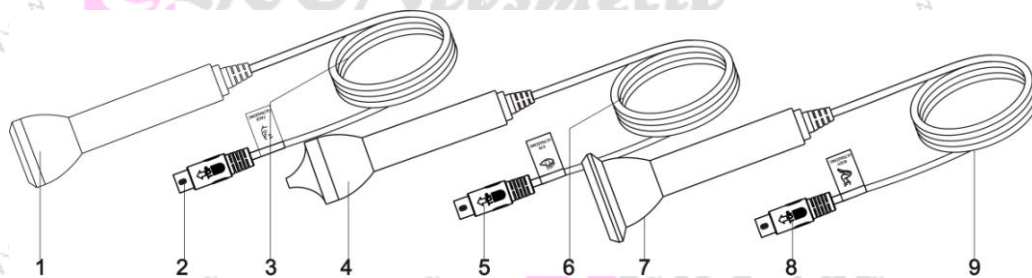


- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Arckezelő fej | 4. Szemkörnyék kezelő fej | 7. Testkezelő fej |
| 2. Arckezelő fej csatlakozó dugó | 5. Szemkörnyék kezelő fej csatl. dugó | 8. Testkezelő fej csatlakozó dugó |
| 3. Arckezelő fej hajlékony kábel | 6. Szemkörnyék kezelő fej hajlékony kábel | 9. Testkezelő fej hajlékony kábel |

Skin scrubber - Hidroabrázió:

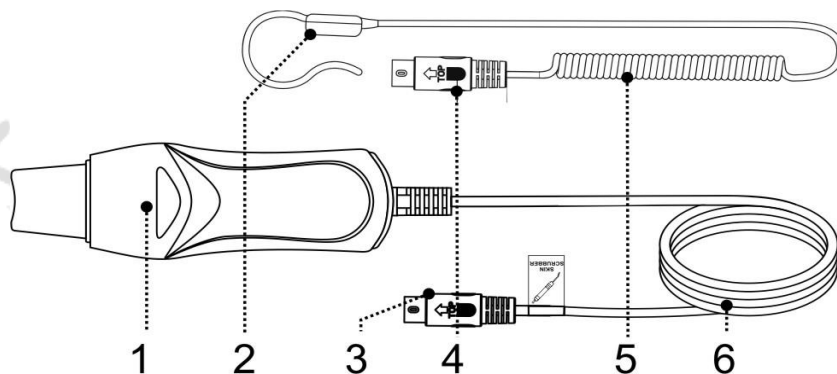

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hidroabrázió fej | 2. Kontakt elektróda (nem tartozék) | 3. Hidroabrázió fej csatlakozó dugó |
| 4. Kontakt elektróda (nem tartozék) | 5. Kontakt elektróda (nem tartozék) | 6. Hidroabrázió fej hajlékony vezeték |

Galvan - Iontoforézis:

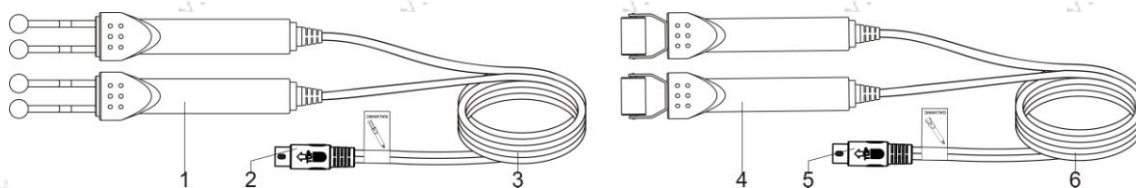


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Gömb elektróda | 4. Görgős elektróda |
| 2. Gömb elektróda csatlakozó dugó | 5. Görgős elektróda csatlakozó dugó |
| 3. Gömb elektróda hajlékony vezeték | 6. Görgős elektróda hajlékony vezeték |

Gömb elektróda: alkalmazható kis területen vagy kis ívű hajlatokon

Görgős elektróda: alkalmazható nagy sík területeken


A kezelőpanelen lévő  és  jelzőfény a piros hajlékony kábelhez tartozó elektróda állapotát jelzi.

High-Frequency - VIO:

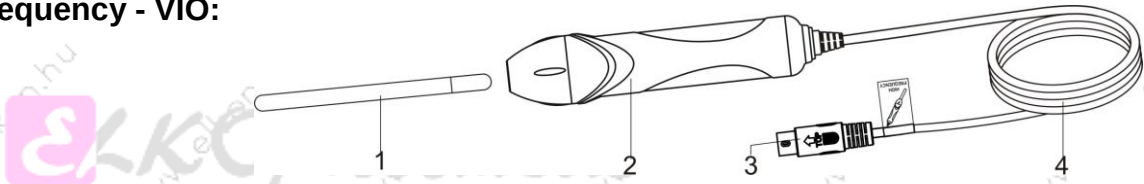

1. VIO üveg illeszték
2. VIO kezelő fej
3. VIO kezelő fej csatlakozó dugó
4. VIO kezelőfej hajlékony kábel

Különböző üvegelektrodák a különböző kezelendő területekre:

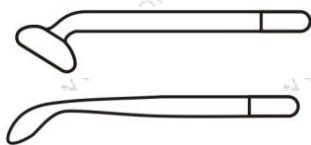

A: Gomba lakú üvegelektroda – nagy területen való használatra (arc, homlok, nyak, test, stb).



B: Kanál alakú üvegelektroda – közepes területeken való használatra (állcsúcs, stb).




C: Kis gömb végű üvegelektroda – nagyon kicsi területen való használatra (orr hajlatai, stb).



D: Rúg alakú üvegelektroda – közvetett használatra (vendég kezében)

VIO- illeszték behelyezése a fejbe illetve kivétele az ábra szerint:

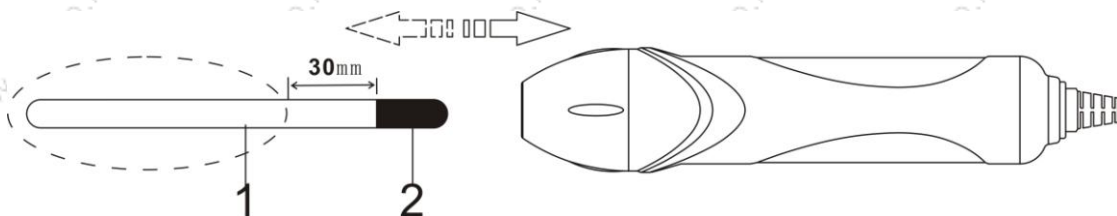


1. Elektroda üveg része
2. Elektroda fém része

Az elektrodát ütközésig tolja bele a fejbe úgy, hogy a fém része (2) ne legyen megérinthető (30mm).

Használat után az üvegelektrodát mindig huzza ki a fejből

Hideg-Meleg kézi egység részei:

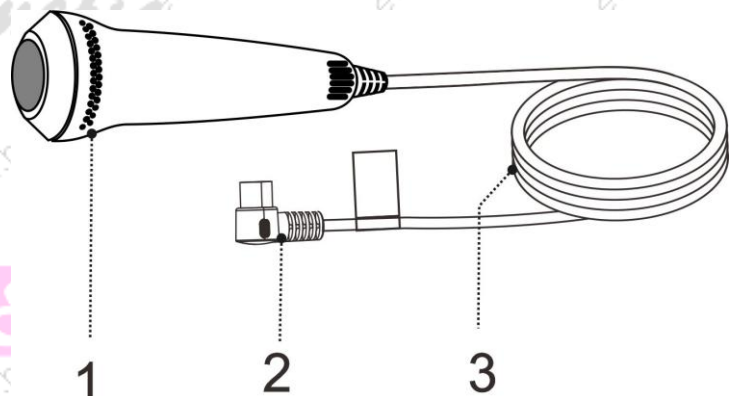

1. Hideg-Meleg vasaló fej
2. Csatlakozó dugó
3. Csatlakozó vezeték


Illesztékek:

1. Kristályos csiszoló kicsi, kis területek kezelésére, bőrkeményedés kézen, lábon stb.
2. Kefe kicsi: tisztításra masszírozásra kis területeken, arcon, stb.

Spray és vákuum tartozékok:

Spray:


Vákuum:

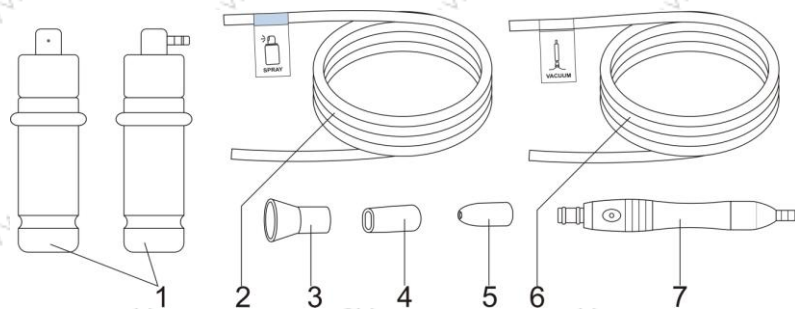

1. Spray tartály
2. Spray tartály összekötő cső
- 3-4-5. Vákuum illesztékek
6. Vákuum kezelő fej összekötő cső
7. Vákuum kezelő fej


Spray tartály:

1. Fúvóka
2. Tarály kupak
3. Szívócső
4. Spray tartály
5. Levegő csőcsatlakozás
6. Levegő szabályozó nyílás (mutató újjával zárja vagy nyitja)

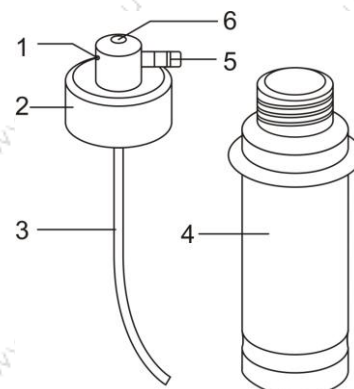


Vákuum szívófej:

1. Vákuum illeszték
2. Tömítő gyűrűk
3. Vákuum szabályozó nyílás
4. Markolat
5. Tömítő gyűrű
6. Szűrő szivacs
7. Szívócső csatlakozó

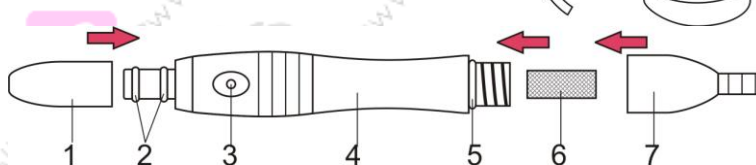

Mikrodermabrázió:

1. Gyémánt fej
2. Szűrő
3. Markolat

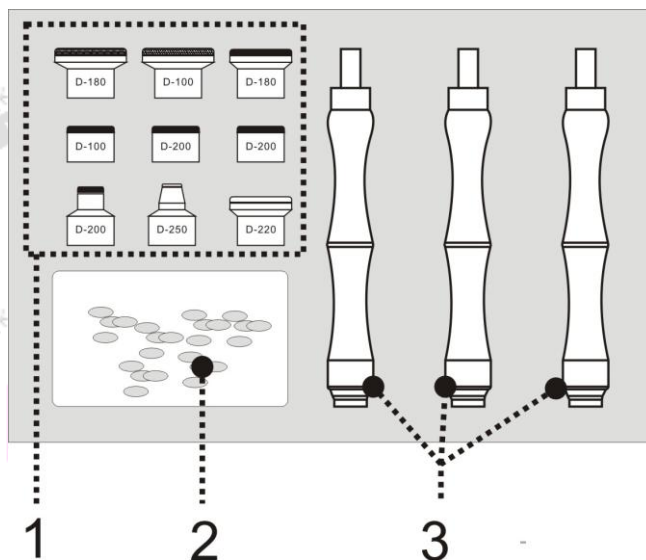

Kezelő panel ismertető



1. **Érintő képernyő:** funkció választás érintéssel
2. **Back** gomb: visszalépés a menüben
3. **Left** gomb: mozgás balra a kiválasztáshoz
4. **Down** gomb: lefelé mozgás a menüben
5. **START / PAUSE** gomb: a működés indítása vagy szüneteltetése
6. **UP** gomb: felfelé mozgás a menüben
7. **Right** gomb: mozgás jobbra a kiválasztáshoz
8. **Enter** gomb: Az aktuálisan kiválasztott funkció megerősítése

 **Elkon cosmetic**

LCD érintő kijelző:

Language selection interface



Function selection interface



Facial steamer working interface



Cool & hot hammer working interface



Ultrasonic working interface



Skin scrubber working interface




High-frequency working interface



Galvanic working interface



Vacuum working interface

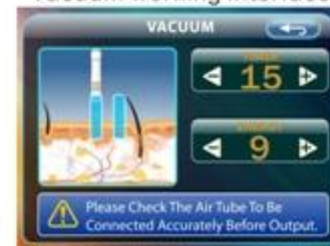


Spray working interface




Tartozék csatlakoztatási információ:

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.



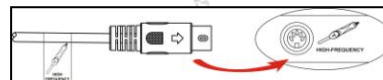


2. Mindegyik tartozék kábele el van látva funkciójának megfelelő

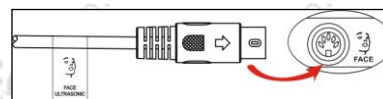


szimbólikus ábrával és felirattal aminek segítségével megfelelően csatlakoztathatja tartozékait a bázis készülékhez a mellékelt ábrák szerint.


3. A készülékhez egyidejűleg csak az egyik iontoforézis tartozék csatlakoztatható.

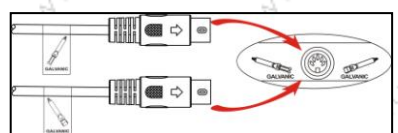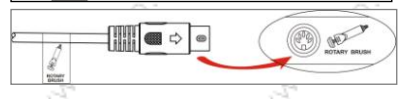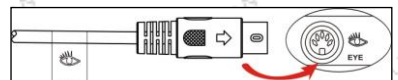




4. A tartozékok csatlakoztatásakor legyen figyelemmel a csatlakozó dugókon és aljzatokon található mechanikai kialakításokra amiknek illeszkedniük kell egymásba (ábra)

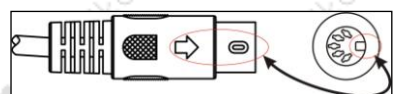


5. Helyezze a cső egyik végére a spray tartályt, a cső másik végét csatlakoztassa a készülék kimeneti csomkjára (ábra szerint)

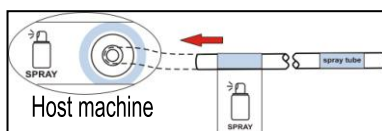


6. Helyezze a cső egyik végére a vacuum szívó fejet, a cső másik végét csatlakoztassa a készülék bemeneti csomkjára (ábra szerint)

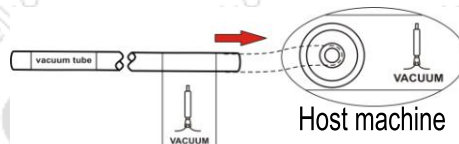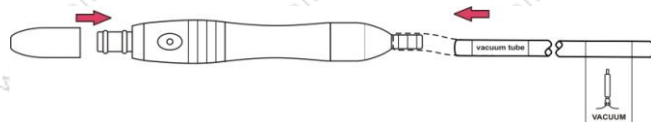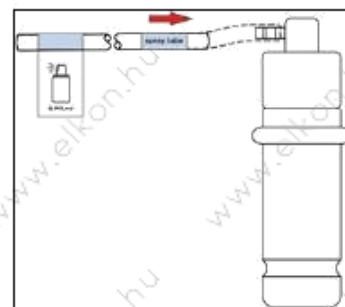

7. A gyémántfejes mikrodermabráziós fej csatlakoztatását a vákuum fejhez hasonlóan végezze el, kövesse az ábrát:

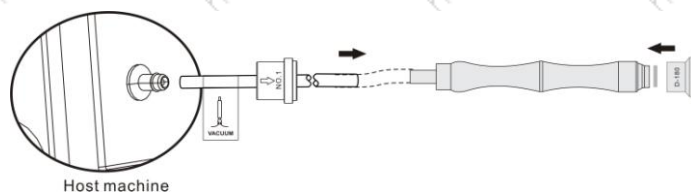


8. A gőzkar kinyitása: amikor a készüléket kiveszi a csomagolásból a gőzkar hajtsa fel a használat során alkalmas pozícióba. Amint a gőzkar eléri ezt a pozíciót kattánást hall, ezzel beáll a normál használat során a vízszinteshez képest megengedett min. 30 fokos határolás. Ezután a gőzkar ebben a tartományban szabadon mozgatható. A pozíció határolására azért van szükség mert a gőzkarban lecsapódó pára vízcseppekké alakulhat aminek vissza kell folynia a víztartályba. (A vízszintes vagy ahhoz közeli pozíció esetén a forró vízcseppek a vendég irányában távoznának). A gőzkar eredeti pozíciójának visszaállításához a retesz meghúzásával van lehetősége az ábra szerint.

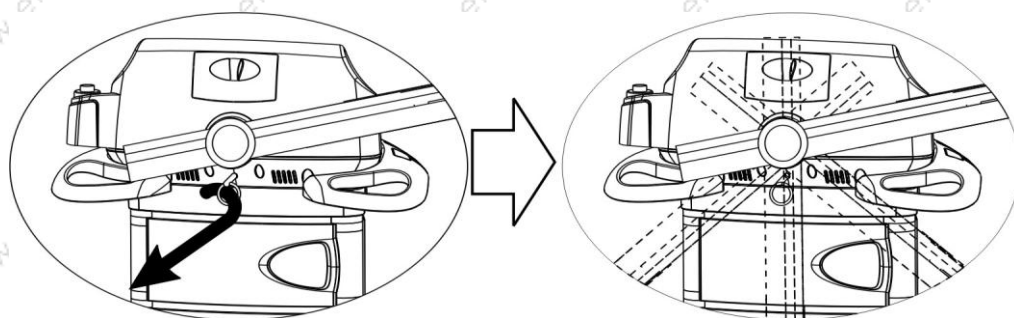

9. Gőzölő tartályának vízzel feltöltése:


Nyissa ki a készülék hátoldalán található ajtót, itt találja a víztartályt. A tartály az óra mutató járásával ellentétesen elforgatva kivethető és ioncsrélt vagy tisztított vízzel feltölthető. A feltöltés másik módja a szintén hátoldalon lévő lenyíló tülsérnek kiképzett ajtón keresztül. A tartályt soha ne töltse a MAX. jelzés fölé, mindig ellenőrizze, hogy megfelelően legyen rögzítve.

FIGYELEM! A nem kellő rögzítés tömitetlenséget okoz ennek következményeként a gőz a készülék elektronikájába távozva súlyos rendelleneséget, meghibásodást eredményez!

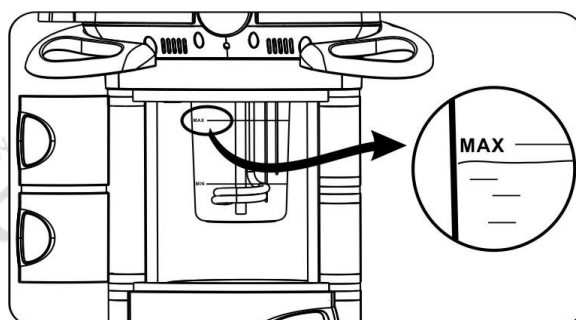

Funkciók kiválasztása, használata:

1. A készüléket a hátulján található kapcsolóval helyezze áram alá, ekkor a jelző lámpa és az LCD képernyő világít.
2. Az LCD kijelzőn megjelennek a választható kommunikációs nyelvek (alapértelmezett Magyar), valamint a működési funkciók.

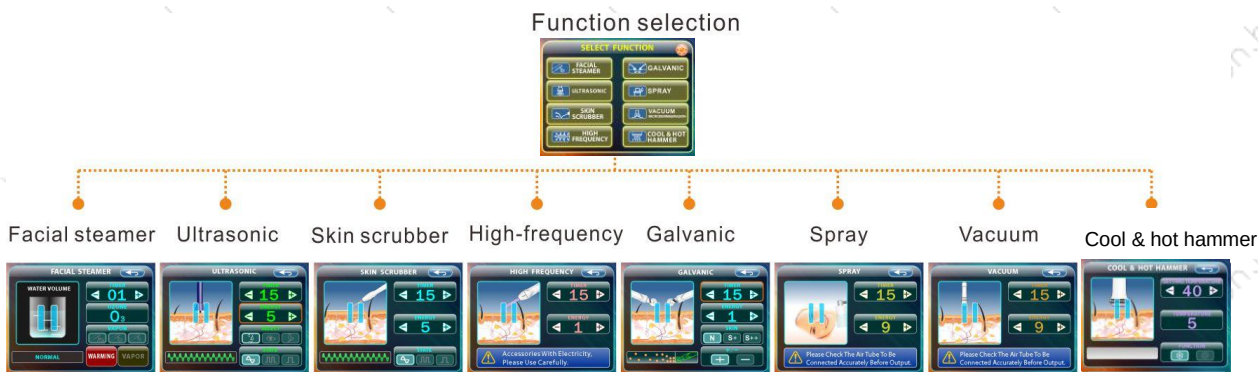

3. Amikor működésbe lép a készülék egyidejűleg használhatja az érintő képernyő és a gombvezérlést.

Érintő képernyő vezérlés: a készülék vezérlése az LCD érintő képernyő érintésével történik


Gombvezérlés: a gombok megnyomásával is kiválasztható a funkció, ez a kijelzőn piros keretben jelenik meg.



A fel-le gombokkal kiválasztható a funkció, a hozzárendelt pereméterek értékeinek

beállítása

gombokkal végezhető el. (a kijelzőn piros keretben látható)

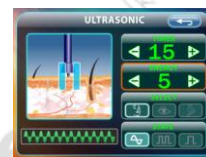

A

gombokkal elvégzett beállítások után nyomja meg az ENTER



gombot és

kezdődhet a munka.

Az összes funkció kiválasztása, azok értékeinek beállítása az érintő képernyő valamint a gombok segítségével lehetséges, a hasonlóság vagy azonosság miatt külön-külön funkcióként jelen kezelési utasítás a beállításokat csak részben tárgyalja!

Idő beállítás: érintse meg a kijelzőn a "TIMER" mezőben a "➡" vagy "⬅", vagy a direct

gombokat a kezelőpanelen. A "➡" vagy "⬅" beállítástól függően az érték növekszik vagy csökken.


Energia szint: érintse meg a kijelzőn az "ENERGY" mezőben a "➡" vagy "⬅", vagy a direct

gombokat a kezelőpanelen. A "➡" vagy "⬅" beállítástól függően az érték növekszik vagy csökken.

Visszalépés az aktuális funkcióból: érintse meg a kijelzőn a



jelet

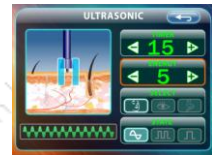

vagy

a kezelőpanelen a



gombot.


A kijelzőn a funkcióhoz nem tartozó parameter értéke nem állítható ez szürke színben jelenik meg.

“START/PAUSE” a folyamat indítása/szüneteltetése : a “START/PAUSE”



gomb

megnyomása a munka folyamatot indítja vagy megállítja, a kijelzőn is ennek megfelelően a működik

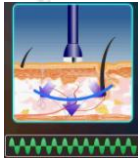

animáció

vagy szünetel animáció



jelenik meg.

Nyelv kiválasztása: a kijelző jobb felső sarkában érintse meg a



gombot itt megtalálja a nyelv



választó opciót



. A

gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvet. A

kiválasztás után érints meg a




gombot. (Gyárilag beállított alapértelmezett nyelv a Magyar)

GŐZÖLŐ (VAPOZON)

Kijelző panel információk:

1. Animációkijelző ablak: Animáció megjelenítése és Start / Stop érintőképernyő
2. Vízsint ablak
3. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
4. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
5. Ózon funkció ablak: Érintéssel bekapcsolja az ózon funkciót
6. Előmelegítés gomb: kiválasztása a készenléti funkciónak
7. Maximális gőzerő szint: kiválasztása a Maximális gőzteljesítménynek
8. Közepes gőzerő szint: kiválasztása a közepes gőzteljesítménynek
9. Gőzzölés indítása gomb
10. Minimális gőzerő szint: kiválasztása a Minimális gőzteljesítménynek
11. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
12. Vissza gomb: Visszalépés a menüben

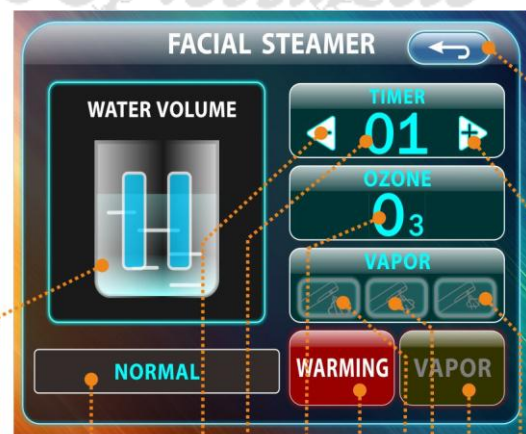

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adja meg a gőzölő funkciót, válassza ki a  "előmelegítési funkciót (készenléti) vagy"  "gőzölés funkciót.

Előmelegítési (készenléti) funkció:

A  gomb megnyomásával lépjen be a Fűtés foglalási felületbe, a felmelegedési idő beállítása ebben a kezelőfelületben állítható, a többi szürke gomb nem áll rendelkezésre.

Időbeállítás: 5-90 perc áll rendelkezésre, nyomja meg  "vagy"  " gombot hogy növelje vagy csökkentse az időt, minden egyes lépés öt perccel több vagy kevesebb lesz. Az alapértelmezett idő 60 perc. A beállítás befejezése után nyomja meg

a  "START/PAUSE" gombot vagy érintse meg az animáció megjelenítési területét .

Gőzölési funkció:

Válassza a  "gőzölés funkció alapértelmezett felületét. Alapértelmezett állás: az időzítő "15" percen áll, az "Ózon" funkció kikapcsolva, a "Gőzölés" funkció a maximális szórás mennyiséggel

rendelkezik. A beállítás befejezése után nyomja meg a gombot  "START/PAUSE" vagy érintse meg az animációs kijelző területet a gőzölés indításához.

1. Idő beállítás

Érintse meg  és  gombokat, az idő beállítása 1 perces lépésekben 1-30 percig állítható.

2. Gőzerő beállítás

A gőz mennyisége 3 fokozatban állítható – alacsony, közepes és maximális szint.

A jelző fény zölden világít  A jelző fény zölden világít  ha a gőz mennyisége a közepes szintű. A jelző fény zölden világít  ha a gőz mennyisége a maximális szintű. Before the spray spouts should be selected the highest level in using, then adjust the volume of spray according needed.

3. Az Ozon funkció használata

Érintse meg az ózon kapcsolót , a gomb színe zöld, az ózoncső bekapcsol, a gőz dúsabbá válik, az ózon illata a gőzben érezhető lesz.

Ha az ózon ki van kapcsolva a gomb színe kék.

4. Vízsint-érzékelő funkció

A készülék automatikusan érzékeli a vízszintet. Ha a vízszint a normal szintben van (a vízszint a maximális és a minimális szint között), a készülék folyamatosan fűt  ;

Ha túl magas vagy túl alacsony vízszintet észlel, (ha a vízszint túl magas, az animáció kijelzője villogni



kezd és megjelenik a " " jelzés, ha a vízszint túl alacsony, az animáció kijelzője villog és megjelenik



a " " jelzés és a készülék azonnal kapcsolja ki a fűtést.

Ekkor a figyelmeztető hangjelzés a "Bi Bi", a figyelmeztető jelzést addig folytatja, amíg a vízszint el nem éri a normál szintet, és feloldja az összes gombot, ezután nyomja meg a "START / PAUSE" gombot.


Figyelem:

1. Mielőtt bekapcsolná a gőzölőt ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e rögzítve és a vízszint a legmagasabb és a legalacsonyabb vízszint jele között van.
2. Ha illóolaj hozzáadására van szükség addig a gőzölést szüneteltesse.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki az illóolajat felszívó anyagot (pamut vagy szövet) és max. 1-2 csepp illóolajat cseppentsen rá.
4. Ne alkalmazzon agresszív – a műanyagot károsító illóolajat.
5. A gőzkar kifúvó nyílása ne legyen kb. 40 cm-nél közelebb a páciens kezelendő bőréhez nehogy leforrázza.
6. Az ózon sterilizáló hatást fejt ki ez károsíthatja a bőrt, ezért fontos, hogy a bőrtípusnak megfelelő kezelési időt válasszon.
7. A víztartályt a készülékről csak a benne maradt víz lehűlése után szabad levenni a mert a forró víz égési sérülést okozhat.
8. Kerülje a forró víztartályba hideg víz hozzátöltését mert a fűtőelem hirtelen lehűlése miatt az megrepedhet és nem kívánatos áramszivárgás következik be.
9. Ha vízszivárgás vagy gőzszivárgást tapasztal ellenőrizze a víztartály rögzítettségét, amennyiben ezt a gőzkarnál tapasztalja forduljon szakszervizhez (ELKONcosmetic Kft.)
10. A készüléket minden esetben csak jó földeléssel ellátott hálózati csatlakozással használja.

Ultrahang funkció

Kezelő felület információ (érintő kijelző)

1. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
2. Hullámforma megjelenítő ablak, a választott hullámformát mutatja
3. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
4. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
5. Energia csökkentő gomb: csökkenti az energiafelhasználást
6. Energiakijelző ablak: a kimeneti energia aktuális nagyságának megjelenítése
7. Folyamatos hullám választó gomb: érintéssel választható a folyamatos hullám
8. Arckezelő fej kiválasztó gomb: érintéssel választható az arckezelés
9. Hibrid hullám választó gomb: érintéssel választható a hibrid hullám
10. Szemkörnyék kezelő fej választó gomb: érintéssel választható a kezelés
11. Széles impulzus hullám kiválasztó gomb: érintéssel választható a széles impulzus

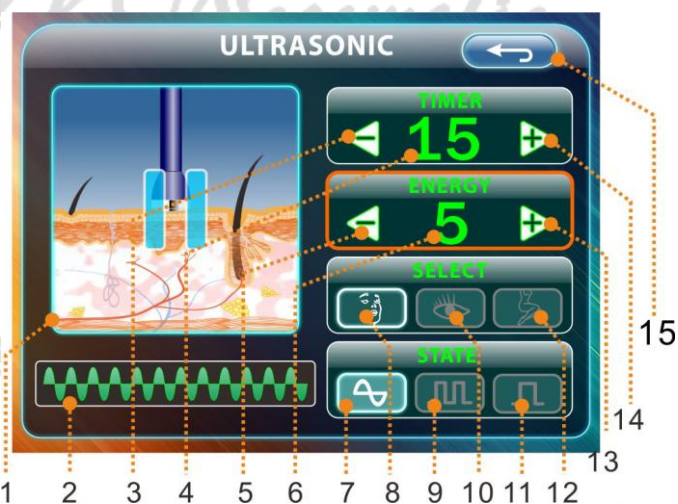

12. Body probe selection button: select the body probe
13. Energia növelése gomb: növeli az energiafelhasználást
14. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
15. Vissza gomb: vissza a funkció menübe

Ultrahangos hullámfunkció beállítása:

A főmenü alatt válassza ki az Ultrahangos funkciót a " " gombbal

A "TIMER" időkijelző ablakban "15" perc látható

Az "ENERGIA" megjelenítő ablakban megjelenik az "5" szint

"SELECT" ablakban fej kiválasztó gombbal " " válassza az arckezelő fejet (zöldre vált)

"STATE" ablakban hullámforma gombbal " " válassza a folyamatos hullámot (zöldre vált)

Ebben az állapotban rendelkezésre áll az idő és az energia beállítása is.

Idő beállítása: érintse " " és " " gombokat, a kezelési idő 1-30 prc tartományban állítható.

Energia beállítás: érintse " " és " " gombokat, a kimeneti szteljesítmény 1-9 fokozatban állítható.

Kezelőfej kiválasztása: a "SELECT" ablakban a használni kívánt kezelő fej kiválasztásához

" " " " " " gombot érintse meg (a kiválasztott zöldre vált).

Jelforma választás: a "STATE" ablakban a használandó jelforma " " " " " " gombot érintse meg (a kiválasztott zöldre vált).

A beállítás befejezése után érintse meg a "START/PAUSE"  gombot vagy az animációs felületet a működés indításához vagy szüneteltetéséhez.


Mire figyeljen az ultrahangos kezelés során:

1. Az ultrahangos fejeket kezelés előtt és után mindig fertőtlenítse.
2. A szem közvetlen közelében rövid ideig és csak kis intenzitással dolgozzon.
3. A kezelést egészítse ki hidratáló kezeléssel.
4. A kezelés ne legyen (kis területen) 15 percnél hosszabb és a kezelőfej folyamatos mozgásban legyen, soha ne időzzön huzamosabb ideig egy ponton mert nemkívánatos bőrelváltozást okozhat.
5. Tilos a fejet vízbe vagy bármilyen folyadékba belemeríteni!
6. Tilos a kezelőfejet használni ha azon sérülés vagy erős karcolás látható. Ebben az esetben másik fejjel helyettesítendő!

Hidroabrázió (Skin Scrubber) funkció

Kezelő panel információ (érintő képernyő):

1. Hullámforma megjelenítő ablak, a választott hullámformát mutatja
2. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
3. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
4. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
5. Energia csökkentő gomb: csökkenti az energiafelhasználást
6. Folyamatos hullám választó gomb: érintéssel választható a folyamatos hullám
7. Energiakijelző ablak: a kimeneti energia aktuális nagyságának megjelenítése
8. Hibrid hullám választó gomb: érintéssel választható a hibrid hullám
9. Energia növelése gomb: növeli az energiafelhasználást
10. Széles impulzus hullám kiválasztó gomb: érintéssel választható a széles impulzus
11. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
12. Vissza gomb: visszalépés a funkció menübe

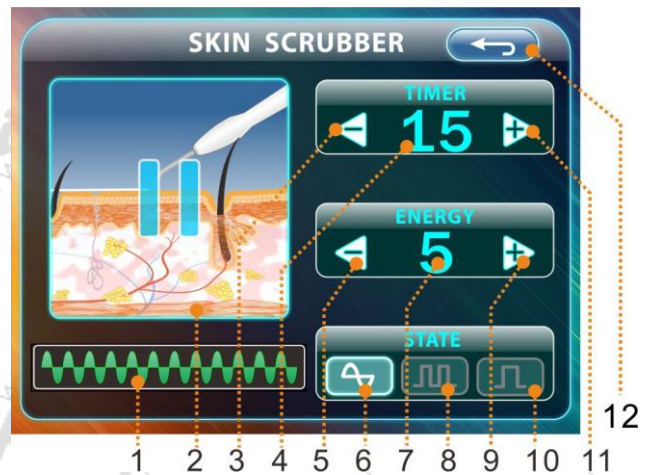

Hidroabrázió (skin scrubber) funkció beállítása:

A főmenü alatt "SKIN SCRUBBER" gombbal válassza ki a tisztító funkciót.

"TIMER" megjelenik az időkijelző ablakban "15" perc

"ENERGY" kijelző ablak mutatja az "5" szintet


"STATE" a hullámalak ablakban válassza a folyamatos hullámgombot . Ebben az

állapotban rendelkezésre áll az idő és az energia beállítása is. Idő beállítás: érintse meg a "

"

" és " gombot a kimeneti teljesítmény beállításához, beállítható tartomány 1-9.


Kimeneti hullámforma választás: érintse meg a "STATE" gombot a hullámforma kiválasztásához. A

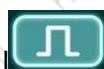 kijelző világít. A  gomb érintésével választható a hybrid hullámforma. A  gom érintésével az impulzus hullámforma választható.

A beállítás végén érintse a "START/PAUSE"  gombot vagy az animációs területet a munka indításához vagy szüneteltetéséhez.

2. Bőrtisztítás:

1. Permetezzen tiszta vizet a tisztítandó bőrfelületre.
2. A kontakt érzékelő szenzort helyezze vendége tenyerébe.
3. A teljesítmény szabályozó gombokkal állítsa be a megfelelő teljesítményt.
4. Ha bőrtisztító folyadékot használ (pl. tisztító tej) egyenletesen vigye fel a bőrre és állandóan tartsa nedvesen.
5. Az alábbi ábrák szemléltetik a tisztítás folyamatait: A.B.C.D

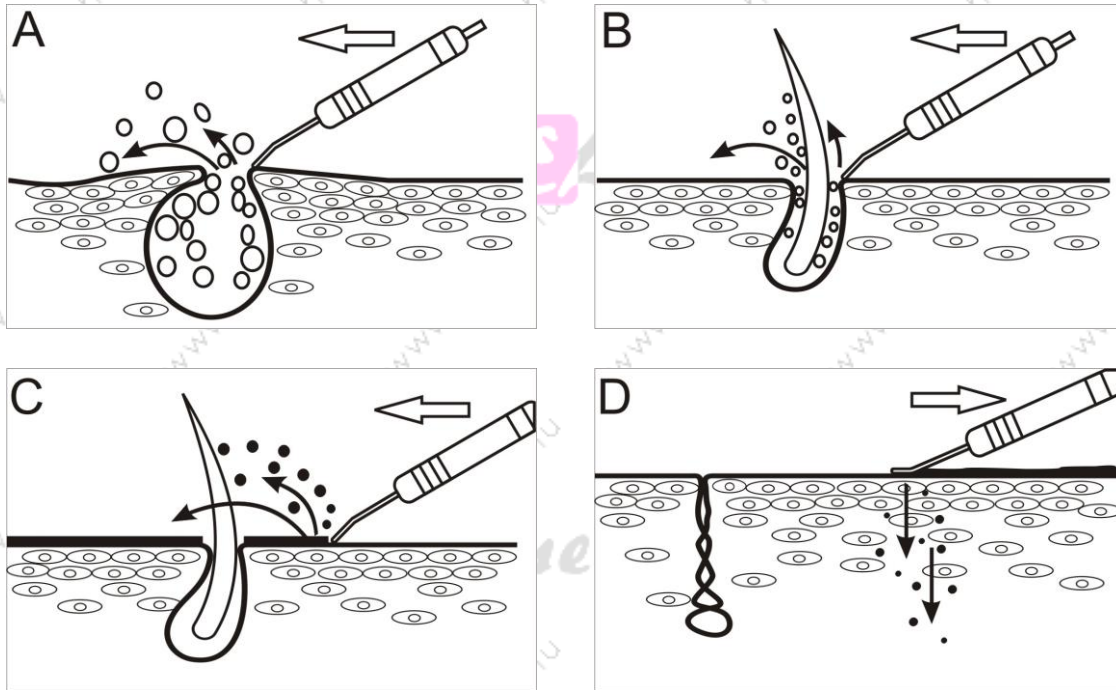

A. Akne fájdalommentes megszüntetése (A ábra).

A szaggatott (pulzáló) ultrahang alkalmas az érett akne fájdalommentes megnyitásával annak eltávolítására.

B. "Kitörési pontok" tisztítása (B ábra)

A 25.000-szeres rezgési frekvencia hatékonyan tisztítja a kitörési pontokat és a pórusokat.

C. Felszíni tisztítás (C ábra)


A fej pengéje eltávolítja az előregedett, elhalt hámréteget.

D. Beviteli masszázs (D ábra)

Hatóanyag beviteli masszázst alkalmazhat ha a fej pengéjét a bőrfelületre párhuzamosan helyezi.


Figyelem:

1. A tisztítófej pengéjét folyamatosan tartsa mozgásban mert ellenkező esetben fájdalmat okozhat.
2. A tisztítás akkor a leghatékonyabb ha penge a bőrfelülettel kb. 45 fokos szöget zár be (ábra szerint).
3. A tisztítási folyamat alatt a bőrfelületet tartsa állandóan nedvesen.
4. Beviteli masszázs esetében a fej kb. 20 fokos szöget zárjon be a bőrfelülettel (ábra szerint).
5. A kezelőfej vezetékét soha ne húzza túl, ne feszítse meg.
6. A kezelőfejet és a kontaktus érzékelőt is minden kezelés után tisztítsa meg, fertőtlenítsen, törölje szárazra.
7. A tartozékok vezetékének sérülése esetén forduljon a berendezés szervizéhez.

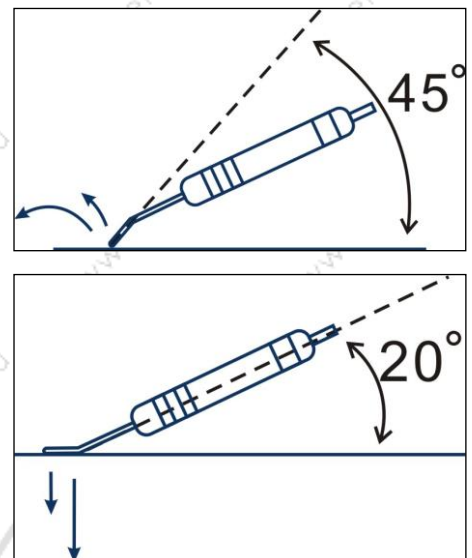

VIO (High Frequency) funkció

Kezelő panel információ (érintő képernyő) :

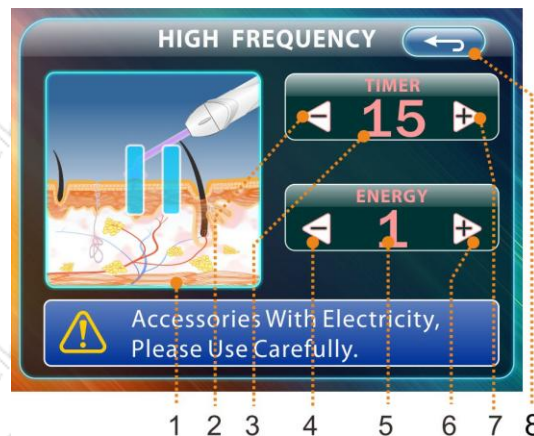

1. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
2. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
3. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
4. Energia csökkentő gomb: csökkenti az energiafelhasználást
5. Energiakijelző ablak: a kimeneti energia aktuális nagyságának megjelenítése
6. Energia növelése gomb: növeli az energiafelhasználást
7. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
8. Vissza gomb: visszalépés a funkció menübe

VIO (High Frequency) funkció beállítása:

A főmenü alatt "HIGH FREQUENCY" gomb érintésével válassza ki a VIO funkciót

"TIMER" megjelenik az időkijelző ablakban "15" perc


"ENERGY" kijelző ablak mutatja az "1" szintet

Ebben az állapotban rendelkezésre áll az idő és az energia beállítása.

Idő beállítása: érintse meg a "+" és "-" gombot a munkaidő beállításához, a beállítható időtartomány 1-30 perc. Energia beállítás:

érintse meg a "+" és "-" gombot a kimeneti teljesítmény beállításához, beállítható tartomány 1-9.

A beállítás végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az animációs felületet a munka indításához vagy szüneteltetéséhez.

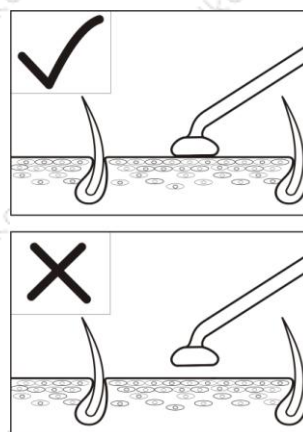

Közvetlen elektroterápiás kezelés :

1. A kozmetikus fogja a kezében a VIO-fejet úgy, hogy ujjával ne érintse meg az üvegillesztéket (lásd az ábrát) és az illeszték sem érintkezzen a készülékhez. A teljesítmény minimum szintre legyen beállítva.
2. A kezelés elkezdése: helyezze a vendége bőrére az üvegelektrodát (lásd a képet) és nyomja meg

"ENERGY"  gombot, közben az elektródát állandóan tartsa mozgásban és lassan növelje a teljesítményt olyan szintre amit a vendége elvisel. Az elektróda fertőtlenítő hatása mellett ionizációs fényt bocsát ki és közben az érintkező felületen vendégének kellemesen melegérzete keletkezik.

3. A kezelés vége felé "ENERGY"  gombbal csökkentse az intenzitást és a "START/PAUSE" gombot érintve leállítja a kezelést. Csak ezután bontsa a kapcsolatot az üvegilleszték és vendége bőre között.

Közvetlen elektroterápiás kezelés eredménye:

1. Kellemes vibrációs meleg érzet.
2. Serkenti a vérkeringést, javítja a bőr rugalmasságát és tápanyagellátását.
3. Elősegíti a sejtek anyagcseréjét, légzését.
4. Melegítő hatás növeli sejtek permeabilitását, abszorpciós képességét, fokozza a kezelések hatékonyságát.

Közvetett elektroterápiás kezelés:

A vendég tartsa kezében az egyenes rúd alakú elektródát, kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a

"START/PAUSE" , gombot, állítsa be a kívánatos intenzitást "ENERGY" gombbal. A kozmetikus masszírozza vendégét úgy, hogy ne érintkezzen az elektródával. A masszírozás befejeztével csökkentse

az intenzitást majd nyomja meg a "START/PAUSE"  a kezelést ezzel befejezte.

Közvetett elektroterápiás kezelés eredménye:

1. Serkenti a vérkeringést, elősegíti a sejtek anyagcseréjét.
2. Beállítja a tápanyagfelszívódást, baktériumokkal szemben növeli az ellenállóképességet.
3. A masszázs javítja a bőr mélyrétegi tevékenységét

Mire figyeljen elektroterápiás (VIO) kezeléskor:


1. A kezelés alatt a kezelőfej ivkisüléssel hangot bocsát ki.
2. Kellemetlenséggel járhat ha az intenzitás magas szintűre van beállítva és az üvegelektrodát úgy közelítjük vagy távolítjuk vendégünk bőréhez. Ezért ilyenkor az intenzitást minden esetben állítsuk minimális szintre.
3. Zsíros arcbőrön a kezelés általában 8 perc, száraz bőrön 3-5 perc. Zsíros bőrt érdemes nagyobb intenzitással kezelni.
4. Az üvegelektroda cseréje, kivétele előtt az intenzitást mindig állítsa minimális szintre és kapcsolja be stop  kapcsolót.
5. Az üvegelektrodákat használat után és előtt mindig fertőtlenítsen
6. A VIO-elektroda foglalatot (markolat) soha ne vízzel csak alkohollal tisztítsa.



IONTFORÉZIS (Galvanic) Funkció

Kezelő panel információ (érintő képernyő) :

1. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
2. Kétpólusú kezelő funkció ablak
3. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
4. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
5. Energia csökkentő gomb: csökkenti az energiafelhasználást
6. Energiakijelző ablak: a kimeneti energia aktuális nagyságának megjelenítése
7. Cation választó gomb: piros elektródához rendelt cation
8. Normál bőrtípus választó gomb
9. Érzékenny bőrtípus választó gomb
10. Anion válaasztó gomb: piros elektródához rendelt anion
11. Extra érzékeny bőrtípus választó gomb
12. Energia növelése gomb: növeli az energiafelhasználást
13. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
14. Vissza gomb: visszalépés a funkció menübe

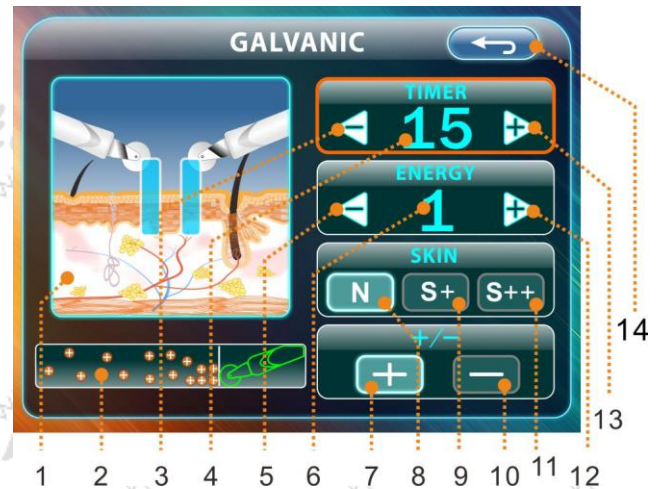

IONTOFORÉZIS (Galvanic) funkció beállítása:




A főmenü alatt "GALVANIC" gombbal válassza ki az IONTO funkciót

"TIMER" megjelenik az időkijelző ablakban "15" perc

"ENERGY" kijelző ablak mutatja az "1" szintet

"SKIN" bőrtípus választó ablakban normal bőrtípus választása esetén "N" zölden világít,

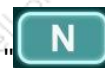

a "+/-" ablakban a "+" gomb zölden világít.



Ebben az állapotban rendelkezésre áll az idő és az energia beállítása, valamint a különböző polar és bőrtípusok kiválasztása

Idő beállítás: érintse meg a "+" és "-" gombot a munkaidő beállításához, a beállítható



időtartomány 1-30 perc. Energia beállítás: érintse meg a "+" és "-" gombot a kimeneti teljesítmény beállításához, beállítható tartomány 1-9.



A bőr típusának kiválasztása: válassza ki a legmegfelelőbb bőrtípust a "N" gombbal normal



bőrtípust, a "S+" gombbal érzékeny bőrtípust, a "S++" gombbal az extra érzékeny bőrtípust, kiválasztott zölden világít.



Polaritás választás: a "" gombbal kiválasztva piros elektródán a cation , a "" gombbal kiválasztva az anion polaritás jelenik meg.

A beállítás végén érintse a "**START/PAUSE**"  gombot vagy az animációs felületet a munka indításához vagy szüneteltetéséhez.

Háromféle működési mód állítható be a különböző kezelési hatások szerint:

1. Egypólusú kezelés

- A kezeléshez felhasználandó hatóanyag felével kenjük be a kezelendő bőrfelületet, a másik felével ittassuk át a vattát, amellyel betekerjük a kezelőfejet.

- Indítsuk el a  üzemmódot. Állítsuk az "ENERGY" energiát a minimális szintre. A vendég kezébe adjuk az elektródát, majd hozzáérintjük a kezelőfejet a vendég bőréhez. A

Start/pause gombbal elindítjuk a készüléket, majd a "+/-" segítségével  azaz kation

üzemmódba kapcsoljuk. Az ENERGY gombbal  vagy  segítségével beállítjuk a kívánt energiát. (Enyhe bizsergést kell éreznie a vendégnek).

- A kezelés teljes ideje alatt (3-5 perc) folyamatosan "Z" alakban mozgassuk a kezelőfejet a vendég bőrén. Tilos elemelni a kezelőfejet és újra visszaérinteni a bőrhöz, mert az kellemetlen áramérzést okoz!

- A kezelés végén a "START/PAUSE"  megnyomásával állítsuk meg a kezelést, ezután vegyük el a kezelőfejet a bőrről és az elektródát a vendégtől.

2. Kétpólusú kezelési mód

Az ionizáló henger alkalmas nagyobb bőrfelület kezelésére. Az egyik henger a pozitív elektróda, a másik henger a negatív. Ennél a kezelésnél nem szükséges a vendég kezébe elektródát adni. Kenjük be a vendég bőrét a felhasználandó kozmetikai készítménnyel, vagy helyezzünk rá kozmetikummal átitatott eldobható arcmaszkot. Érintsük a két elektródát az archoz úgy, hogy azok egymással ne érintkezzenek, először a minimális "ENERGY" energia szint beállításával. A felhasználandó kozmetikum PH értékének

megfelelő polaritást ki kell választani, majd az energia szintet is be kell állítani a  segítségével, amíg enyhe bizsergést érez a vendég. . Savas anyagokat a negatív elektróda fogja vonzani a bőrbe, a lúgos anyagokat a pedig a pozitív vonzza.

A két gömb végű elektródát ugyanígy használjuk, csak kisebb bőrfelületen alkalmazzuk.

3. Tisztító kezelés

Amikor a tisztító kezelést választjuk, a mozgó kezelőfejet a negatív pólusra állítsuk, a vendég kezében lévő elektródát a pozitívra. Az 1. pontban leírtaknak megfelelően a kezeléshez felhasználandó hatóanyag felével kenjük be a kezelendő bőrfelületet, a másik felével ittassuk át a vattát, amellyel betekerjük a

kezelőfejet. A Start/pause gombbal elindítjuk a készüléket, majd a “+/-” segítségével  azaz anion üzemmódba kapcsoljuk. Az ENERGY gombbal  vagy  segítségével beállítjuk a kívánt energia szintet. A többi lépés megegyezik az 1. pontban leírtakkal.

Figyelmeztetések:


1. A Galván funkciót a bőr letisztítása után, a masszázs előtt használjuk. A kezelés előtt a bőrfelület tiszta és száraz legyen, elkerülendő, hogy a tisztításhoz használt anyag a bőr mélyebb rétegeibe kerüljön.
2. A kezelőfejet szorosan tekerjük be vattával, az áramerősséget fokozatosan növeljük az enyhe bizsergő érzésig.
3. A kezelés alatt a kozmetikusnak TILOS megérintenie a kezelőfej bármely fém részét!
4. A kezelés alkalmazható száraz, zsíros és öregedő bőrön. A felhasznált anyagokat a bőrtípusnak megfelelően kell kiválasztani.
5. A kezelés után tisztítsuk meg a kezelőfejeket és száraz helyen tároljuk.
6. Amennyiben az elektródánál pozitív pólust választunk, a bizsergő érzés erősebb, mint a negatívnál.
7. Kezelés alatt TILOS bármilyen fém ékszer viselése. Nem kezelhető az a vendég, akinek arany foga van, vagy fém van a testébe ültetve.
8. Terhes nőknél nem alkalmazható a kezelés, valamint sérült vagy érzékeny bőrön sem.
9. A kezeléshez használt hatóanyag kémhatásának megfelelően kell beállítani a polaritást. Használhatunk lakmuspapírt a Ph meghatározásához.

Spray (permet), Vákuum funkció:

Spray (permet)

Kezelőpanel információ (érintő képernyő):

1. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
2. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
3. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
4. Energia csökkentő gomb: csökkenti az energiafelhasználást
5. Energiakijelző ablak: a kimeneti energia aktuális nagyságának megjelenítése
6. Energia növelése gomb: növeli az energiafelhasználást
7. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
8. Vissza gomb: visszalépés a funkció menübe

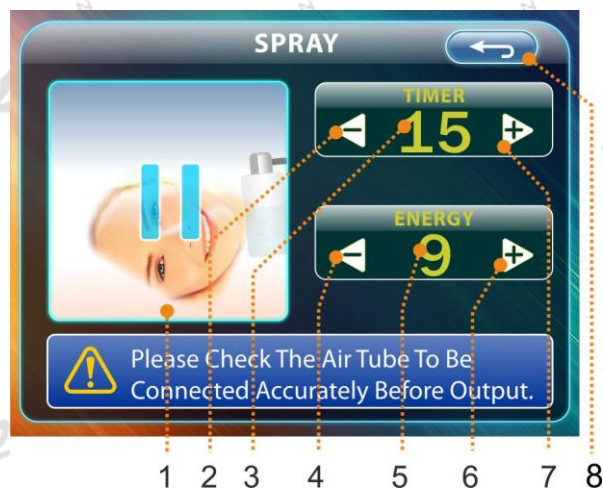

Spray Funkció



A főmenü alatt "SPRAY" gomb érintésével válassza ki a **spray** funkciót.

"TIMER" megjelenik az időkijelző ablakban "15" perc

"ENERGY" kijelző ablak mutatja az "9" szintet

Ebben az állapotban rendelkezésre áll az idő és az energia beállítása.



Idő beállítása: érintse meg a "▶" és "◀" gombot a munkaidő beállításához, a beállítható

időtartomány 1-30 perc. Energia beállítás: érintse meg a "▶" és "◀" gombot a kimeneti teljesítmény beállításához, beállítható tartomány 1-9.





A beállítás végén érintse a "START/PAUSE" gombot vagy az animációs felületet a munka indításához vagy szüneteltetéséhez

Hogyan kell használni

Először ellenőrizze, hogy a szórófej rugalmas csöve pontosan összekapcsolódik-e a készülékkel és a szórófej tartállyal (lásd a jobb oldali ábrát), valamint a funkció "szünet" állapotban van-e.

A funkció indítása után vegye kezébe a megfelelő anyaggal feltöltött tartályt és a mutató ujjával fedje le a tartály tetején lévő nyílást, ezzel elindítja a permetezést. Ujját elemelve a nyílásról szünetel a permet.


Vigyázzon a kritikus részek kezelésére, pl. Száj, orr, szem.

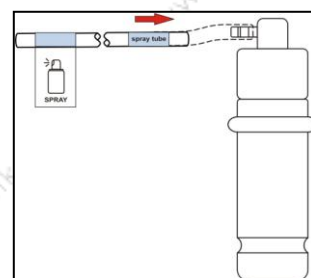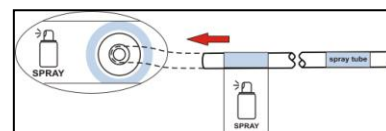

Vákuum

Kezelőpanel információ (érintő képernyő):

1. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
2. Idő csökkentő gomb: csökkenti a munkaidőt
3. Időkijelző ablak: megjeleníti az aktuális munkaidőt (perc)
4. Energia csökkentő gomb: csökkenti az energiafelhasználást
5. Energiakijelző ablak: a kimeneti energia aktuális nagyságának megjelenítése
6. Energia növelése gomb: növeli az energiafelhasználást
7. Időnövelő gomb: növeli a munkaidőt
8. Vissza gomb: visszalépés a funkció menübe

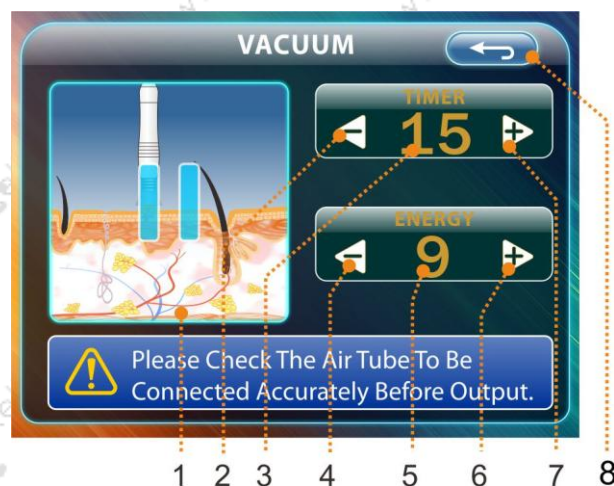


Vákuum Funkció

A főmenü alatt "  " gomb érintésével válassza ki a **vákuum** funkciót

"**TIMER**" megjelenik az időkijelző ablakban "**15**" perc

"**ENERGY**" kijelző ablak mutatja az "**9**" szintet




Ebben az állapotban rendelkezésre áll az idő és az energia beállítása.

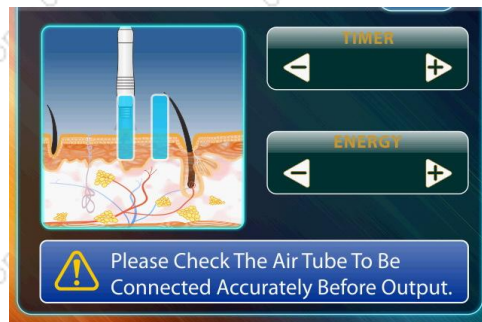


Idő beállítása: érintse meg a "" és "" gombot a munkaidő beállításához, a beállítható időtartomány 1-30 perc. Szívóerő beállítás: érintse meg a "" és "" gombot a kimeneti teljesítmény beállításához, beállítható tartomány 1-9.

A beállítás végén érintse a "**START/PAUSE**"  gombot vagy az animációs felületet a munka indításához vagy szüneteltetéséhez

Hogyan kell használni

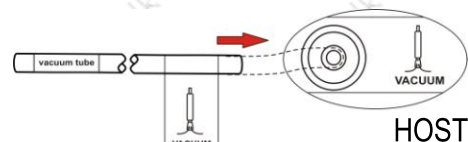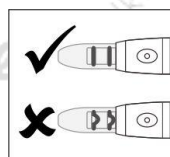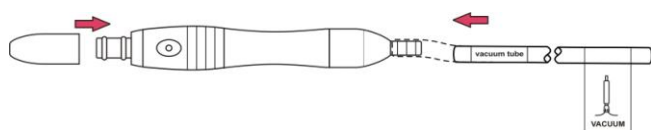


Először ellenőrizze, hogy a vákuumcső mindkét vége megfelelő módon csatlakozik-e markolathoz illetve a készülékhez (lásd az ábrát). Ellenőrizze, hogy a markolat rugalmas cső felőli végében benne van-e a szívacs szűrő (6) (csavarja szét a markolatot 4-7). Az átlátszó szívó fejet (1) forgatással helyezze fel a markolatra, ügyelve arra, hogy a tömítő gumigyűrűk (2) ne gyűrődjenek.

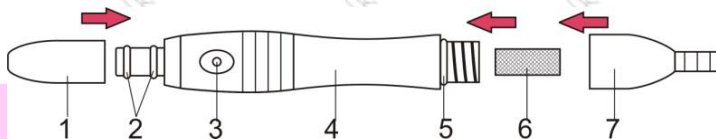

A vákuumozás alatt tartsa a vákuum markolatot a kezében (például mint a tollat tartva), és mozgassa a munkaterületen. Az átlátszó szívóilleszték érintkezzen a bőrrel, ujjával enyhén fedje le a nyomáscsökkentő nyílást a markolaton, így keletkezett vákuum a bőrt felszívja.

Mikrodermabrázió funkció:

Először ellenőrizze, hogy a markolat mindkét vége megfelelően csatlakozik-e a csatlakozókhoz (a fentiekben bemutatott PIC); Helyezze be a szűrőlapkát, kapcsolja be a készüléket, állítsa be az energiaszintet.

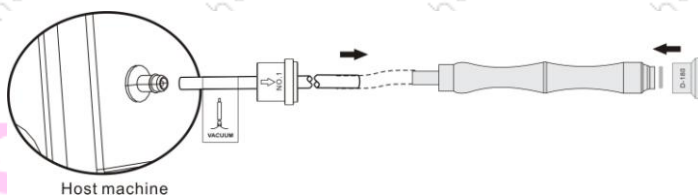


Megjegyzések spray, vákuum és mikrodermabrázió működésére vonatkozóan:

1. Ellenőrizze, hogy a címkéknek megfelelően vannak-e csatlakozások.
2. A működést szüneteltetni kell, ha a permetező palackot vagy a markolatokat cserélni kell használat közben.
3. A vákuum vagy porlasztás működése során ne hajlítsa meg a hajlékony csövet, vagy blokkolja a levegő beömlését, ami közvetlenül okozhatja a károsodást.
4. A hajlékony cső sérülése esetén, vágja le a repedést ollóval, és újra hozza létre a megfelelő kötést.
5. A permetezési funkció használata során legyen figyelemmel:
 - a) Ne töltse túl a permettartályt.
 - b) A folyadékcseppek megakadályozására védekezzen törléssel.
 - c) Ne permetezzen szembe, orrba vagy szájba.
 - d) Ne töltsön a tartályba kis viszkozitású folyadékot, hogy ezzel megakadályozza a dugulást.
 - e) A permetező edényt minden egyes használat után tisztítsa vízzel vagy alkohollal tisztítsa ki.
6. A vákuumfunkció működése során meg legyen figyelemmel:
 - a) A bőrfelületet a vákuumfunkció működése előtt tisztítani és puhítani kell.
 - b) A vákuum szívóerősségét szabályozni kell, a magas intenzitás bőrelváltozást és vér véralvadását okozhatja a bőr felületén. A kozmetikus először saját kezűleg próbálkozzon, és a vákuumerőssé beállítása után kezdje vendégén a kezelést.
 - c) Ha a kezelést a bőr fix részein végezzük, akkor a nyomáscsökkentő levegő beömlésének nyomási idejét ujjával kell szabályozni, hogy elkerüljük a túl hosszú ideig tartó szívást.
 - d) A szívási ütemet meg kell növelni az olajos, vastag bőrről, a szívást nem szabad telangiectasissal bőrről alkalmazni.
 - e) Ne alkalmazza szemközeli vagy gyulladt felületen.
 - f) Ne használja vákuumcsövet szivacs szűrő nélkül, mert a készülék meghibásodhat.
 - g) A vákuum tartozékokat használat után fertőtleníteni kell.
 - h) A szivacs szűrőt ki kell cserélni ha csökken a szívóerő.

Hideg-Meleg funkció :

Érintőképernyő :

1. Állapotkijelző ablak: hideg vagy meleg állapot
2. Animációs kijelző: megjeleníti az animációt, érintéssel elindíthatja vagy szüneteltetheti a munkafolyamatot
3. Hőmérsékletcsökkentő gomb
 4. A hőmérséklet kijelzése, beállítása
 5. Hűtés-fűtés kijelzés
 6. Hőmérséklet kijelző ablak: tized fok hőmérsékletét jeleníti meg
 7. Gyorsbillentyű
 8. Hőmérsékletnövelő gomb
 9. Escape gomb (visszalépés)

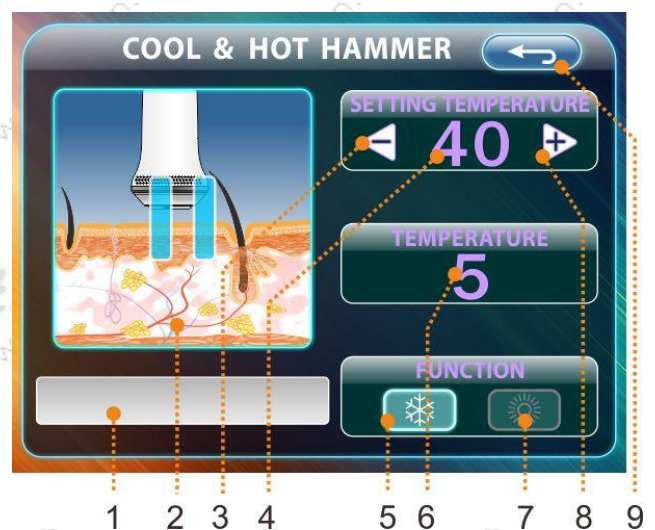

Hogyan kell használni

A főmenüben "COOL & HOT HAMMER" gomb érintésével válassza ki a **Hideg-Meleg** funkciót

"**HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS**" hőmérséklet kijelző ablakban "15" fok jelenik meg

"**HŐMÉRSÉKLET**" tized kijelző ablak "0" szintet mutat

Ebben az állapotban rendelkezésre áll a HŰTÉS beállítása.

A hőmérsékletet felfelé és lefelé állíthatja, vagy a meleg terápiára válthat, a vendég igényei szerint.

A kezelőfej hőmérsékletét növelje "➡" vagy csökkentse "⬅" a megfelelő hőmérsékletre. A meleg funkció hőmérsékleti tartománya: 30 - 45 fok, A hideg funkció hőmérséklet tartománya: 15 - 20 fok.

A hőmérséklet ablak megmutatja a kezelőfej aktuális hőmérsékletét.



Ha kijelző ezt a képet mutatja a kezelőfej jelenlegi hőmérséklete 40,5 fok.

Beállítás után nyomja meg a „START / SZÜNET” gombot, vagy nyomja meg a képernyő animációs megjelenítési felületét a kezelés elindításához. Ha hideg terápiában dolgozik a kezelőfej kék fényt bocsát ki, vörös lámpát bocsát ki. Meleg terápia esetén piros fénnel világít. Ha abbahagyja a munkát a lámpák kialszanak. A képernyőn megjelenik a működési állapot.

Figyelem!

1. Tisztítsa meg az arcot a sminktől stb, hogy a legjobb hőhatást érje el.
2. A kezelőfejet ne mártsa folyadékba, a nedvességtől mindig törölje szárazra.
3. Tartsa meg a fej jó hőkibocsátását, ne zárja el a markolat hőleadó furatait.
4. Ezt az eszközt mentális zavarokkal küzdő személyek (beleértve a gyermekeket) nem használják.

FIGYELMEZTETÉS!

A gőzölő használata esetén:

1. TILOS olajos anyagot helyezni a víztartályba vagy a gyógynövény tartóba mert a gőzölő hibás működését okozza!
2. Használjon tisztított csapvizet vagy ioncserélt vizet. Ellenkező esetben a vízszint érzékelő hibás működést jelezhet.
3. A gőzkar mindig elegendő távolságban legyen a bőrfelülettől, ellenkező esetben égési sérülést okozhat.
4. TILOS a készüléket túlzott páratartalmú környezetben használni, például: fürdőszoba, stb.
5. TILOS közvetlen napsugárzás mellett használni mert működésében zavar keletkezhet.
6. Működési zavar vagy meghibásodás esetén forduljon szakszervizhez - ELKONcosmetic Kft. www.elkon.hu
7. Ha a tápkábel megsérül kizárólag eredeti újra cserélje.
8. Szakszerűtlen beavatkozás életveszéllyel és garancivesztéssel járhat.
9. A kezelőpanel folia a különféle kozmetikai anyagokkal történő érintkezések következményeként kikeményedhet, berepedhet ilyenkor azonnal kérje szervizünköt a folia cseréjét.
10. Vízkötelenítéshez egy evőkanálnyi (10-20ml) ecetet adjon a tartály vizéhez és indítsa el a gőzölést. Szükség esetén ismételje meg a műveletet, majd tiszta vízzel indítson újabb gőzölést a szagtalanítás miatt.

VIO (Nagyfrekvenciás elektroterápiás) funkció használata esetén:

1. Kezelés idejére a fémből készült ékszert el kell távolítani, az elektróda nem érinkezhet fémmel.
2. Nem javasolt a kezelés érzékeny, rosaceás, sérült bőrfelszínen, terhes nőknél, más egyéb esetben pl. szívritmus szabályozó, implantátum.
3. Nagyfrekvenciás elektroterápia használata esetén NE használjon etanoltartalmú krémeket és arcmasszát.
4. NE használja az elektroterápiás illesztéket szemgolyó közvetlen közelében.
5. NE érintse meg a nagyfrekvenciás elektroterápiás illesztékkel (VIO) a készülék fémcsatlakozásait, érintő képernyőjét, tartozékait mert az ívkisülés kárt tehet benne.
6. A tartozék dugaszoló kábelét stabilan kell csatlakoztatni a készülékhez.
7. Ezt a készüléket professzionális kozmetikus szakember működtetheti.
8. **A VIO illesztéket soha ne érintse a készülék kijelzőjéhez, egyéb tartozékaihoz, más fémtárgyakhoz és elektromos eszközökhöz!!!**

Kétpólusú galvan funkció esetén:



1. A következő betegségben szenvedő betegeken ne végezzen kezelést pl. szívbetegség, fertőző betegség, neuroticizmus és ha a testben fém található..
2. Ne végezzen hosszú ideig kezelést.
3. Ha a bőrápoló anyag nem biztosítja a kellő hidratáltságot, akkor időben pótolja.
4. NE használjon olyan görgőt, amely nem tud elfordulni, ezt időben cserélje ki.
5. Ne használjon az elektródát károsító, korrodáló anyagot.
6. NE használjon sérült, vagy kopott elektródát, mert a bőr sérülését okozhatja.

Ultrahang funkció használata esetén:

1. Az ultrahang fejet ne működtesse használaton kívül mert túlmelegszik, teljesítménye és élettartama lecsökken.
2. Ne csavarja szét a fejet illetve a markolatot illetve a csatlakozót mert azzal károsítja.
3. Tilos az ultrahang fejet vízbe mártani.
4. A fej felületi sérülése felsértheti a bőrt, ebben az esetben ki kell cserélni.

Spray és vákuum használata esetén:

1. Óvja a flexibilis csöveket és csatlakozásait éles hajlításoktól, soha ne húzza túl, ne nyújtsa meg.
2. Ne töltsön a permetező tartályba korrodáló anyagot.
3. Tilos a vákuum és a spray csatlakozásokat felcserélni mert a szívóoldal folyadékot szívhat fel, ebben az esetben a vákuumszivattyú végzetesen károsodhat (lásd az ábrát)

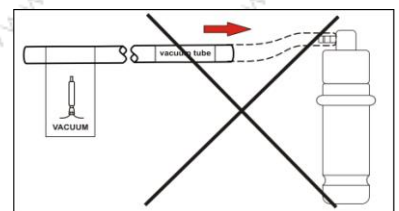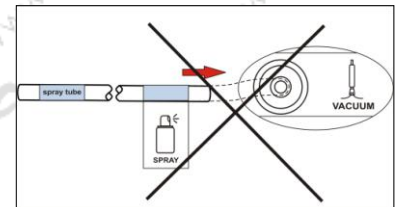

A bázis készülék használatára vonatkozó közlemények:

1. Működés közben a tartozékok csatlakozó vezetékeit ne feszítse túl.
2. A sérült hálózati vezetéket cserélje eredetire.
3. Rendellenes működés esetén azonnal kapcsolja ki és forduljon a szervizhez.
4. Tilos erősen párás helységben tárolni, használni.
5. Tilos gyúlékony és robbanás veszélyes környezetben tárolni, használni.
6. Tilos a készülék burkolatát megbontani, benne átalakítást végezni mert a készülék életveszélyessé válhat.

A készülék szakemberek részére készült, mindenki saját felelőssége mellett használhatja.

Garancia:

Az ELKONcosmetic Kft. a készülékre 1 év teljes körű garanciát vállal, a vásárlás napját azonban hitelt érdemlően igazolni kell számlával és garancia levéllel.

A garanciális- és díjtalan kijavítási felelősség megszűnik nem rendeltetés szerű használat, elemi kár, törés, helytelen tárolás, szakszerűtlen beavatkozás és átalakítás esetén.

A készülék javítását kizárólag az ELKONcosmetic Kft. Szerviz végzi:

2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Telefon: 06-70-9492223



Műszaki és technikai adatok:

Termék neve	10 in 1 Multi-funkciós kozmetikai készülék
Típusa	E5001-AD
Funkciók	Gőzölő, Nagyítós lámpa , Ultrahang, Hidroabrázió, Iontoforézis, VIO, Hideg-Meleg vasaló, Spray, Vákuum, Mikrodermabrázió
Hálózati feszültség	AC 220-240V~
Hálózati frekvencia	50/60Hz
Fogyasztás	800 W
Méreték(Hosszúság *Szélesség*Magasság)	50X50X103cm
Súly	27.6Kg

Gyártó előzetes értesítés nélkül a változtatás jogát fenntartja!



Forgalmazza:

ELKON cosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu Tel: [+36-28-472129](tel:+36-28-472129)

Mobil: [+36-70-9492198](tel:+36-70-9492198)