

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Giovanni D-09 Vapozon

modell: DT-8228 Fehér



Giovanni D-09 multifunkcionális vapozone meleg gőzzel és ózonnal.

A vapozone állítható magasságú állványra van szerelve, így sokkal könnyebb a kezelése elvégzése. A készülékből felszabaduló gőz megnyitja az eltömődött pórusokat, lehetővé teszi a bőr mélytisztítását, oxigénnel látja el a bőrt és megtisztítja azt a mérgeanyagoktól. A kezelés javítja a vérkeringést is.


A készülék működése:

1. Puhítja a bőrt,
2. Fertőtleníti a pórusokat,
3. Kitágítja a pórusokat,
4. Serkenti a bőr vérellátását,
5. Elősegíti a mitesszerek és az elhalt bőr eltávolítását,
6. Hidratálja és felfrissíti a bőrt,
7. Javítja a bőr állapotát.

Műszaki adatok

Feszültség	220-240V
Teljesítmény	850W
Névleges frekvencia	50/60Hz
A víztartály kapacitása	600ml
Gőz hőmérséklete	Kb. 40°C
Súly	4kg

Készülék méretei

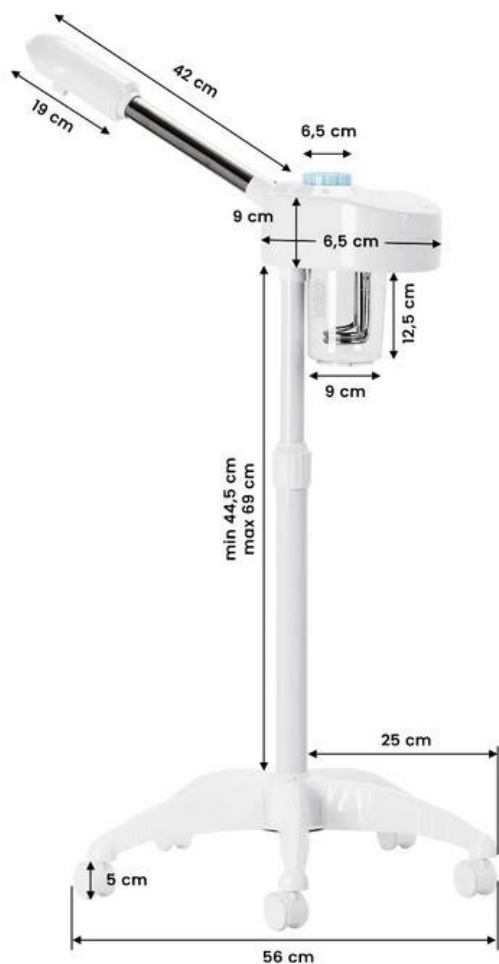

Előkészítés:

1. A párologtató használata előtt távolítson el minden csomagolási elemet.
2. Helyezze a készüléket oda, ahol használni fogja. Lehetőleg sík és stabil felületre.
3. Csavarja ki a víztartályt, és töltsen meg tiszta, lehetőleg szűrt vízzel. Ezután csavarja rá szorosan a kupakot.
4. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforráshoz.
5. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a HOT gombot hosszú ideig.
6. A készülék hangjelzést (zümögés) ad, ha nincs, szennyezett vagy nem elegendő víz van.
7. A forró gőzkezelés elindításához töltsen tele a víztartályt, és tartsa lenyomva a HOT gombot. A fűtőberendezés elkezd melegíteni a vizet, és néhány perc múlva meleg gőz fog távozni. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a HOT gombot.
8. Az ózon funkció aktiválásához tartsa lenyomva a LIGHT gombot hosszú ideig. Az ózon bekapcsol, és a gőz mennyisége megnő. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a gombot.



9. A wapozone feje tetszés szerint forgatható.

A készülék használati utasítása:

1. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa a fúvókát kb. 20 cm-re az arcától.
2. A készülék bekapcsolása és felmelegedése után néhány tíz másodperccel gőz fog felszállni.
3. Ha nincs elegendő víz, a gőzteljesítmény fokozatosan csökken. A készülék kikapcsol, ha nincs elég víz.
4. Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a kikapcsolás után. Várjon körülbelül 10 percet, amíg a tartály lehűl. Ezzel elkerülhető az esetleges leforrázás.
5. Ha a készülék vízhiány miatt automatikusan kikapcsol, várjon kb. 2 percet, amíg a jelzőfény vissza nem kapcsol, és a készülék újra működésképes lesz.
6. A kezelés során ellenőrizze a vízszintet, és töltsen fel a tartályt, ha a vízszint eléri a minimumot.

JELLEMZŐK:

1. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a tartályban lévő vízszint nem elegendő.
2. A készülék meleg gőzt termel.
3. A készülék rendelkezik "ózon" funkcióval.

MEGJEGYZÉS!

A túlzott használat káros lehet a bőrre. Kezdetben a készüléket csak naponta egyszer, legfeljebb 10 percig szabad használni. Normál bőr esetén hetente 2-3 alkalommal, érzékeny bőr esetén hetente egyszer használja.

Ajánlások:

1. Tilos a készüléket fürdőkád, mosdókagyló vagy más nedves edény közelében használni. Ne használja vagy tárolja a készüléket fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütést, tüzet vagy a szigetelés károsodását eredményezheti. A készüléket nem szabad vízbe meríteni.

2. Tilos a készüléket olyan személyek számára használni, akiknek hőérzékenységi problémáik vannak. Ez égési sérüléseket okozhat.
3. Ajánlatos azonnal abbahagyni a készülék használatát, ha bármilyen fájdalom vagy rendellenesség jelentkezik a bőrön vagy a testen.
4. A termék használatának ellenjavallatai:
 - Terhesség, menstruáció, hormonális zavarok,
 - Allergia, bőrbetegségek, atópiás dermatitis, nagyon érzékeny bőr vagy leégett bőr,
 - Bőrsérülések, pattanások, duzzanatok stb,
 - Legutóbbi sebészeti műtétek.
5. Ne érintse meg a dugó fémrészeit a csatlakoztatáskor. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót az aljzatból, ha nem használja a készüléket.
6. A por felhalmozódásának megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. A nedvesség és más tényezők a szigetelés kilyukadását okozhatják. Kerülje el, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
7. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, ez a kábel meghibásodását okozhatja. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó forró vagy sérült, illetve ha a dugó lazán van a konnektorban.
8. Győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugalj megfelelően csatlakozik a konnektorhoz. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat. A készüléket nem szabad nedves vagy nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni a konnektorból. A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni. A zsinórra nem szabad semmilyen nehezéket helyezni.
9. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
10. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.
11. Az eszközt nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütközés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
12. Ne dugjon semmit a fűvókába, és ne csípje meg a fűvókát, mert ez áramütést okozhat. Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a berendezést vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokon kívül más célra használni.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a hivatalos szervizhez:
 - A. folyadék került a készülékbe,
 - B. a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat bocsát ki,
 - C. a tápkábel megsérült,
 - D. a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden alkalommal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.

9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz, ezzel elkerülheti a veszélyt.

2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt készülékeket

az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag az eredeti csomagolásban, (-)20°C és (+)40°C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+)10°C és (+)40°C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.