

H2, O2 arckezelő készülék

Használati Utasítás



Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta készülékünket!

Kérjük, üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen és tartsa be a használati utasításban leírtakat!

ELKON cosmetic Kft.

www.elkon.hu

1. Készülék bemutatása



6 különböző hydrodermabrázió kezelőfej



H2 O2 kezelőfej



Ultrahang kezelőfej



Peeling



RF kezelőfej



Spray pisztoly



Hideg vasaló

2. Figyelmeztetések

- 1) . Biztosíték cseréje előtt áramtalanítsa a készüléket.
- 2) A készülék mozgatása előtt húzza ki a vezetéket a dugaljból.
- 3) A készüléket 5-40 C fokon szabad csak tárolni beltéri helyiségben, direkt napsugárzástól távol tartva. Tilos letakarni, különös tekintettel a szellőző résekre.
- 4) A képen látható módon állítsa össze a készüléket, a kezelőfejeket az előirt helyükre illessze.
- 5) A kezelést követő 24 órán belül ne alkalmazzon irritáló készítményt a kezelt bőrfelületen és kerülje a napfényt a vendég.
- 6) A kezelést követő egy héten csak hidratáló készítményt ajánlott alkalmazni.
- 7) Tilos a készülékkel kezelést végezni, amennyiben a vendég:
 - a) várandós,
 - b) szív-, vese-, cukorbeteg, vagy rákos beteg,
 - c) bakteriális fertőzésben szenved,
 - d) keloidra hajlamos,
 - e) pacemakerrel él,
 - f) túlérzékeny bőrű.
 - g) Akut gyulladt bőrfelületen szintén ne alkalmazzuk a készüléket.
 - h) Vékony hámréteggel rendelkező vendégeken a H2, O2 kezelőfej nem ajánlott, az RF max 10 percig alkalmazható.
 - i) Súlyos allergiás vagy aknés bőrképpel rendelkező vendégek esetén szintén nem ajánlott a készülékkel történő kezelés.
- 8) Amennyiben a vendég kényelmetlenül érzi magát a kezelés alatt, szakítsa meg a műveletet az esetleges sérülés elkerülése érdekében.

3. A készülék üzembehelyezése

3.1 A készülék hátulján található:




3.2 Az A, B, C, D tartályokat valamint az elhasznált víz tartályát szállítás alkalmával ürítse ki. Ellenkező esetben a folyadék a készülék belsejébe juthat, ezzel károsítva azt.

3.3 Amennyiben használat közben a készülék sípoló hangot ad, ellenőrizzük a használt víz tartály kijelzőjét: ha villog, öntsük ki a vizet és helyezzük vissza az üres tartályt.

4. A készülék működtetése

4.1 Vizes mikrodermabrázió használata

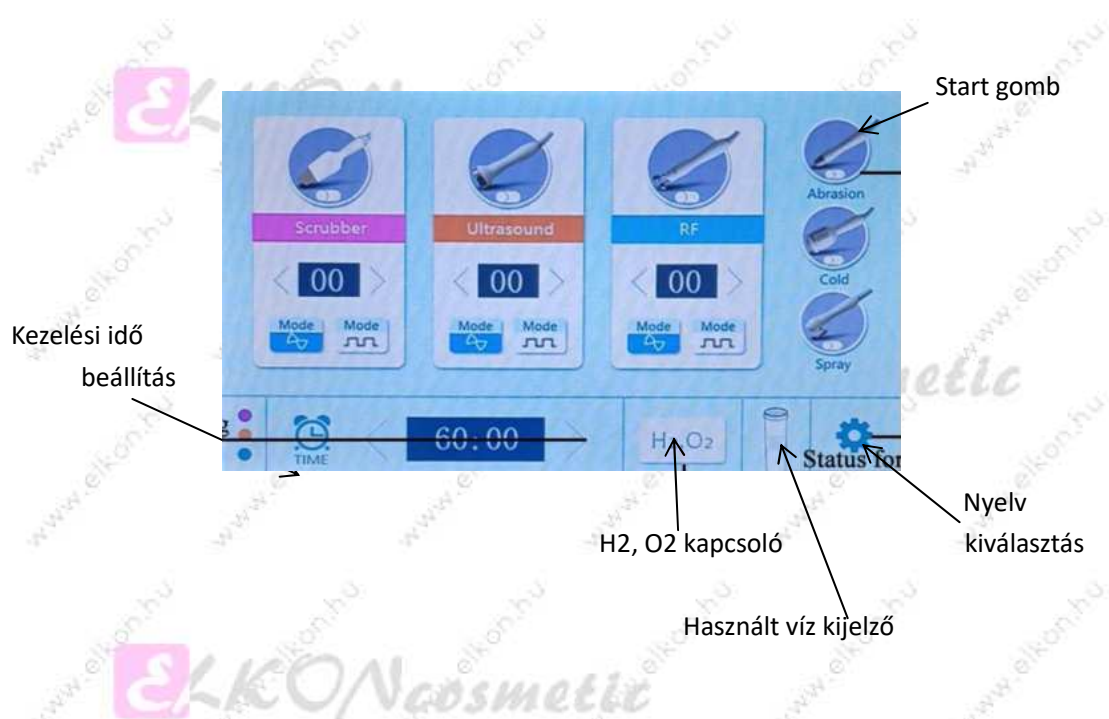

4.1.1 Tisztítsa le a kezelendő bőrfelületet.

A kezelés hatására csökken a pórusok mérete, javul a bőr elaszticitása, puhává válik a bőrfelület.


4.1.2 Válassza ki a használni kívánt kezelőfejet a bőr állapotának megfelelően, valamint az A, B, vagy D tartályt.

Figyelem:

A H₂O₂ alkalmazásához először állítsa a tartály kiválasztó gombot D állásba, majd nyomja meg a (H₂O₂) gombot. Kb. 3 percre van szükség ahhoz, hogy a D tartályban a készülék előállítsa a megfelelő mennyiségű H₂, O₂ ionokat.

4.1.3 Állítsa be a kezeléshez szükséges vízszugár erősséget valamint a vakuum szívás erősséget. A teljes művelet kb. 10 perc.

4.1.4 A kezelés végén válassza ki a C tartályt a cső kitisztításához, az Air gombot a maximumra kell állítani a maximális szívóhatás elérése céljából. A Water gombot, amellyel a vízszugár erősségét szabályozhatjuk, szintén a legmagasabb fokozatra kell emelni a megfelelő tisztító hatás érdekében. Az így bekapcsolt kezelőfejre 7-8 alkalommal oda kell szorítani az ujjunkat pár másodpercre, majd újra elengedni azt, így automatikusan kitisztul a cső.

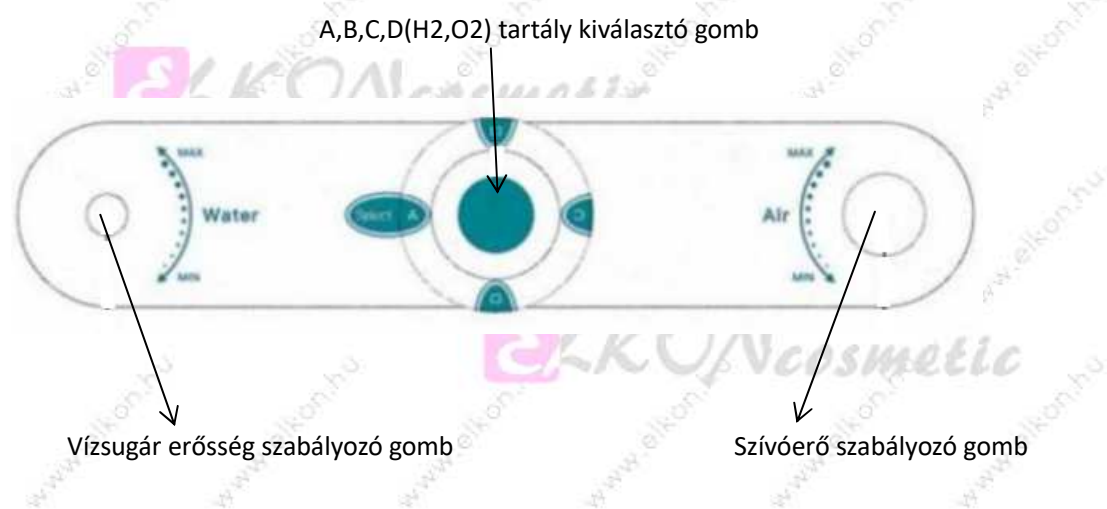

Használat után a fenti módszerrel mindig ki kell tisztítani a csövet a dugulás elkerülése érdekében.

4.2 Spray használata




4.2.1 Tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet.

4.2.2 A használni kívánt hatóanyagot töltsse a spray kezelőfejen található tartályba.

4.2.3 Érintse meg a spray jelét a kijelzőn.

4.2.4 A kezelőfejen található gomb megnyomásával indítható a spray funkció. A nagy nyomású spray segítségével könnyen és gyorsan juttathatunk hatóanyagokat a bőr mélyebb rétegeibe. Ügyeljen a megfelelő távolságra, a bőrfelülethez közel tartva vezesse végig a kezelőfejet arc felületén.

4.3 Hideg vasaló használata

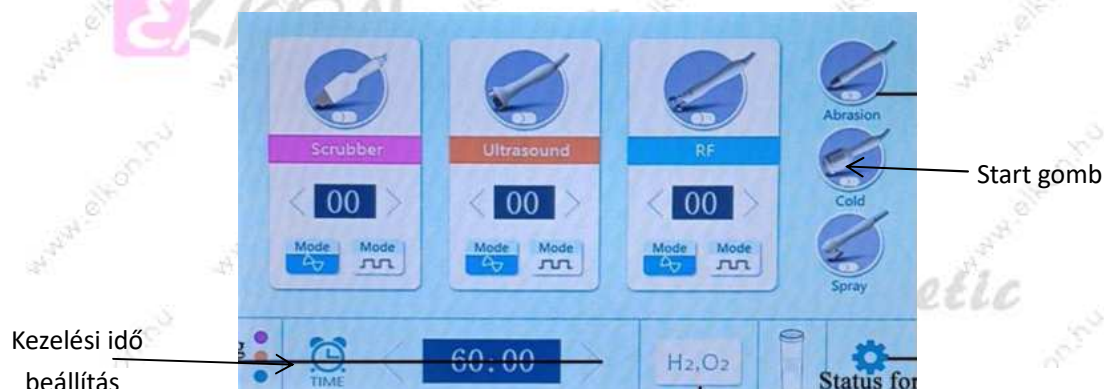


4.3.1 Tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet..


4.3.2 Érintse meg a hideg vasaló jelét a kijelzőn.

4.3.3 Alkalmazza a hideg vasalót az arcon az alábbiak szerint:..

1. Alulról felfelé az álltól indulva az orr, majd a fül irányába.
2. Az orrtól a homlokon felfelé.
3. Az orcától a halánték irányába.
4. Lassú mozdulatokat végezzen, gyengéden vezetve a kezelőfejet.

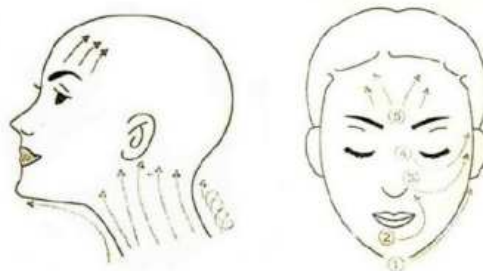

4.4 Rádiófrekvencia használata

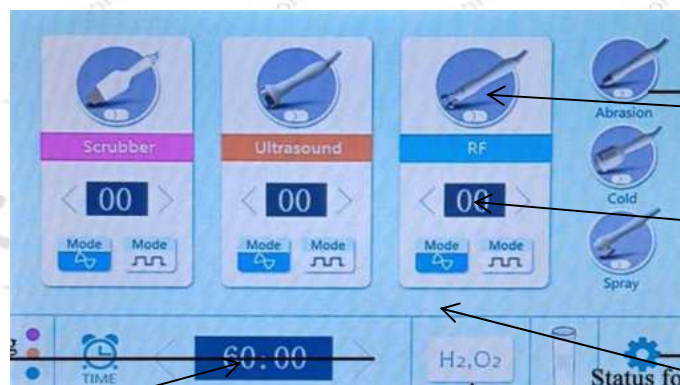

Start gomb

Intenzitás/
erősség

Folyamatos/
pulzáló
üzemmód

Kezelési idő
beállítása

4.4.1 Tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet.


4.4.2 Vigyen fel kontakt gélt a bőrre.

4.4.3 Állítsa be a kezelési időt, az alkalmazni kívánt üzemmódot és a RF erősségét.

4.4.4 A kezelés megkezdéséhez érintse meg a képernyőn az RF jelet.

4.4.5 Körkörös mozdulatokkal haladjon az arc és a nyak felületén alulról felfelé haladva. A kezelési idő 10-15 perc.

4.5 Ultrahang

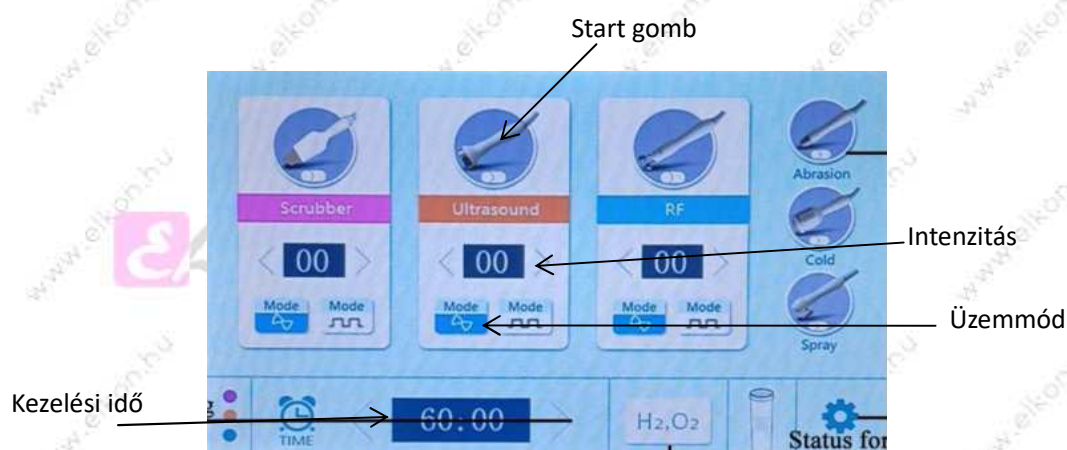

4.5.1 Tisztítsa le a kezelendő bőrfelületet.


4.5.2 Alkalmazzon a bőrtípusnak megfelelő gélt.

4.5.3 Állítsa be a kezelési időt, az alkalmazni kívánt üzemmódot és az intenzitást.

4.5.4 A kezelés megkezdéséhez érintse meg az ultrahang kijelzőjét a képernyőn.

4.5.5 Körkörös mozdulatokkal haladjon végig a kezelendő bőrfelületen. A kezelési idő általában 7-8 perc.

4.6 Hidroabrázió /peeling

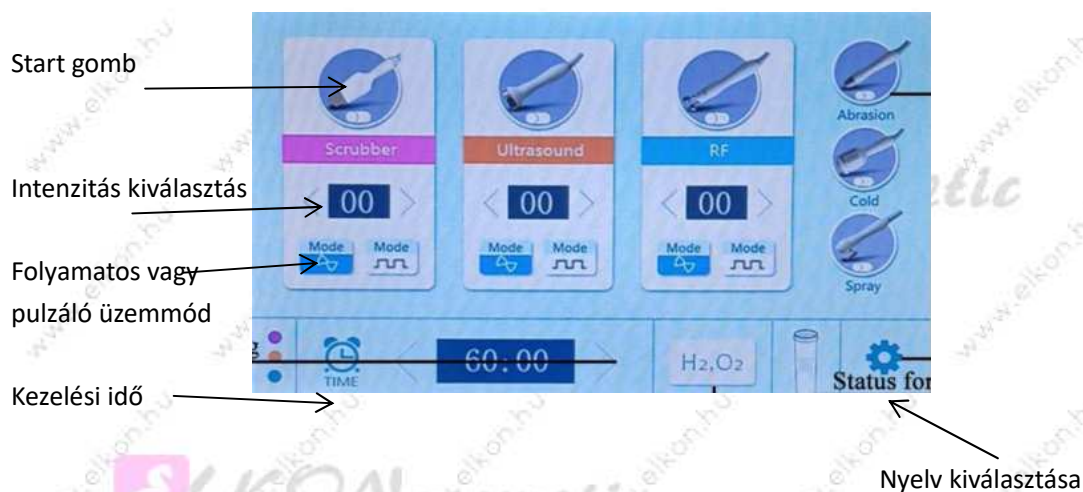

4.6.1. Tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet.

4.6.2 Állítsa be a kezelési időt, az intenzitást (erősséget), és az alkalmazni kívánt üzemmódot (folyamatos/pulzáló).

4.6.3 A kezelőfej segítségével a bőr felszínét tisztíthatjuk meg a szennyeződésektől.

1) Felületi peeling (hidroabrázió) alkalmazására.

2) Fertőtlenítse a kezelőfejet. A kezelés során a kezelőfej nyelén két oldalt található fémhez két ujjával hozzá kell érnie.


3) Vizezze be a kezelendő bőrfelületet.

4) A kezelőfejet 45 fokos szögben kell tartani a bőrfelületen, lassan mozgatva eltávolítja a szennyeződést.

5) A kezelési idő 20 perc.

4.6.4 Nyirok masszáz

- 1) Tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet.
- 2) Fertőtlenítse a kezelőfejet.
- 3) Vigyen fel elegendő mennyiségű bőrápoló készítményt a kezelendő felületre.
- 4) Helyezze a kezelőfejet lapjával a bőrfelületre, majd végezzen simító mozgást.
- 5) A kezelési idő 15 perc.

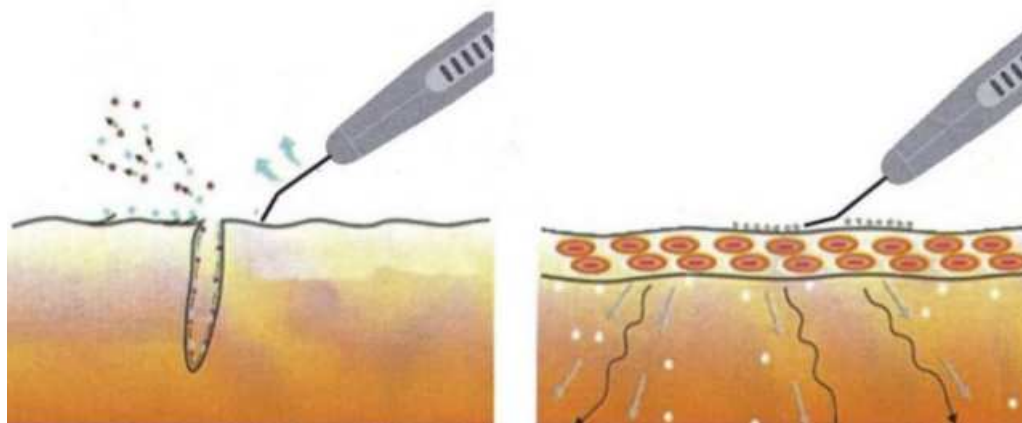

Tisztító üzemmód

Hatóanyag bevitel

5. Karbantartás, szervizelés

- 5.1 A készülékre egy év garancia van. A szervizelés egy év után is biztosított szervízdíj ellenében.
- 5.2 Amennyiben cserélni vagy pótolni szeretné az alkatrészeket vagy tartozékokat, lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.
- 5.3 A garancia nem terjed ki az alábbi és más emberi mulasztásból fakadó káreseményekre:

- a) Amennyiben a vásárló maga szétszereli vagy átalakítja a készüléket.

- b) Helytelen karbantartásból eredő károk esetén.
- c) Amennyiben a készüléket ütés éri, illetve leesik.
- d) Nem megfelelő működtetés esetén.
- e) Előre nem látható természeti katasztrófa, mint pl. tűzvész, földrengés, villámcsapás során keletkező kár.

5.4 A készülék tisztítása száraz vagy nedves puha törölkendővel történhet.

6. Tartozékok

Megnevezés	Mennyiség
Csatlakozó kábel	1 db
Hidroabrázió	1 db
RF kezelőfej	1 db
Ultrahang kezelőfej	1 db
Hideg vasaló	1 db
Hydro (H ₂ ,O ₂) kezelőfej	1 db
Hydro(H ₂ ,O ₂) cserélhető fejkég	6 db
Spray pisztoly	1 db

7. Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 230V - 50Hz

Felvett teljesítmény: 200W

Ultrahang frekvencia: 1Mhz

Rádiófrekvencia: 2MHz, bipoláris

Szívóteljesítmény: 65cmHg

Vízáram: 30L

Nyomás: 90Kpa

Szélessége: 27 cm

Magassága: 27 cm, tartozékokkal 46 cm

Mélysége: 43 cm

A készüléket importálja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft. H-2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Telefon/fax: (+36)-28-472 129

Szerviz: (+36)-70-9492223

Web:www.elkon.hu

Email:elkon@elkon.hu