

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ STERILIZÁLÓ  
WX-12C



<b>A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI</b>	
<b>Bemeneti feszültség</b>	<b>220-240 V</b>
<b>Elektromos energia</b>	<b>1000W</b>
<b>Névleges frekvencia</b>	<b>50HZ</b>
<b>Modell</b>	<b>FMX-36</b>
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	<b>0°C és 250°C között</b>
<b>Súly</b>	<b>3,25 kg</b>
<b>Külső méretek</b>	<b>22x23x32cm</b>

## **Figyelem**

A terméket professzionális használatra tervezték.

### **Első használat előtt**

A készülék használata és összeszerelése előtt:

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. A későbbi használatához tartsa elérhető helyen. Távolítsa el a csomagolás maradványait a készülék belsejéből.
2. Távolítsa el a csomagolás maradványait a készülék belsejéből.
3. Első használatba vétel. Állítsa be a hőmérsékletet 250°C-ra és az időt 15 percre, majd hagyja, hogy a gép eltávolítsa a maradékot. Sajátos szag keletkezhet. Ez normális.

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. A készüléket egy jól szellőző helyiségben, hőforrásoktól távol, sima és stabil felületen helyezze el. A készüléket nem szabad víz, kádcsapok stb. közelében használni.
2. Dugja a dugót a megfelelő aljzatba.

## **ELŐKÉSZÍTÉSEK**

1. Helyezze a sterilizálandó műszereket a készülékbe.
2. Zárja be a készülék ajtaját
3. A kiválasztott idő és hőmérséklet beállítása
4. Várja meg, amíg a készülék kikapcsol.
5. Óvatosan vegye ki a műszereket a sterilizálóból.

**NE FELEDJE, HOGY KÜLÖNÖSEN ÓVATOSNAK KELL LENNIE, MIVEL A TÁLCÁK, VALAMINT A BELSŐ ÉS KÜLSŐ FELÜLETEK FORRÓAK LEHETNEK. AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MINDIG HASZNÁLJON VÉDŐKESZTYŰT.**

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg a jelen kézikönyvben megadottaktól eltérő célokra használni. Bármilyen szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus végezhet!
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a szervizhez.

- a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
  6. Biztonsági okokból minden alkalommal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
  7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
  8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
  9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
  10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

### MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



### A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és a hulladékkészülékek gyűjtőhelyein leadni.

elektronikus és elektromos.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni a megfelelő gyűjtőpontokon.

### TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.